

דף הוראות הפעלה – LOOKY

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו. הטמ"ס שרכשת מבית Rean Electronics דגם LOOKY הינו אחד הטמ"סים עם הטכנולוגיות החדישות ביותר בתחום. אנו מקווים שהטמ"ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם את איכות חייך. אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב, המהיר, המקצועי והאיכותי ביותר.


אזהרות: כל שימוש שגוי ולא כפי שהומלץ בהוראות השימוש יגרום לאיבוד האחריות של החברה.

- אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו בהמשך החוברת.
- אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה.
- המכשיר לא מיועד לשימוש במקום רטוב או באזור כימי.
- אין לחשוף את המכשיר למקור חם.
- כדי לנקות את המכשיר השתמש במטלית לחה בלבד ולא בשום חומר אלקוהולי.

לפני השימוש הראשוני יש להטעין את הטמס עד שהבטריה מלאה. שים לב להוראות הטעינה.

1. **טעינה-** הכנס את המטען לתקע ומצדו השני לטמס – ישמע שני

קולות של ביפ בזמן החיבור. במידה והטמס דלוק טעינה לא תתבצע.

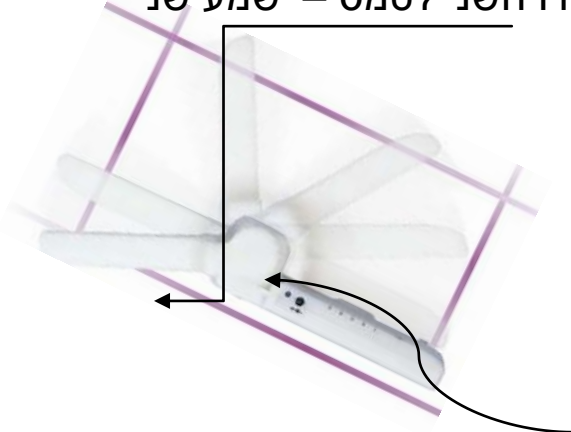

- כשתאורה דולקת כל הזמן – הטמס עדיין בטעינה.
- כשהתאורה מהבהבת- הטמס טעון ומוכן לשימוש.
- כשהתאורה מהבהבת ונשמע צליל כפול- יש בעיה בבטרייה או לא מתבצעת טעינה.
- זמן הממוצע לשימוש בטמס הינו 1.5-2 שעות.
- זמן הממוצע לטעינה הינו 6 שעות- תלוי במצב תכולת הבטרייה בתחילת הטעינה.

שמירה על הבטרייה

- הוצא את הבטריות מתוך הטמ"ס. רק אם אין ברצונך להשתמש בו לתקופה ארוכה.
- הבטריות רגישות להטענה מרובה. מומלץ להטעין את המכשיר רק בסיום הבטרייה ולא לפני.

חיי כהן TECHNOVISION

מערכות מידע ומחשבים בע"מ 02-5003646

- לבטריות הנטענות יש פריקה אוטומטית. דבר זה מותנה בטמפרטורה שהם נמצאות. לכן אל תשאיר את הבטריות או המכשיר במקום חשוף לשמש.
- בטריות חדשות יש לטעון מספר פעמים עד שהם מגיעות ליכולת המרבית שלהם.
- יש להטעין את הבטריות לפחות פעם אחת בחצי שנה.
- ממוצע היכולת של הבטריות הם 300 פעמים טעינה. זה תלוי בשימוש. לאחר מספר פעמים זה יכולת הבטרייה תפחת.

הפעלה

- כיבוי והדלקה- לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור הצהוב (3 שניות). ישמע צליל הדלקה. במידה ואין תזוזה במכשיר- המכשיר ייכבה לאחר 3 דקות. ישמע צליל כיבוי. כשהבטרייה מסתימת המכשיר כבה מעצמו – ישמע צליל הולך ויורד.
- ידית מתקפלת- ל-LOOKY יש ידית אחיזה מתקפלת. לידית מספר מצבים לשימוש:
 - כשהידית פתוחה ניתן להשתמש במכשיר כמו זכוכית מגדלת. ככל שתתקרב לקטע הקריאה הטקסט במסך יגדל.
 - כשהידית סגורה- ניתן להניח את המכשיר על גבי הקטע קריאה והזיזו כך שהוא צמוד לקטע הקריאה. ההגדלה X8 קבועה.
 - בעזרת מתקן ההגבהה – ניתן להניח את ההגדלה קבועה גם בהגדלות אחרות.
 - ניתן לכתוב עם הטמס – ע"י קימור המסך ותמיכה בידית (ראו תמונה).



4. **מצבי תצוגה-** לחיצה על הכפתור הכחול ניתן להחליף מצבי תצוגה צבע מלא, שחור על גבי לבן, לבן על גבי שחור.
5. **צילום/הקפאה-** ניתן להקפיא את התמונה עליה מסתכלים לחיצה קצרה על הכפתור הצהוב. לשחרור ההקפאה לחץ לחיצה קצרה שנית. בזמן ההקפאה – אורות הטמס יכבו זאת כדי לחסוך זמן בבטרייה, ניתן לשנות מצבי תצוגה.

חיי כהן TECHNOVISION



מערכות מידע ומחשבים בע"מ 02-5003646