

Insight 1800

פתח דבר

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו.
הטמ"ס שרכשת מבית VTI דגם INSIGHT 1800 הינו אחד הטמ"סים
עם הטכנולוגיות החדישות בתחום.
אנו מקווים שהטמ"ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם
את איכות חיידך.

אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב, המהיר,
המקצועי והאיכותי ביותר.

במקרה של תקלה ניתן לפנות למערכת השירות בחברתנו
בטלפון 02-5003646 או 1-599-555-789

ראובן חי כהן
מנכ"ל החברה

מידע חשוב

אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו בהמשך החוברת.
אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה.
ניסיון תיקון של טכנאי לא מורשה יגרום לאיבוד האחריות של החברה.
אין להתקין מכשיר זה ליד טלוויזיה או מכשיר רדיו. כדי למנוע הפרעות קליטה.
יש לחבר מכשיר זה לחשמל בהתאם להוראות כמכשיר עצמאי ולא באמצעות רב
שקע עם מכשירים אחרים שלא קשורים לטמ"ס.
מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו כדי ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת
באופן יעיל וכדי להימנע משימוש שלא בהתאם להוראת היצרן.

התקנה

פתח את האריזה, הוצא את הטמ"ס ואת שאר החלקים והנח אל משטח יציב. שמור את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז את הטמ"ס מכל סיבה שהיא.

לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה.

טמ"ס, כבל וידאו RCA, ספק כח לטמ"ס, מתאם VGA, כבל VGA, ספק כח למתאם VGA.

לאחר שבדקת שיש בידיך את כל החלקים מקם את הטמ"ס על משטח יציב. דאג להשאיר מקום לתזוזה נוחה של המגש ימינה, שמאלה וקדימה.

את המסך ניתן למקם על הטמ"ס או לצידו הימני או השמאלי. שים לב! אם החלטת למקם את המסך על הטמ"ס מומלץ להניח על שולחן נמוך מגובה שולחן סטנדרטי כדי שגובה המסך יתאים לגובה העיניים בישיבה או לחילופין כיסא גבוה.

עומדות בפניך 3 אופציות לחיבור:

1. חיבור למסך טלוויזיה.
 - א. חבר את כבל ה- RCA לשקע וידאו OUT בחלק האחורי העליון מצד שמאל של הטמ"ס.
 - ב. חבר את הקצה השני של הכבל ה- VGA לשקע וידאו במסך הטלוויזיה.
 - ג. חבר את הטמ"ס לחשמל בעזרת הספק המקורי.
 - ד. חבר את הטלוויזיה לחשמל.
2. חיבור למסך VGA
 - א. חבר את כבל ה- RCA לשקע וידאו OUT בחלק האחורי העליון משמאל של הטמ"ס.
 - ב. את הקצה השני של הכבל חבר לשקע RCA IN במתאם ה- VGA המודבק בחלק האחורי העליון מצד ימין של הטמ"ס.
 - ג. חבר כבל ה- VGA לשקע VGA OUT במתאם ה- VGA המודבק בחלק האחורי העליון מצד ימין של הטמ"ס.
 - ד. את הקצה השני של כבל ה- VGA חבר לשקע ה- VGA

במסך.

ה. חבר את מתאם ה-VGA לחשמל עם הספק המיועד לו.

ו. חבר את הטמ"ס לחשמל עם הספק המיועד לו.

ז. חבר את המסך לחשמל.

3. שילוב מחשב בעמדה

ניתן לשלב מחשב לאופציה מס' 2' בלבד. השילוב יאפשר לך להשתמש במסך הטמ"ס גם עבור המחשב.

א. בצע את ההוראות א' עד ז' מאופציה 2.

ב. חבר את כבל ה-VGA מהמחשב ביציאת המסך לשקע

ה - VGA IN במתאם ה-VGA המודבק בחלק האחורי מצד ימין של הטמ"ס.

בצד העליון של מתאם ה-VGA ישנו כפתור קטן, הכפתור מיועד לאלה המחברים את המחשב לטמ"ס והוא מאפשר העברת תמונה ממצב מחשב למצב טמ"ס וההיפך.

תיאור הטמ"ס

לוח הבקרה ממוקם בחלק העליון מלפנים. בלוח ממוקמים כל כפתורי ההפעלה של הטמס למעט כפתור המעבר מתצוגת מסך לתצוגת מחשב, כפתור זה ממוקם במתאם ה-VGA.



מתאם VGA



נעילת מגש

מצבי תצוגה

בהירות/כהות

כיבוי הדלקה

הגדלה/הקטנה

הגדלה הקטנה

משולש המופנה כלפי מעלה והתחתון מופנה כלפי מטה.
כפתורים אלה מיועדים להקטנה ולהגדלה של התמונה
המוצגת במסך.



כיבוי הדלקה

יש ללחוץ על כפתור ההדלקה והכיבוי להתחלה וסיום
העבודה- הלחצן ממוקם במרכז הטמס – קטן ומרובע.




נעילת המגש

משמאל לשני החיצים ישנם שני כפתורים נוספים, העליון
משמש לנעילת המגש.




מצבי תצוגה

כל לחיצה על כפתור זה משנה את מצב התצוגה – מצב צבע מלא, מצב פוטו גווני אפור, לבן על רקע שחור, נגטיב

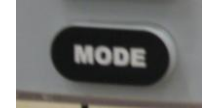

בהירות/כהות

לחיצה על כפתור זה בחלקו הימני-השחור תוסיף כהות למסך, לחיצה על החלק השמאלי-הצהוב תוסיף בהירות לתמונה. כל זה במצבי תצוגה של קריאה בלבד (לבן על שחור או נגטיב)

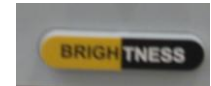

הפעלה ראשונה

- לפני שנפעיל את הטמ"ס דאג שמגש הקריאה ישוחרר מהנועל הידני. סובב את הנועל עד לשחרור מגש הקריאה. מקם את הטמ"ס כך שמגש הקריאה יוכל לנוע לכל הכיוונים ללא הפרעה. הדלק את המסך ואת הטמ"ס והנח חוברת או ספר, רצוי צבעוני על מגש הקריאה.
- אם אתה משתמש באופציה של מסך ה – VGA במקום מסך הטלויזיה דאג שגם ספק החשמל של מתאם ה – VGA מחובר לחשמל. אם לאחר הפעלת הטמ"ס אין תמונה על המסך לחץ קלות על הכפתור במתאם ה – VGA כדי לעבור לתצוגת טמ"ס.
- הפונקציה הראשונה לכיוון בשימוש בטמ"ס הינה התאמת ההגדלה לצרכיך. השתמש בשני המקשים דמויי החץ

הממוקמים בלוח הבקרה מימין ובחר את הגודל המתאים
לך.

- מקשי לוח הבקרה הם אלקטרוניים המופעלים ע"י לחיצה קלה. קיימת אפשרות לבצע לחיצה קלה בכל פעם ובכך להגדיל או להקטין הגדלה או הקטנה אחת בכל לחיצה. כן קיימת האפשרות ללחוץ על המקש ממושכות על לקבלת הגודל הנחוץ.
- לאחר שכיוונת את הגודל הרצוי נעבור למקש הכוונון הכולל מספר פונקציות (MODE). המעבר בין מצב למצב מתבצע ע"י לחיצה קלילה על כפתור הכוונון. בחר את המצב הרצוי לך. השימוש בצבע מלא מומלץ לצפייה בתמונות, ובחומר צבעוני. הבחירה בין לבן – שחור לשחור – לבתלויה במצב ראייתך ובסוג החומר המונח על גבי מגש הקריאה.

קריאת מסמך

הנח את חומר הקריאה על המגש בחלקו הפנימי, הבא את מגש הקריאה אליך ומקם את השורה הראשונה של המסמך במרכז המסך. הנח את שתי ידיך בשני צידי המגש והחל לנוע ימינה או שמאלה בהתאם לכיוון הקריאה. כאשר סיימת לקרוא את השורות הראשונות במסמך הזז את המגש מעט לאחור כדי להעלות שורות חדשות על המסך, כך עד לסיום הדף. בשלב הראשון פעולות אלה אינן נוחות אך בהמשך לאחר שתתרגל, הקריאה באמצעות הטמ"ס תהיה מהירה ונוחה יותר. במהלך הקריאה כוון בהתאם לנוחיותך עוצמת אור, אך ניגודיות וגודל.

כתיבה בעזרת הטמ"ס

ניתן לכתוב בעזרת הטמ"ס מכתב, למלא טפסים או לכתוב שיק ועוד. מומלץ להשתמש במגש נעול בזמן הכתיבה כדי לקבל יציבות של משטח העבודה. מקם את הדף במרכז המגש ותרצל את כתיבת שמך כדי ללמוד את הכוונונים הנחוצים לך בזמן הכתיבה. הכוונון שחור על גבי לבן או לבן על גבי שחור עדיפים ממצב צבעוני בזמן הכתיבה.

משימות נוספות

ניתן לקרוא בעזרת הטמ"ס תוויות של בקבוקי תרופות, כתוביות של קופסאות שימורים, לכיוון שעון ואף לטפל בציפורניים. בביצוע משימות תלת מימדיות מומלץ להשתמש במצב צבעוני.

תחזוקה

יש לשמור על ניקיונו של הטמ"ס. מומלץ לנקות בנייר סופג או בבד כותנה רך. אין להשתמש בחומרי ניקוי משום סוג. אין לנקות בשום אופן את המצלמה ואת המראות שמסביבה.