


## מדריך למשתמש

## ClearView

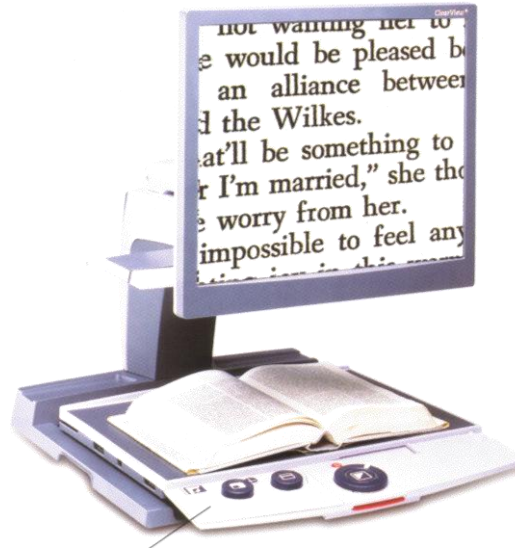

**תוכן ענינים**

- 1 ..... פתח דבר
- 2 ..... מידע חשוב
- 3 ..... התקנה
- 4 ..... הזהרות והבהרות
- 5-11..... הפעלה
- 12..... מסך התצוגה של הטמ"ס

**פתח דבר**

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו.  
הטמ"ס שרכשת מבית OPTelec דגם ClearView הינו אחד הטמ"סים  
עם הטכנולוגיות החדישות בתחום.  
אנו מקווים שהטמ"ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם  
את איכות חיידך.

אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב, המהיר,  
המקצועי והאיכותי ביותר.

במקרה של תקלה ניתן לפנות למערכת השירות בחברתנו  
בטלפון 1-599-555-789 או 02-5003646

ראובן חי כהן  
מנכ"ל החברה

**מידע חשוב**

אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו בהמשך החוברת.  
אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה.  
ניסיון תיקון של טכנאי לא מורשה יגרום לאיבוד האחריות של החברה.  
אין להתקין מכשיר זה ליד טלוויזיה או מכשיר רדיו. כדי למנוע הפרעות קליטה.

יש לחבר מכשיר זה לחשמל בהתאם להוראות כמכשיר עצמאי ולא באמצעות רב שקע עם מכשירים אחרים שלא קשורים לטמ"ס.  
מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו כדי ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת באופן יעיל וכדי להימנע משימוש שלא בהתאם להוראת היצרן.

**התקנה**

פתח את האריזה, הוצא את הטמ"ס ואת שאר החלקים והנח אל משטח יציב. שמור את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז את הטמ"ס מכל סיבה שהיא. לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה.

1. טמ"ס

6. ספק כח

7. מדריך למשתמש בעברית ובאנגלית

לאחר שבדקת שיש בידך את כל החלקים הבה נחבר את הטמ"ס מקס את הטמ"ס על משטח יציב. דאג להשאיר מקום לתזוזה נוחה של המגש ימינה, שמאלה וקדימה.

**הזהרות והבהרות**

- אנא קרא בעיון את הוראות הבטיחות הנ"ל למען שמירה על המכשיר
- יש להשתמש בטמס במקום סגור. אין לחשוף את המכשיר לשינויים קיצוניים בטמפרטורה. אין להניח את המכשיר בקרוב למקור חימום. בחשיפה כזו האלקטרוניקה והאופטיקה עלולה להינזק.
  - שים לב יש חלקים אשר זזים במכשיר כגון המסך או המגש על כן וודא שאין שום חלקים קטנים שיחדרו לאזורים אלו. זאת על מנת לאפשר פעולה תקינה של המכשיר.
  - אין לפתוח את המכשיר ללא טכנאי או נציג החברה.
  - במידה ורוצים לשנות את מיקומו של המכשיר יש לנתק את המכשיר מהחשמל. שים לב החזק את המגש על מנת שלא יזוז משני צידיו.
  - יש לכבות את המכשיר כשהוא לא נמצא בשימוש.
  - יש לכבות את המכשיר ולהוציאו מהחשמל לפני שמנקים אותו.
  - לניקוי המכשיר : למסך מומלץ בחומר מיוחד למסכים או במטלית לכה ושאר המכשיר במטלית לכה בלבד. אין להרטיב את המכשיר בכל צורה שהיא.
  - אין להשתמש בספק כוח אחר למכשיר. במקרה של תקלה צור קשר עם נציג החברה.

**הפעלה****הדלקה וכיבוי**

לחץ על כפתור ההדלקה והכיבוי על מנת להתחיל או לסיים לעבוד עם המכשיר. המכשיר ידלק ויהיה באותו המצב בו הוא נכבה.

מכשיר המגיע ללא מסך יש לכבות את המסך

**הגדלה/הקטנה**

סובב את הגלגל הנמצא במרכז המגש על מנת להגדיל ולהקטין את גודל הטקסט. כשמסובבים את הגלגל בכיוון השעון הוא גדל וכשמסובבים את הגלגל כנגד כיוון השעון הוא קטן.



**כיוון פוקוס**

1. המכשיר הוא בעל פוקוס אוטומטי וכאשר הוא מדלקים אותו הוא יעבוד במצב פוקוס אוטומטי. יחד עם זאת כאשר לוחצים על כפתור העיפרון המכשיר מכבה את הפוקוס האוטומטי המלא. מצב זה שימושי כאשר רוצים לכתוב או לצייר. כאשר המצב פעיל תדלק נורה אדומה. לחזור למצב פוקוס אוטומטי יש ללחוץ לחיצה נוספות על העיפרון.
2. לחיצה על כפתור זה למשך 3 שניות מציינת פרטים לגבי המכשיר- סוג המכשיר, גודל ההגדלה בה המכשיר נמצא.






**כהות/בהירות**

לחיצה על כפתור השמש תוסיף בהירות למסך.  
לחיצה על כפתור הירח תוריד בהירות למסך.

**מצבי תצוגה**

לחיצה על כפתור זה משנה את מצבי התצוגה של המסך.

1. מצב פוטו- צבעוני מלא
2. מצב פוטו- גווני אפור
3. מצב קריאה- רקע לבן ואותיות שחורות.
4. מצב נגיטב- רקע שחור ואותיות לבנות.

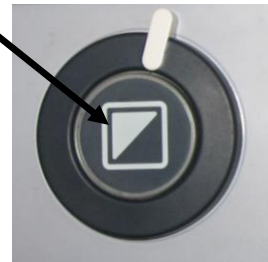


שים לב, במידה ורכשת פנל צבעי רקע שונים עיין בדף  
מספר \_\_ לצפייה בצבעים נוספים

**נעילה של המגש**

ניתן לנעול את המגש כך שלא יזוז על יד לחיצה כלפי מעלה של משטח אדום קטן הנמצא בקצה האמצעי בתחתית המגש. כדי לבטל נעילה זו יש ללחוץ שנית.

**פנל צבעים ותיחום קווים- דגם שולחני משופר**  
פנל זה ניתן להוסיף בכל זמן.

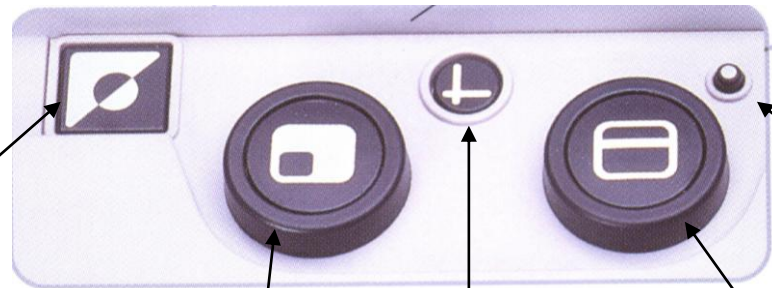

**מצבי תצוגה  
מתקדמים**

**חיבורים חיצוניים**

**קו אנכי/אורכי**

**תיחום קו**

**מצביע**

**מצבי תצוגה מתקדמים-צבעים נוספים**

לחיצה על כפתור זה מוסיף 7 מצבי תצוגה נוספים.  
לחיצה על כפתור זה למשך 2 שניות תחזור למצב רגיל.



כפתור זה יכול להיות פעיל רק כאשר מצב התצוגה של  
הטמ"ס נמצא באחד ממצבי הקריאה בלבד.


**מצביע**

לחיצה על כפתור זה ידליק תאורת LED אדומה מיוחדת,  
במרכז שטח הקריאה. תאורה זה ממקמת את הקורא  
במקום הקריאה שלו.



**חיבורים חיצוניים**

1. אם מחובר לטמ"ס מחשב או כל מקור חיצוני אחר, לחיצה על כפתור זה מעבירה לצפייה לחיבור החיצוני המחובר למכשיר.
2. במידה ולא מחובר למכשיר כל גורם חיצוני אחר וכפתור תיחום הקווים פעיל, סיבוב הכפתור תאפשר תזוזה של הקווים למקום הרצוי. לחיצה על הכפתור תבטל את הקווים.

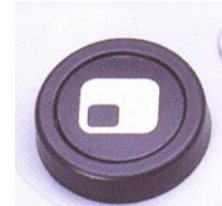
**תיחום קו**

1. כדי להפעיל את תיחום הקווים יש ללחוץ על כפתור זה. כל לחיצה תשנה כמה מצבים. קווים, הצללה של החלקים הלא מסומנים בשטח הקווים, מצב מלא ללא קווים.
2. הגדלה והקטנה של הרווח בין הקווים יש לסובב את הכפתור לפי הגודל הרצוי  
מצב זה פעיל רק כאשר מופעל אחד ממצבי הקריאת



**מסך התצוגה של הטמ"ס**

מסך התצוגה הדק LCD של טמ"ס ה- ClearView ניתן להזזה כלפי מעלה או כלפי מטה.

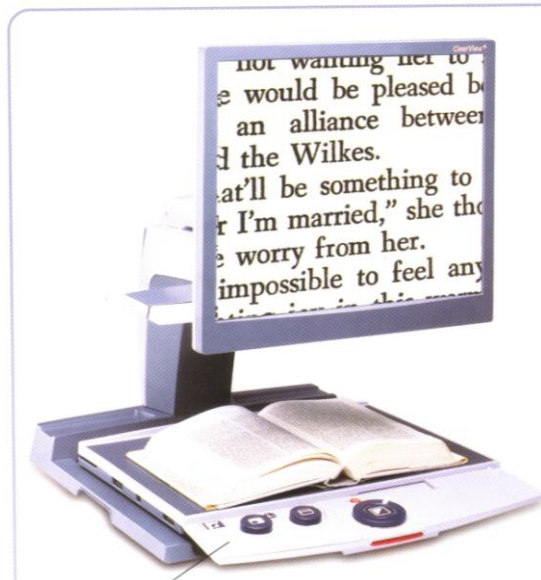

שים לב: אין לקרב למסך חומרי מתכת או מגנט מכל סוג שהוא שכן דבר זה עלול לפגוע במסך.