

TECHNOVISION **חי כהן**

פתרונות מחשוב וראייה מתקדמים

Chai Cohen computers and information systems Ltd


יעוץ מכירה ושרות למערכות מחשבים ורשתות תקשורת

יבוא, שיווק, שרות ותמיכה למערכות הגדלה, טמ"סים, תוכנות וציוד לאנשים מוגבלי ראייה ועיוורים


מדריך Reavel 16i



מבט קדמי

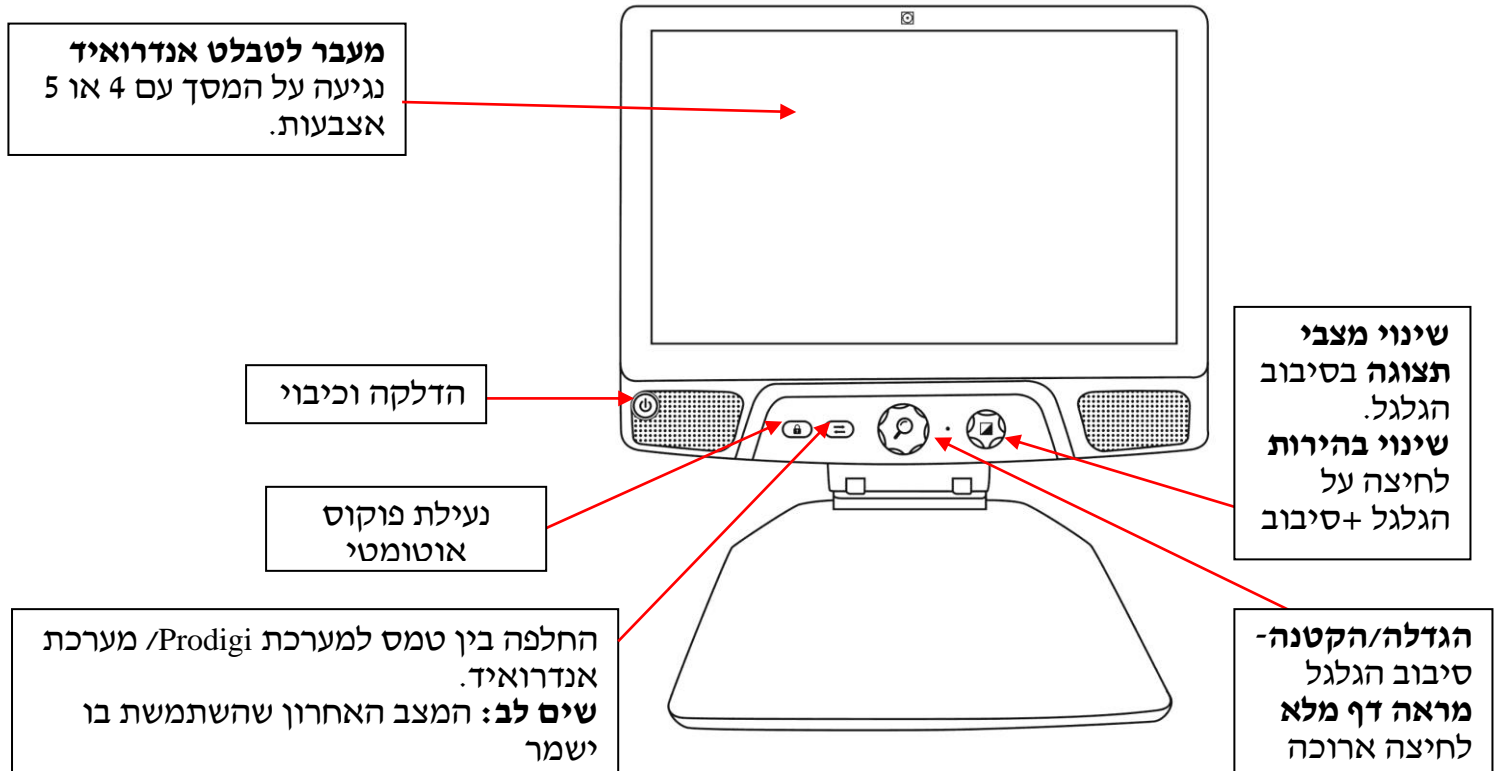

מבט אחורי

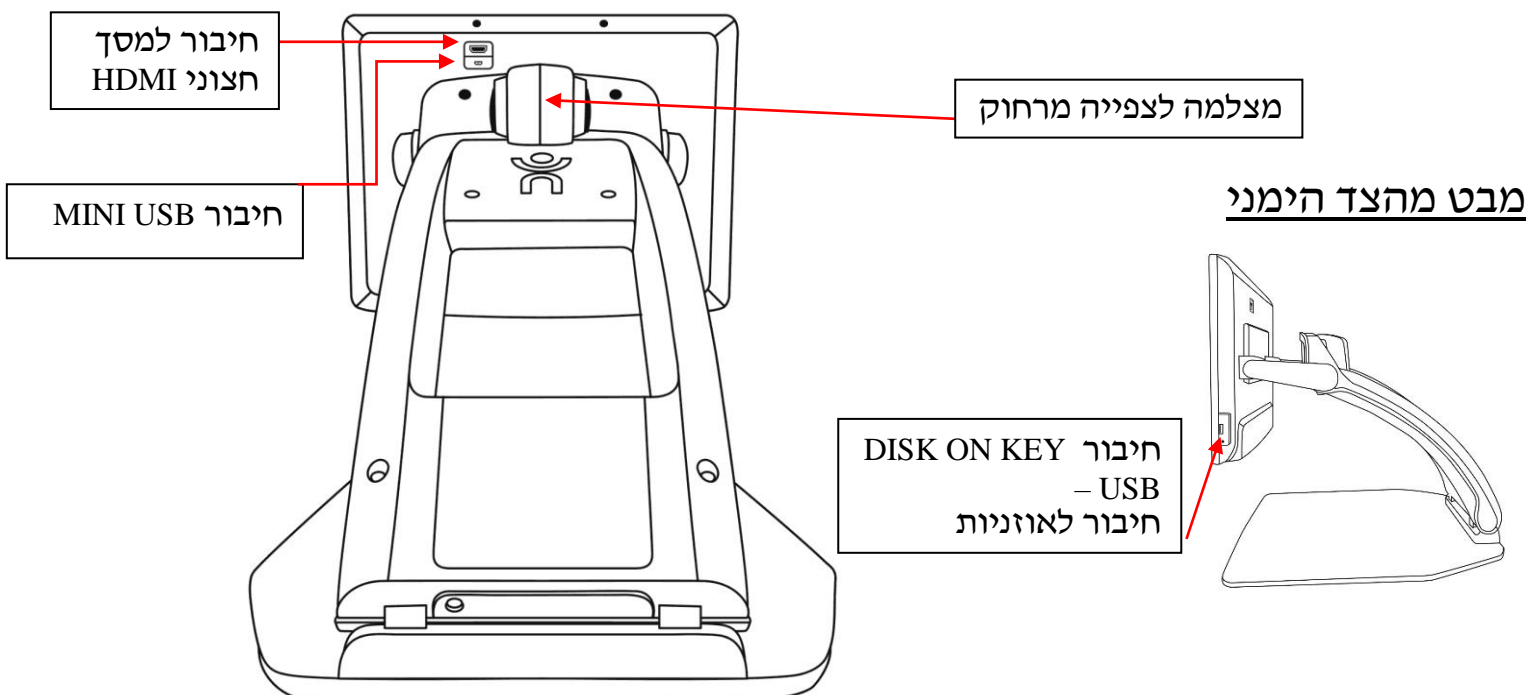

ניווט ב – Prodigy

מערכת ה- Prodigy כוללת 6 יישומי משנה - מחשבון, ספרים, מצלמה, גלריה, הגדרות ועזרה. הם מוצגים על ידי הסמלים הבאים בתפריט הקרוסלה של Prodigy:




לכידת מסמך

כדי ללכוד מסמך ב- Prodigy:



• בחר באייקון מצלמה.

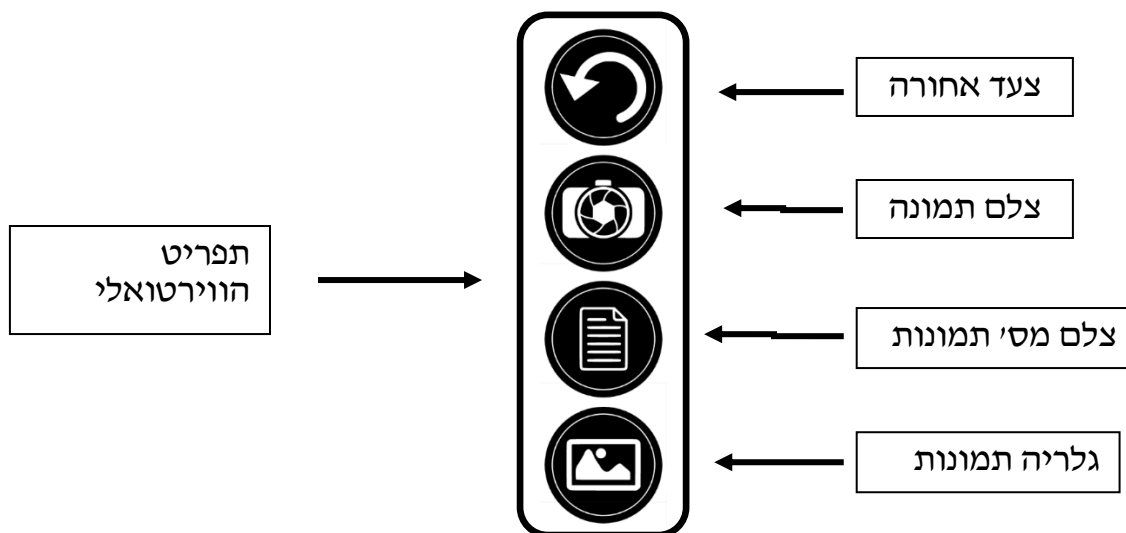

הנח את המסמך במגש הקריאה כמוצג להלן. המסמך שלך אמור להופיע על המסך.



הקש על כפתור הלכידה כדי לצלם תמונה של המסמך.



תוכלו לשמוע צליל תריס של המצלמה ואחריו צליל לחיצה המציין שהמסמך צולם.

לכידה של עמודים מרובים

- עבור למצב לכידת רב עמודים על ידי לחיצה על לחצן הלכידה בלוח הכפתור השמאלי. הנח את העמוד הראשון של המסמך על מגש הקריאה.



הקש על כפתור לכידת תמונה.

תשמע צליל תריס של המצלמה ואחריו צליל לחיצה המציין שהדף צולם.

חזור באותה צורה עבור כל עמוד שברצונך

ללכוד. המסמך הרב-שימושי שלך יישמר

בגלריה לשימוש עתידי.

• לסיום לכידת ריבוי עמודים וכדי לחזור

לצילומים בודדים, הקש שוב על לחצן הלכידת



השמאלית העליונה

לאחר לכידה מסמך יופיע באנר כפתורים אחר

מלמטה למסמך שצולם.



הקראה / שמירת מסמך / הגדרות / חזור אחורה

הקראה של התמונה שצולמה.



ברגע שתבצע צילום של תמונה, תבחין בסמל הפעלה . זהו כפתור הקריאה. כדי להתחיל לקרוא את המסמך באמצעות מנוע הטקסט לדיבור המשולב.

ניתן גם ללחוץ ארוך על מילה ספציפית במסמך כדי להתחיל לקרוא על אותה מילה.



הערה : כשאתה לוחץ על כפתור הקריאה, באנר הכפתורים יעלם כדי לספק תצוגה טובה יותר של התמונה שלך. ניתן לפתוח אותו מחדש על ידי לחיצה על כפתור הפתיחה של הבאנר או על ידי החלקה כלפי מעלה בחלקו התחתון של המסך.



• כדי להשהות, הקש שוב על לחצן הקריאה או הקש נקישה ארוכה על מקום כלשהו על המסך.

מצבי הקראה :


ניתן להציג את הטקסט שנלכד בשלושה מצבי הקראה שונים. ניתן לשנות את מצבי ההקראה בהגדרות לשורה יחידה במצב קו, עמודה במצב עמודה (ברירת מחדל), או שתוכל לקרוא טקסט מבלי לאבד את תצורתם במצב עמוד. שני סימנים "גדולים מ" יזהו את סיומה של פסקה במצבי שורה ועמודה (>).



- להגדרת מצב קריאה אחר, הקש על לחצן ההגדרות והחלק כלפי מעלה עד שתגיע למצב קריאה.

מהירות הקריאה

- באפשרותך להגדיל את מהירות הקריאה באופן זמני על ידי החלקה שמאלה על מסך המגע, ולהאט את קצב הדיבור על ידי החלקה ימינה. יש לעשות זאת בזמן שמנוע הטקסט לדיבור קורא את הטקסט.

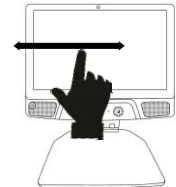

- הערה: באפשרותך גם להגדיל או להוריד את קצב הדיבור לצמיתות מההגדרות. הקש על כפתור ההגדרות, בחר קצב דיבור ובחר ערך.
- הערה: תוכל לשנות את מהירות הקריאה (מהירות גלילת טקסט) על ידי החלקה שמאלה או ימינה, או מההגדרות גם כאשר הדיבור מושבת.

כיווי הדיבור

- ניתן להשתיק את מנוע הטקסט לדיבור בעת קריאת טקסט.
- כדי לעבור בין דיבור למצב כבוי, פשוט הקש פעמיים על המסך בזמן הקריאה. לחלופין, הקש על כפתור ההגדרות, בחר דיבור ובחר מסמכים בלבד או כבוי.



- שמירת מסמך** - ברגע שתבצע צילום, לוח הכפתורים יהיה כעת בתחתית המסך, וכעת יהיה כפתור שמור על דגל הכפתור. כפתור השמירה מאפשר לשמור את התמונה שצולמה בגלריה. הקש על כפתור זה כדי לשמור את המסמך בגלריה לשימוש עתידי.



- הגלריה** מכילה את כל המסמכים שצילמת. המסמכים ישמרו באופן אוטומטי - שם הקובץ ישמר לפי המילה הראשונה בקובץ.



- אייקון זה מסמל מסמך עם ריבוי עמודים.**

ניווט במסמך המצולם שלך

- לאחר שצלמת את המסך תוכלו לנווט דרכו כדי להגיע לאזור המעניין או להגדיל אותו.

- אם אתה נמצא ברמת התצוגה מעל X1, אתה יכול להסתובב במסמך על ידי ביצוע מחוות מגע (הזז לאט את האצבע על המסך מבלי להרים אותו)
החלק כדי להגיע לחלקים אחרים בתמונה המוגדלת.



מצבי תצוגה

החלף בין הניגודים השונים על ידי החלקה אנכית בקצה הימני של מסך המגע בעת צפייה בתמונה או במסמך. לחלופין, הקש על כפתור ההגדרות בזמן צפייה בתמונה או קריאה, בחר ניגודיות והחלק כדי לבחור ניגודיות.

כלי עריכה

אפשרות לעריכה של הטקסט שצולם כולל: כלי כתב יד שימושי להדגשת, רישום או כתיבת טקסט על התמונות והמסמכים שצולמו.

לפתיחת כלי כתב היד:

- פתח תמונה שמורה מהגלריה או שמור תמונה שצולמה ביישום המצלמה.



- הקש על סמל העיפרון . זהו לחצן כלי כתב היד.

לאחר הבחירה בכלי כתב יד תבחין ב-4 כפתורים חדשים בבאנר הכפתורים. מאפשר לך לבחור בין העיפרון, המדגיש או כלי הטקסט. הסמל המוצג ישתנה בהתאם לכלי שנבחר כעת.

סמלי הכלי עיפרון, סימון וטקסט מוצגים למטה



כדי להתחיל בעריכה יש לבחור את הכלי הרצוי לעריכה מבין האפשרויות. בנגיעה על כלי העיפרון מצב העריכה ישתנה בהתאם.



עיפרון לציור חופשי



מרקר הדגשה



כתיבת טקסט

בכל אחת מאפשרויות הכלים שנבחרו יופיע גם האפשרויות הבאות:



כלי המחק - משמש למחיקת העריכות שבוצעו.



בחירת הצבע של כלי העורך שלך.



בחירת הגודל של כלי העורך שלך.

עריכת טקסט

- בחר בכלי המתאים
- מקם את הטקסט החדש שלך על העמוד – גע במילה שכתבת, התיבה תצבע בצבע כתום כעת תוכל להזיז את המיקום של הטקסט ע"י נגיעה בתיבה שנצבעה וגרירת האצבע על המסך למיקום החדש.



- תוכל להגדיל או להקטין את הטקסט בתנועת צביטה.

תפריט הפעולה

הגלריה כוללת "תפריט פעולה" הכולל פונקציות שימושיות רבות למסמכים השמורים שלך. כדי לגשת לתפריט פעולה, גע נגיעה ארוכה על מסמך או סמל קטגוריה בגלריה. תועבר לתפריט המציג פעולות זמינות עבור הקובץ שנבחר.

בתפריט פעולה אתה יכול:

- לשתף תמונה באמצעות אפליקציות אנדרואיד אחרות
- ליצור קטגוריה חדשה
- לשנות שם של מסמך או קטגוריה
- למחוק מסמך, קטגוריה או תוכן קטגוריה
- להעביר מסמך לקטגוריה
- לייצא מסמך לקובץ JPG, טקסט או PDF במערכת הקבצים אנדרואיד
- למחוק, להחליף החלף, להכניס או להוסיף דפים במסמך מרובה עמודים.
- להפעיל את ה- OCR במסמך PDF (שימושי כאשר חלקים ממסמך PDF אינם מוצגים כראוי, בדרך כלל בתוך טבלאות).

שיתוף תמונה


כדי לשתף תמונה באמצעות אפליקציות אנדרואיד אחרות

- לחץ לחיצה ארוכה על התמונה שברצונך לשתף בגלריה.
- הקש על שיתף (share)
- בחר סוג הקובץ למשלוח (Text/JPG/PDF)
- בחר באפליקציה דרכה ברצונך לשתף את התמונה שלך (למשל Gmail, מפות, כונן Google וכו'). לתשומת לבך, מרגע יציאה ליישומים המופיעים בתפריט השיתוף יש לעבוד בנגישות באנדרואיד.


ליצירת קטגוריה חדשה

- הכנס לגלריה



- בחר באייקון גלגל ההגדרות בקצה העליון מצד ימין
- הקש על צור קטגוריה חדשה. (Create new category)
- הקלד את שם הקטגוריה החדשה שלך. מקלדת נפתחת
- הקש על  ENTER
- הקטגוריות ימוינו לפי האלף-בית באופן אוטומטי בגלריה.

לשינוי שם של מסמך או קטגוריה

- לחץ לחיצה ארוכה על המסמך או הקטגוריה שברצונך לשנות עבורו את השם.
- הקש על "שם חדש (Rename)"
- עכשיו הקש את השם החדש – עם פתיחת המקלדת באופן אוטומטי
- לאחר סיום ההקלדה של השם החדש לחץ  ENTER

למחיקת מסמך, קטגוריה או תוכן הקטגוריה

- לחץ לחיצה ארוכה על המסמך או הקטגוריה שברצונך למחוק.
- הקש על "מחק (Delete)" מחק קטגוריה או מחק תוכן קטגוריה.
- לחץ על כן (YES) לאחר את המחיקה. או לא (NO) לביטול.

כדי להעביר מסמך לקטגוריה

- לחץ לחיצה ארוכה על המסמך שברצונך להעביר.
- הקש על העבר (Move)
- הקש על הקטגוריה בה ברצונך להזיז את התמונה שלך.

כדי לייצא מסמך לקובץ JPG, טקסט או PDF במערכת הקבצים אנדרואיד

- לחץ לחיצה ארוכה על המסמך שברצונך לייצא.
- הקש על ייצוא (Export)
- בחר באיזה סוג קובץ ברצונך לייצא את המסמך. ניתן לבחור JPG ו-PDF ואף להגדיר עוד הגדרות מתקדמות על ידי לחיצה ארוכה על האפשרות PDF או JPG (משתמשים מתקדמים בלבד).

- הקובץ ישמר בתיקה Reveal 16i / Export של המכשיר.

כדי לשתף (share), למקם דף במיקום אחר במחברת (renumber), למחוק (delete), להחליף (replace) להכניס דף חדש או תמונה חדשה (insert new page/ new capture) או לייצא (export) למסמך מרובה עמודים.

פתח את מסמך מרובי העמודים שברצונך לשנות.

- כדי לשתף, גע נגיעה ארוכה על הדף שברצונך לשתף, ובחר (share) בחר סוג קובץ, בחר אמצעי אנדרואיד לשיתוף.
- כדי למקם את הדף במיקום אחר במסמך מרובה העמודים, גע נגיעה ארוכה בעמוד אותו אתה רוצה לשנות, בחר (renumber) בחר מס עמוד שאליו יעבור המסמך.
- למחיקת עמוד, לחץ לחיצה ארוכה על הדף שברצונך למחוק והקש על כן כדי לאשר את המחיקה.
- כדי להחליף עמוד, לחץ לחיצה ארוכה על הדף שברצונך להחליף. הקש על החלף (replace), הקש על כן ובחר עמוד חדש.
- כדי להוסיף עמוד, לחץ לחיצה ארוכה על הדף בו ברצונך להוסיף דף חדש. הקש על הכנס (insert new page/ new capture) ובחר דף חדש.
- כדי לייצא עמוד אחד ממסמך מרובה העמודים, לחץ לחיצה ארוכה על הדף במסמך מרובה עמודים והקש על (export) בחר את סוג בקובץ לייצוא, בחר אמצעי אנדרואיד חיצוני לייצוא.

הצגת קבצי טקסט בתוכנה Prodigy

Reveal 16i מאפשר לך להדביק קבצי טקסט לגלריה ואז לפתוח אותם באמצעות הממשק של Prodigy

כדי להדביק קובץ טקסט ב- Reveal 16i:

- העתק ללוח המכשיר את הטקסט שברצונך להוסיף ל- Reveal 16i. ניתן לעשות זאת מחוץ ל- Reveal 16i ביישומי Android המאפשרים לך להעתיק טקסט (למשל, דפדפן האינטרנט שלך, Dropbox או הדוא"ל שלך).
- הקש על Back או מקש הבית - כדי לפתוח את תפריט הקרוסלה Prodigy.
- בחר והקש על סמל הגלריה בתפריט הקרוסלה



Text

- בחר באייקון



- החלק בין המסמכים השונים עד לקבלת הטקסט שלך יופיע ב- Diamond Edge במצב קריאת עמודות (פריסה מקורית ותמונות אינן זמינות).



- הקש על חזרה כדי לחזור לקטע טקסט בגלריה.
- הטקסט שהדבקת יישמר כעת בחלק הטקסט של הגלריה ויקרא על שם המילה הראשונה




שימוש במחשבון

Reveal 16i מאפשר לבצע חישובים באמצעות יישום המחשבון.

כדי להשתמש במחשבון:



- בחר והקש על סמל המחשבון בתפריט הקרוסלה
- הקש על המספרים והסמלים. החישוב שלך יופיע בחלק העליון של המסך. הקש על DEL כדי לתקן אותה במידת הצורך, או שווה כדי לראות את התשובה.

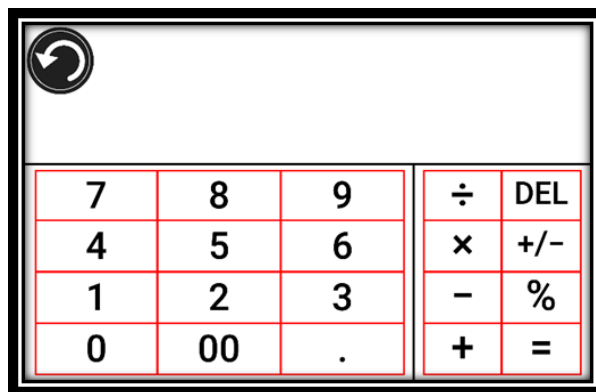

- ברגע שיש לך את התשובה שלך, אתה יכול להקיש על CLR כדי לנקות את החלק העליון.
- כברירת מחדל, המחשבון מוגדר למצב רגיל. כדי להשתמש בפונקציות מתמטיות כמו cos, sin, tan וכו', תצטרך לעבור למצב מדעי. לשם כך, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן 'הקודם' והקש כדי להגדיר את הגדרת מצב המחשבון למדעית. לחץ על חזרה כדי לחזור למחשבון. לאחר מכן תוכל להקיש על שני החצים במרכז התחתון של המסך כדי לגשת לפונקציות מתמטיות מדעיות.



הורדת ספרים

אפליקציית הספרים של Reveal 16i מאפשרת לך להוריד ספרים אלקטרוניים באמצעות Bookshare, הספרייה המקוונת הגדולה ביותר בעולם של ספרים נגישים. כדי ללמוד פונקציה זו – גש למדריך המלא.

מצב פשוט simple mode

המצב הפשוט מאפשר לך לגשת ליישומים העיקריים של Reveal 16i מאותו המסך. כברירת מחדל, Reveal 16i מוגדר למצב רגיל. להפעלת מצב פשוט:

- מתפריט הקרוסלה, החלק ובחר בסמל ההגדרות והקש על User interface הקש על interface, כל לחיצה תשנה את המצב מפשוט simple לרגיל standart והקש פעמיים על הקודם כדי לגשת לתפריט הראשי

מראה מצב פשוט



המצלמה, הספרים, המחשבון, ההגדרות ועזרה נגישים כעת מאותו מסך. תוכלו גם לראות את השעה והתאריך.

שינוי ההגדרות שלך

תפריט ההגדרות של Reveal 16i הוא משתנה בהתאם למה שאתה עושה או היכן אתה נמצא במערכת.



- כדי לגשת להגדרות, הקש על כפתור ההגדרות.
- החלק למעלה כדי לבחור פריט. הפריט שנבחר כרגע מוכרז ומודגש על ידי מסגרת.
- גלול למעלה או למטה כדי להזיז את המסגרת ולבחור פריט. הפריטים ייקראו בזה אחר זה (כברירת מחדל). הקש כדי להחליף את הערך או להחליק ברשימת ערכים. הקש על חזרה (בפינה השמאלית העליונה) כדי לחזור למה שעשית.

הערה: מצב הניווט שלך יהיה שונה אם הגדרת הדיבור שלך מוגדרת כ- "כבוי" או "מסמכים בלבד". לא תהיה עוד מסגרת, ולכל פריט בתפריט יהיה צל מתחתיו. במצב ניווט זה, תוכלו פשוט לגעת בפריט כדי לבחור בו במקום להדגיש אותו עם המסגרת.

להלן רשימה של ההגדרות של Reveal 16i :
(הערכים המסומנים בכוכב (*) הם הגדרות ברירת המחדל).

הגדרות מתפריט הראשי בקרוסלה ה Pordigi

- הגדרות מערכת User interface
- מראה התפריט interface - שינוי מצב פשוט simple או מצב רגיל standard
- שפת מערכת system language - בחירת שפה (ניתן לבחור עד 2 שפות)
- צבעי מערכת colors - בחירת קונטרסים שונים לבחירה
- צבע סמן עקיבה locator color - צבעים שונים לבחירה
- בהירות מסך screen Brightness - שנה את רמת הבהירות של המסך) : 1 עד 100% (60% (*

- באנר מקשי הפעלה Button Banner - אוטמטי Auto, מוסתר Hide, כל הזמן Always.
- קול Audio -
- הגדרות קול Speech – פעיל ON * / לא פעיל OFF / מסמכים בלבד Text only
- קצב דיבור Speech Rate - איטי מאוד Very slow, איטי Slow, רגיל Normal *, מהיר Fast, מהיר מאוד Very fast
- צליל Sounds - פעיל ON, לא פעיל OFF
- עוצמה Volume - 0-15
- מערכת –
- הגדרות חיבור אלחוטי Wi-Fi Setup - פעיל ON, חיפוש רשת Wi-Fi Networks, חיבורים שמורים Saved Networks
- הגדרות בלוטופ Bluetooth setup - מצב כבוי OFF *. כדי להפעיל יש להקש על בלוטופ Bluetooth – החיבור יהיה עכשיו פתוח ON – בשלב זה יש לחפש את שם המכשיר אליו מתחברים. לבחור ולקבל אישור חיבור. לניתוק יש ללחוץ על Bluetooth והוא יעבור למצב OFF או ON בהתאם. בהפעלה ראשונית יש לבחור את שם המכשיר אליו מתחברים. בפעמים הבאות בעת הדלקת ה- Bluetooth החיבור יתבצע אוטמטית.
- עדכון מערכת Software Update – הקשה על עדכון מערכת יעדכן את הגרסה המעודכנת האחרונה. העדכון גם נעשה באופן אוטמטי. וודא חיבור Wi-Fi לרשת פעיל.
- כיבוי אוטמטי Auto Shutoff - 10 min*, 20 min, 30 min, Never
- שחזור לברירת מחדל Restore to factory defaults
- אפליקציות Applications - ספרים Books, מחשבון Calculator
- יציאה לאנדרואיד - Exit to Android
- אודות About - נתוני המערכת השונים כולל גרסה תוכנה קולנים ועוד.

הגדרות מקשי הפעולה במצב קריאה

בעת קריאה בטמס יש ללחוץ על מקש ההיפוך צבעים תפריט הגדרות יפתח. לגלגל ההגדלה תשמש לתזוזה למעלה ולמטה באפשרויות, לחיצה עליו תשמש כ אישור. כדי ללכת אחורה לחץ על מקש שינוי הצבעים.

- קו והשחרה line and blinds
- מצבי תצוגה enabled contrasts צבעים (בחר מבין 20 זוגות צבע): שחור על לבן *, לבן על שחור, שחור על צהוב, צהוב על שחור, שחור על כתום, כתום על שחור, שחור על ציאן, ציאן על שחור, שחור על סגול, סגול על שחור, שחור על ירוק, ירוק על שחור, כחול על צהוב, צהוב על כחול, לבן על כחול, כחול על לבן
- הגדלה מעודפת preferred Zoom
- סוג תצוגת מסך Display : 50Hz *60Hz
- אודות About - נתוני המערכת השונים כולל גרסה תוכנה קולנים ועוד.

תפריט הגדרות לאחר צילום מסמך

לאחר צילום של מסמך 1 או כמה מסמכים הגדרות כדלקמן:

- בהירות Brightness - 0-100% *50%
- מצבי תצוגה גבוהים contrast-צבע משולב תמונה וחדות גבוהה *Diamond Edge, צבע

color, רקע לבן Positive, רקע שחור Negative

- צבעי רקע contrast colore – (בחר מבין 20 זוגות צבע): שחור על לבן *, לבן על שחור, שחור על צהוב, צהוב על שחור, שחור על כתום, כתום על שחור, שחור על ציאן, ציאן על שחור, שחור על סגול, סגול על שחור, שחור על ירוק, ירוק על שחור, כחול על צהוב, צהוב על כחול, לבן על כחול, כחול על לבן
- דיבור Speech – פעיל ON * / לא פעיל OFF / מסמכים בלבד Text only
- קול- סוג הקול לפי הקולנים שנמצאים במערכת.
- קצב דיבור Speech Rate – איטי מאוד Very slow, איטי Slow, רגיל Normal *, מהיר Fast, מהיר מאוד Very fast
- מצב תצוגה בהקראה Reading mode – עמודה Column, עמוד שלם Page, שורה line
- מצב משולב Diamond Edge פעיל כל הזמן always, בעת דרישה בלבד on request
- גודל גופן Font Type – רגיל regular, עבה bold
- הגדלה מעודפת preferred Zoom
- מחוות מגע – ניתן להפעיל או לבטל מחוות מגע

1. החלק בקצה ימין / ניגודיות: החלף בין ניגודי צבע, רקע נבחר, רקע ניגודי ו Diamond Edge (הבחירה האחרונה תישמר בזיכרון של המכשיר).
2. צביטה וזום: התאם את רמת הזום על ידי הקטנה או הגדלה של המרחק בין שתי אצבעות.
3. הקש פעמיים: גש לתפריט הקרוסלה או לעבור בין דיבור במצב כבוי או דלוק ובטל תוך כדי קריאה על ידי הקשה על פעמיים במהירות באצבע אחת.
4. גע / הגדלה: לחץ על האצבע כלפי מטה במהירות על מסך המגע (הקש) כדי להגדיל את גודל הזום המועדף עליך.

גישה לאנדרואיד


Reveal 16i מאפשר לך לגשת ליישומי אנדרואיד. החברה אינה אחראית לנגישות ישומי אנדרואיד אנדרואיד נגישה מההגדרות שבתפריט הקרוסלה. הקש על סמל ההגדרות והחלק למטה כדי לבחור יציאה לאנדרואיד. אתה יכול גם לצאת לאנדרואיד על ידי הנחת והחזקה של 4 או 5 אצבעות על המסך בו זמנית. מחווה זו זמינה בכל מקום ב-Reveal 16i. כדי לחזור לפרודיגי פעם אחת באנדרואיד בחר את ה- Prodigy או מקש הבית.

תפריט עזרה

התפריט השמאלי ביותר בתפריט הקרוסלות הוא תפריט העזרה, שם תוכלו למצוא סרטונים מועילים רבים המראים לכם כיצד להשתמש ב-Reveal 16i. תפריט העזרה מיוצג על ידי סמל סימן השאלה למטה.

מקלדת חיצונית – חיבור בלוטות

באמצעות Reveal 16i, אתה יכול להקליד ולנווט באמצעות מקלדת Bluetooth משלך.

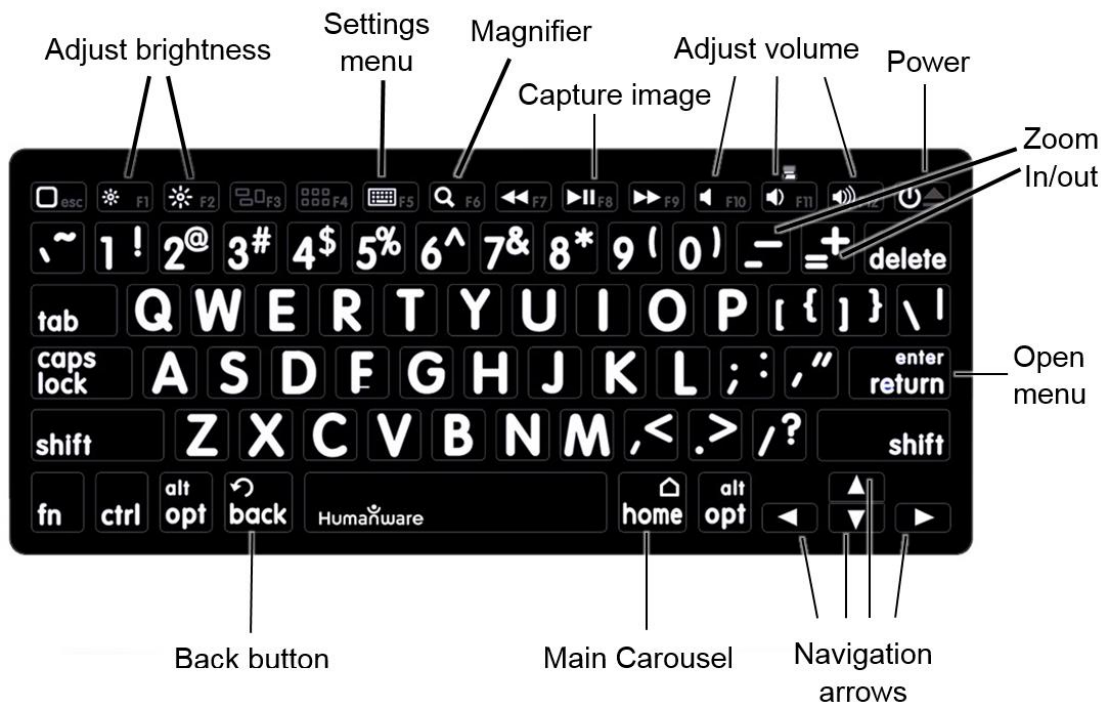

חיבור למסך חיצוני

לתמונה גדולה יותר, ייתכן שתצצה שתכני ה-Reveal שלך יוצגו על גבי מסך חיצוני (כמו טלוויזיה). לשם כך, פשוט חבר את ה-Reveal שלך למסך חיצוני באמצעות כבל וידאו ברזולוציה גבוהה.

פתרון תקלות

הטמס אינה פועל:

לחץ לחיצה ממושכת על הפעלה. אם היחידה עדיין לא נדלקת, ודא שהמכשיר מחובר לשקע. או בטריה טעונה.

התמונה אינה ממוקדת בזכונית מגדלת:

לחץ והחזק את לחצן נעילת המיקוד האוטומטי או העביר את היד קדימה ואחורה מעל המסמך שאתה מציג. זה יגרום למיקוד שלך ב-Reveal למסמך.

המסך שחור:

וודא שהמצלמה במצב ברירת המחדל, מכיוון אל מגש הקריאה.

הטמס נכבה לאחר חוסר פעילות:

זוהי התנהגות רגילה שנועדה לשמור על המסך שלך. כברירת מחדל, Reveal ייכבה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות. ניתן לקבוע את התצורה של טיימר ההפעלה האוטומטי המוגדר כברירת מחדל ל-10

דקות, 20 דקות, 30 דקות או לעולם.

הטמס לא מגיב:


לחץ על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות. המערכת תיסגר. לאחר מכן לחץ על Power לשנייה אחת כדי להפעיל מחדש את ה-Reveal שלך.

בעיות אחרות:


שחזר לברירות המחדל של היצרן בתפריט.
לחץ לחיצה ממושכת על ניגודיות.
גלול מטה אל ברירת מחדל של מפעל ובחר כן.
* אזהרה! כל התצורות הקודמות שלך יאבדו! *

קיפול וסגירת המכשיר


1

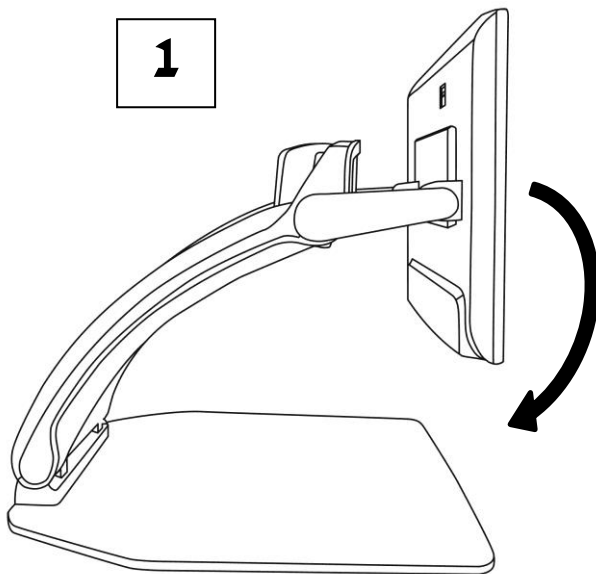

2

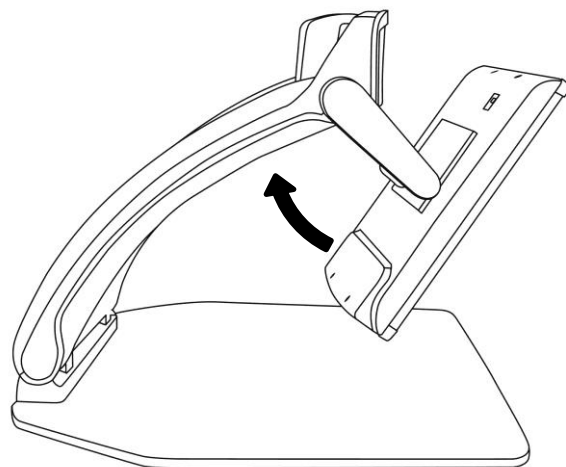

3

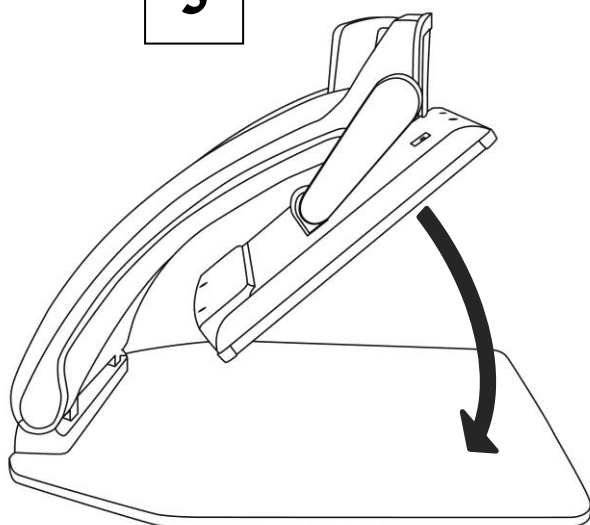

4

