



מדריך משתמש לטמ"ס 5 EXPLORE

מבט קדמי

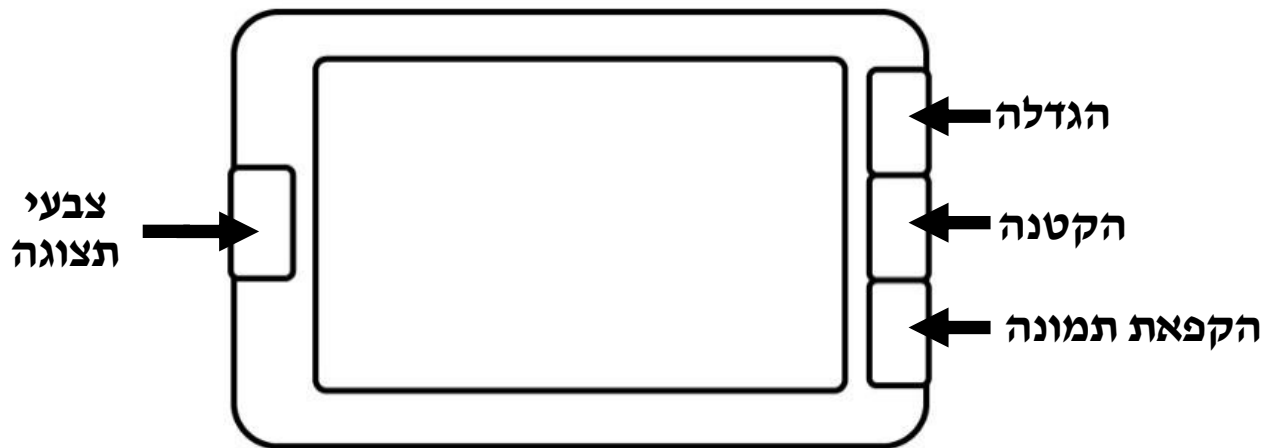


מבט אחורי

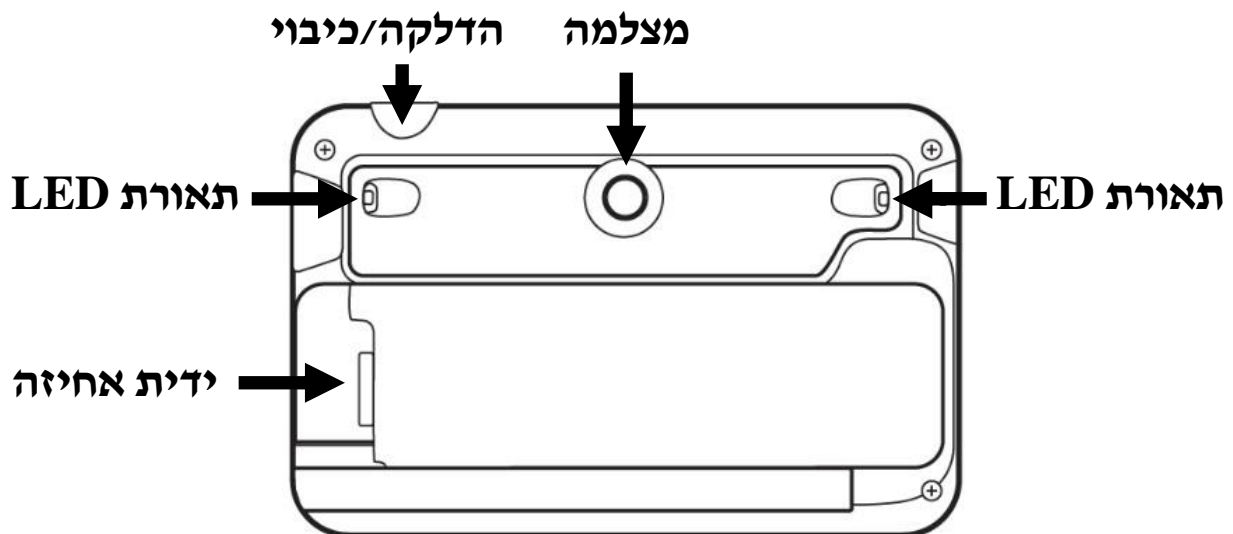


מבט מצד ימין

חיבור HDMI

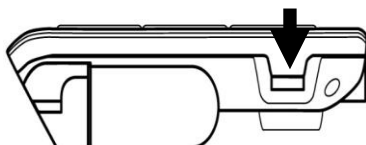

מבט מצד שמאל

חיבור USB

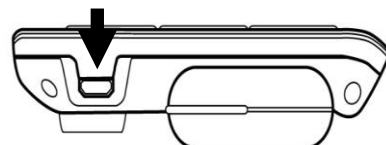

	כדי להגדיל את התצוגה לחץ על כפתור +	הגדלה
	כדי להקטין את התצוגה לחץ על כפתור -	הקטנה
	כדי לצלם תמונה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור המצלמה. לשחרור התמונה לחץ שנית. לשמירת התמונה לחץ לחיצה ארוכה התמונה תשמר בגלריה. הגלריה נמצאת בתפריט. ניתן להוריד את התמונות בגלריה למחשב ע"י חיבור המכשיר ב-USB.	הקפאת תמונה
	- כדי לשנות צבע רקע לחץ על הכפתור מצד שמאל במכשיר במרכז . ניתן להגדיר בתפריט את צבעי התצוגה המעודפים עליך.	צבעי תצוגה
המכשיר נדלק ונכבה אוטומטית עם פתיחת ידית האחיזה. ניתן להדליק את המכשיר גם דרך כפתור ההדלקה הנמצא במסגרת המכשיר מצד ימין		הדלקה/כיבוי
ניתן להוסיף קו מנחה או תחום אזור צפייה מוקטן. לקו מנחה לחץ על כפתור צבעי התצוגה ביחד עם כפתור ההגדלה. לתחום אזור צפייה מוקטן לחץ על כפתור צבעי התצוגה עם כפתור ההקטנה. להורדה יש ללחוץ שנית על אותם כפתורים		קו או תחום אזור
ניתן להגדיר שהפוקוס לא יהיה אוטמטי או אוטמטי. לשינוי מצב זה יש להכנס לתפריט.		פוקוס אוטמטי
ניתן לחבר את הטמס למסך חיצוני ע"י חיבור HDMI הנמצא במסגרת המכשיר מצד ימין.		חיבור למסך חיצוני



אנו מאחלים לך שימוש נעים ונוח עם
המכשיר שבחרת לשאלות ניתן
לפנות אלנו 02-5003646