

מדריך הפעלה וכיוון שעון יד דובר עברית

מותאם ללקוחות עם לקות ראייה

מידע כללי על השעון

- זהו שעון יד דובר עברית
- השעון פועל על סוללה
- בשעון יש כפתור ייעודי להשמעת השעה
- השעון מיועד לשימוש פשוט ונוח ללקוחות עם לקות ראייה

הכפתורים בשעון

- בשעון קיימים הכפתורים הבאים:
- MODE מעבר בין מצבים וכיוון
 - HOUR שינוי שעות
 - MINUTE שינוי דקות
 - TALKING השמעת השעה בקול

השמעת השעה

כדי לשמוע את השעה:

1. לחצו על הכפתור שנמצא בצד ימין למעלה של השעון
 2. השעון יאמר בקול ברור את השעה הנוכחית
- ניתן לשמוע את השעה בכל זמן.

כיוון השעה (שעות ודקות)

כך מכוונים את השעה בשעון:

1. לחצו פעם אחת על הכפתור MODE
2. השעון נכנס למצב כיוון שעה
3. לחצו על הכפתור HOUR כדי לבחור את השעה הרצויה
4. לחצו על הכפתור MINUTE כדי לבחור את הדקות הרצויות
5. לאחר סיום הכיוון, לחצו פעמיים על MODE
6. השעון מכוון ונשמר.

חשוב:

אם לא לוחצים פעמיים על MODE בסיום – כיוון השעה החדשה לא ישמר.

כיוון שעון מעורר

כך מכוונים את השעון המעורר

1. לחצו פעמיים ברצף על הכפתור MODE
2. השעון עובר למצב כיוון זמן להתראה.
3. לחצו על HOUR כדי לבחור את שעת ההתראה
4. לחצו על MINUTE כדי לבחור את דקות ההתראה
5. לחצו פעמיים על MODE כדי לשמור את ההתראה.

טיפים חשובים ללקוחות עם לקות ראייה

- מומלץ להשתמש בכפתור השמעת השעה כדי לבדוק את הכיוון
- כווננו את השעון לאט ובשלבים
- לאחר כל כיוון, בדקו את השעה על ידי לחיצה על כפתור השמעת השעה
- אם יש ספק – חזרו על תהליך הכיוון מההתחלה

לשאלות ולתמיכה טכנית ניתן להתקשר אתנו

02-5003646

מאחלים לכם שתהנו מהמוצר והשימוש בו יהיה יעיל

צוות חיי כהן