



BlindShell

Classic3

4	מדריך למשתמש של BlindShell Classic 3	1
5	הכרת המכשיר	2
5	תכולת החבילה	1.2
5	תיאור המכשיר	2.2
6	הסרת המכסה האחורי	3.2
6	הכנסת כרטיס סים, כרטיס הזיכרון SD והסוללה	4.2
8	טעינת הטלפון	5.2
8	הפעלת הטלפון	6.2
9	תפעול המכשיר	3
9	עוצמה	1.3
9	ניווט	2.3
11	כפתורי פעולה	3.3
12	לוח מקשי המספרים	4.3
12	הזנת מלל	5.3
13	שליטה קולית (Luna Voice Assistant)	6.3
14	קורא מסך	7.3
15	מסך מגע	8.3
16	כפתור החירום (SOS)	9.3
16	לוח מקשים חיצוני	01.3
17	העברת קובץ מהמחשב למכשיר הטלפון BlindShell	11.3
18	פונקציות מכשיר BlindShell	4
18	המסך הראשי	1.4
18	שיחה	2.4
21	הודעות	3.4
23	אנשי קשר	4.4
25	יישומים	5.4
47	הגדרות	6.4
62	עזרה למשתמש	7.4
63	כיבוי הטלפון	8.4
63	הודעות שלא נענו ומידע על מצב הטלפון	9.4
63	תפריט מהיר	01.4
63	יישומים מועדפים	11.4
64	מפרט טכני	5
64	קישוריות	1.5

64	חומרה	2.5
65	חיישנים	3.5
65	תעודות	4.5
66	שימוש קבוע ומידע בטיחותי	6
66	שימוש קבוע ומידע בטיחותי	1.6
70	מידע רגולטורי	7
70	מידע משפטי	1.7
72	מידע משפטי	8
72	מידע משפטי	1.8

1 מדריך למשתמש של BlindShell Classic 3

BlindShell Classic 3 הוא טלפון כפתורים פיזיים לאנשים עיוורים ולקויי ראייה. הטלפון נשלט באמצעות לוח המקשים הפיזי, מסך מגע או באמצעות פקודות קוליות. משוב מסופק על ידי הקול הסינתטי המובנה, הרטט והאותות האקוסטיים הנוספים. הודעה חשובה: אם תתנו לסוללת הטלפון שלכם להתרוקן לחלוטין, ייתכן שנראה שהטלפון אינו מסוגל להיטען כלל. במקרה כזה, השאר את הטלפון מחובר למטען למשך מספר שעות. לאחר מכן, הטלפון אמור להתחיל להיטען שוב. השארת סוללה ריקה בטלפון לתקופה ארוכה יותר עלולה להוביל לפגיעה בסוללה. מקרה כזה אינו מכוסה באחריות הטלפון. אנו ממליצים להסיר את הסוללה מהמכשיר כאשר אינך משתמש בו במשך יותר משבוע.

2 הכרת המכשיר

1.2 תכולת החבילה

- טלפון BlindShell Classic 3.
- סוללה - מלבנית שטוחה.
- אוזניות - בקצה אחד של האוזניות, יש מחבר 5MM.3 (שקע), בקצה השני יש שתי אוזניות.
- מטען קיר USB - מטען USB סטנדרטי, כניסה 100V~240V AC, 50/60Hz, פלט 7V-4.5.3V DC 0-2A.
- כבל USB - כבל USB Type-C, עם USB Type-A זכר סטנדרטי בקצה השני.
- מכשיר טעינה - מעמד לטעינת הטלפון. יש גם רפידה דביקה המאפשרת לצמד את מכשיר הטעינה במקומו.
- שרוך - רצועה שניתן לחבר לטלפון. מגיע עם תפס קטן שעוזר להשחיל את השרוך דרך החור.

2.2 תיאור המכשיר

חלקו הקדמי של הטלפון

להלן תיאור הטלפון בחלקו הקדמי, באותו סדר מלמעלה ועד למטה:

- האפרכסת -- פס בולט מעל מסך הטלפון המשמש כרמקול במהלך שיחת טלפון.
- מסך LCD -- צג בעל מגע חלק עליו מופיע המידע.
- לוח המקשים -- לוח כפתורים אלפאנומרי המשמש לתפעול הטלפון ולהזנת אותיות ומספרים.
- מיקרופון -- ממוקם על לוח המקשים בין הכפתורים ומשמש כקלט קולי.
- רמקול -- פס בולט מתחת ללוח מקשי הטלפון המשמש כפלט קול ושמע.

חלקו האחורי של הטלפון

להלן תיאור החלקים התפקודיים הממוקמים בחלקו האחורי העליון של הטלפון:

- מצלמה -- מוקפת בהדגשה הניתנת למוש. משמשת עבור יישומים המחייבים מצלמה לתפעולם.
- הפלאש -- ממוקם בתוך חריץ עגול בצדה השמאלי של המצלמה. מסייע למצלמה במצבי תאורה חלשים.
- כפתור חירום (SOS) -- כפתור עגול הממוקם מתחת למצלמה. משמש במצבי חירום להתקשרות עם איש קשר שהוגדר מראש.

שולי הטלפון

בשוליים העליונים:

- שקע אוזניות.
- פנס LED וחיישן אור.

בשוליים התחתונים משמאל לימין:

- חור שרוך.
- מחבר USB Type-C - משמש לטעינת הטלפון ולחיבור הטלפון למחשב.
- חריץ פתיחה - משמש להסרת הכיסוי האחורי מהטלפון.

בשול השמאלי, ישנם לחצני עוצמת הקול המשמשים לשליטה בעוצמת הקול של פלט הקול והשמע.

בשול הימני, יש כפתור פעולה צדדי המשמש לפתיחת רשימת היישומים המועדפים והפעלת שליטה קולית.

3.2 הסרת המכסה האחורי

להסרת המכסה האחורי של הטלפון, יש לנעוץ את הציפורן אל תוך חריץ הפתיחה הממוקם בפינה הימנית בדופן התחתונה של הטלפון ולמשוך את המכסה האחורי מהמכשיר. יש לוודא שכל פינות הטלפון מכוסות כאשר מרכיבים את המכסה בחזרה.

4.2 הכנסת כרטיס סים, כרטיס הזיכרון SD והסוללה

להכנסת כרטיס הסיים, כרטיס הזיכרון SD או הסוללה, יש להסיר תחילה את המכסה האחורי של הטלפון, החושף מגירה מלבנית וחלולה המיועדת לסוללה. כמו-כן, המגירה מכילה גם חריצים עבור כרטיסי סים וזיכרון.

הכנסת כרטיס סים

בתוך מגירת הסוללה של הטלפון ישנם שני חריצים המיועדים לכרטיסי מיקרו סים. לצידם מימין, ישנו חריץ עבור כרטיס זיכרון SD. להכנסת כרטיס סים, יש למקם אותו באופן כזה שהמגעים יפנו כלפי מטה, והקצה המשופע יהיה הפינה השמאלית העליונה. לאחר מכן יש להחליק את הכרטיס לתוך החריץ.

הוצאת כרטיס סים

כדי להוציא כרטיס סים מתוך החריץ, יש למקם את קצה האצבע בפינת הכרטיס, ללחוץ אותו כלפי מטה ולהחליק את האצבע עם הכרטיס סים החוצה.

הכנסת כרטיס זיכרון SD

החריץ המיועד לכרטיס הזיכרון SD ממוקם בחלקה העליון של מגירת הסוללה. יש להכניס את הכרטיס כאשר המגעים פונים כלפי מטה ולהחליקו לתוך החריץ. אם מורגשת מעט התנגדות, יש ללחוץ עליו קלות. כאשר הכרטיס יושב בתוך החריץ, יישמע קליק.

הוצאת כרטיס זיכרון SD

כדי להוציא את כרטיס הזיכרון SD, יש ללחוץ עליו עד שיישמע קליק המאשר שהשתחרר. לאחר מכן, יש להחליקו החוצה.

הכנסת הסוללה

יש לאתר את החריץ בפינת הסוללה. יש להחזיק את הסוללה כך שהחריץ פונה לפינה הימנית העליונה של המגירה. יש להחליק את הסוללה מלמעלה למטה אל תוך המגירה שלה; היא אמורה להיכנס בנוחות.

הוצאת הסוללה

כדי להוציא את הסוללה מתוך המגירה, יש להשתמש בבליטה הממוקמת בפינה הימנית של הסוללה ולמשוך את הסוללה כלפי מעלה.

5.2 טעינת הטלפון

ניתן לטעון את הטלפון בעזרת כבל USB או מעמד טעינה. לטעינה במעמד יש לחבר כבל USB Type C לשקע המעמד הממוקם בחלקו האחורי התחתון של מעמד הטעינה. יש להניח את הטלפון בתוך המעמד כאשר חלקו הקדמי פונה אלינו ושקע ה-USB של הטלפון פונה כלפי מטה.

6.2 הפעלת הטלפון

כדי להפעיל את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור החזרה. כפתור החזרה הוא הכפתור האדום בצורת לוכסן הממוקם מימין בשורת הכפתורים השנייה. הטלפון ישמיע מנגינת הפעלה לאחר זמן מה. הטלפון מוכן כשהוא מתחיל לדבר. החיבור לרשת הסלולרית עשויה להימשך עד דקה לאחר הפעלת הטלפון.

3 תפעול המכשיר

1.3 עוצמה

כאשר הטלפון אינו בתוך הנרתיק, כפתור עוצמת הקול הוא לחצן אחד הנמצא בדופן השמאלי העליון. לחיצה בחלקו העליון תגביר את העוצמה ולחיצה בחלקו התחתון תנמיך את העוצמה. כאשר הטלפון נמצא בתוך הנרתיק, שני לחצנים נפרדים ממוקמים על הנרתיק בדופן השמאלי העליון. להגברת העוצמה יש ללחוץ על הלחצן העליון ולהנמכת העוצמה יש ללחוץ על הלחצן התחתון.

2.3 ניווט

כפתורי הניווט ממוקמים במרכז, מעל לוח המקשים ומשמשים לניווט בין תפריטי הטלפון ורשימות הפריטים.

מעבר בתפריט או ברשימת הפריטים

תפריטים או רשימות של פריטים מעוצבים כרשימה מחזורית. כלומר אם מגיעים לפריט האחרון המעבר לפריט הבא קופץ לפריט הראשון ברשימה. ולהיפך, בזמן שהייה על הפריט הראשון עובר לפריט הקודם קופץ לפריט האחרון ברשימה. צליל ביפ מאפשר לך לדעת שאתה נמצא בפריט הראשון או האחרון. החלק התחתון של המסך מציג חיווי של מיקום בתפריט. הניווט בתפריט או ברשימת פריטים כדלקמן:

- כדי לעבור לפריט הבא, לחץ על הלחצן למטה.
- כדי לעבור לפריט הקודם, לחץ על הלחצן למעלה.
- כדי להיכנס לפריט בתפריט או לבחור את הפריט, לחץ על לחצן האישור.
- כדי לעזוב את התפריט או רשימת הפריטים הנוכחיים, לחץ על לחצן 'חזרה'.

טיפ: לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה כדי לדלג לפריט הראשון בתפריט. כדי לדלג לפריט האחרון, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור למטה. ניתן לקפוץ למיקום מסוים בתפריט על ידי לחיצה על המספרים הרלוונטיים בלוח המקשים. מתקבלות מספר ספרות.

חיפוש

ברשימת פריטים ארוכה, ייתכן שהפריט האחרון יהיה "חיפוש". כדי להגיע היישר אליו, יש ללחוץ על כפתור "מעלה" בזמן שהנך נמצא בפריט הראשון ברשימה.

כפתור "מטה"

כפתור "מטה" הינו בצורת קו דק הממוקם במרכז שורת הכפתורים השנייה, מעל לוח המקשים. להלן הפעולות שניתן לבצע בעזרת לחיצה על כפתור זה:

- מעבר לפריט הבא בתוך תפריט.
- מעבר לתו הבא בזמן כתיבת הודעה או הזנת מלל אחר.
- פתיחת התפריט הראשי מתוך המסך הראשי.

כפתור "מעלה"

כפתור "מעלה" הינו בצורת קו דק הממוקם במרכז שורת הכפתורים הראשונה, מתחת למסך הטלפון. להלן הפעולות שניתן לבצע בעזרת לחיצה על כפתור זה:

- מעבר לפריט הקודם בתוך תפריט.
- מעבר לתו הקודם בזמן כתיבת הודעה או הזנת מלל אחר.
- פתיחת התפריט הראשי מתוך המסך הראשי.

כפתור "אישור"

כפתור האישור הינו עיגול בצבע ירוק הממוקם בשורת הכפתורים השנייה, בצדה השמאלי, מעל לוח המקשים. להלן הפעולות שניתן לבצע בעזרת לחיצה על כפתור זה:

- כניסה לתוך תפריט, בחירת פריט, אישור פעולות ומענה לשיחות.
- פתיחת התפריט הראשי מתוך המסך הראשי.

כפתור חזרה

כפתור החזרה הוא הכפתור האדום בצורת לוכסן הממוקם מימין בשורת הכפתורים השנייה. כפתור החזרה עושה את הפעולות הבאות:

- לחצו כדי לחזור אחורה בתפריט, לבטל פעולות, לדחות או לנתק שיחות.
- בזמן כתיבת הודעה או קלט טקסט אחר, לחצו כדי למחוק את התו הקודם. לחצו לחיצה ארוכה כדי למחוק את כל הטקסט.
- בכל מקום אחר, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור החזרה כדי לחזור למסך הראשי.
- אם תלחצו לחיצה ארוכה למשך חמש עשרה שניות, הטלפון יופעל מחדש.

3.3 כפתורי פעולה

כפתורים אלו מבצעים את אותן פעולות ייעודיות מכל תפריט בטלפון.

לחצן פעולה שמאלי

לחצן הפעולה השמאלי הוא הכפתור בצורת נקודה הממוקם בצד שמאל בשורה הראשונה של לחצני לוח המקשים.

לחיצה קצרה על לחצן הפעולה השמאלי

לחצו כדי לפתוח תפריט שבו תוכל למצוא מידע על מצב הטלפון, כגון שעה ותאריך, רמת הסוללה, מידע על רשתות או הודעות שהוחמצו.

לחיצה ארוכה על לחצן הפעולה השמאלי

לחצו לחיצה ארוכה כדי לפתוח תפריט מהיר שבו תוכל לגשת בקלות להגדרות ופונקציות שונות.

העתק/הדבק טקסט

כאשר ניתן להעתיק טקסט מהמסך, התפריט המהיר מכיל פריט העתק טקסט. כדי להעתיק טקסט, בחר באפשרות זו ולאחר מכן תוכל לערוך את הטקסט שהועתק. אשר כדי להעתיק את הטקסט. כדי להדביק את הטקסט, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעולה השמאלי בזמן הכתיבה ובחר באפשרות הדבקת טקסט.

לחצן פעולה ימני

לחצן הפעולה הימני הוא הכפתור בצורת נקודה המוצב בצד ימין בשורה הראשונה של כפתורי לוח המקשים. לחץ כדי לחזור על האמירה האחרונה או כדי לעצור את הקול הקריאה. לחץ לחיצה ארוכה כדי לאיית את האמירה האחרונה.

כפתור פעולה בדופן הטלפון

במרכז הדופן הימני של הטלפון ממוקם כפתור פעולה ארוך, אשר מבצע את הפעולות הבאות:

- לחיצה תפתח את רשימת היישומים המועדפים.
- לחיצה ארוכה תפעיל את הסיוע הקולי.
- בזמן כתיבת הודעה או הזנת מלל אחר, לחיצה ארוכה תפעיל את ההכתבה הקולית.

4.3 לוח מקשי המספרים

לוח מקשי המספרים מורכב מארבעה שורות של כפתורים קמורים. השורה הראשונה מכילה את כפתורי הספרות אחת, שתיים ושלוש. השורה השנייה מכילה את כפתורי הספרות ארבע, חמש ושש. השורה השלישית מכילה את כפתורי הספרות שבע, שמונה ותשע. השורה הרביעית והאחרונה, מכילה את כפתור הכוכבית, כפתור הספרה אפס וכפתור הסולמית המשמש גם כסימן ספרה.

כפתור הכוכבית

כפתור הכוכבית ממוקם בצדה השמאלי של השורה התחתונה בלוח מקשי המספרים. לחיצה ארוכה על כפתור הכוכבית תנעל את הטלפון. לחיצה ארוכה נוספת, תבטל את הנעילה. ניתן לבטל אפשרות זו בתפריט ההגדרות.

כפתור הסולמית

כפתור הסולמית ממוקם בצדה הימני של השורה התחתונה בלוח מקשי המספרים. לחיצה ארוכה תפתח תפריט "פרופיל צלילים" (שקט, צלצול ורטט, מצב טיסה).

5.3 הזנת מלל

הזנת מלל באמצעות לוח מקשי המספרים

בזמן כתיבת הודעה או הזנת מלל אחר, לוח מקשי המספרים משמש להזנת מלל, ספרות וסימנים מיוחדים. כל כפתור, מלבד כפתור הסולמית, מכיל קבוצת תווים. לחיצה על הכפתור המתאים מספר פעמים ברצף תעבור מעגלית בין התווים באותה קבוצה. לדוגמא, כפתור הספרה שתיים מכיל את האותיות הלוועזיות A, B, C ובעברית ד, ה, ו, ואת הספרה שתיים. לכתיבת האות B (ה בעברית), יש ללחוץ פעמיים. לכתיבת הספרה שתיים, יש ללחוץ ארבע פעמים או לחיצה ארוכה.

- כפתור הספרה אחת מכיל סימני פיסוק וסימנים מיוחדים.
 - כפתור הכוכבית מכיל את יתר הסימנים המיוחדים.
 - כפתור הספרה אפס מכיל את הספרה אפס ורווח.
 - כפתור הסולמית משנה את מצב האותיות מקטנות לגדולות ולהפך וכן מחליף בין מקלדת המספרים לאלפאנומרית.
 - לחיצה ארוכה על כפתור הסולמית מציגה את פריסות המקשים (שפות קלט) האפשריות, שאחת מהן היא סמלי הבעה (אימוג'י). למעבר בין הפריסות, יש להשתמש בכפתורים "מעלה" ו"מטה" וללחוץ על כפתור האישור לבחירת הפריסה הרצויה.
 - למעבר בתוך המלל, יש ללחוץ על הכפתורים "מטה" או "מעלה". כדי לבחור באפשרות של מעבר בין תווים או מעבר בין מילים, יש ללחוץ על כפתור הפעולה השמאלי.
- טיפ: בסיום כתיבת תו מסוים נשמע צליל של קליק לאחר השהייה קצרה ולאחריו ניתן להמשיך בהקלדת התו הבא. כדי לכתוב באופן רציף ומהר יותר, ניתן ללחוץ על כפתור "מטה" מיד לאחר הקלדת התו, שיאפשר הקלדת תו נוסף מיד לאחריו ללא המתנה לצליל הקליק.

הזנת מלל על-ידי הכתבה קולית

בזמן כתיבת הודעה או הזנת מלל אחר, ניתן להפעיל את ההכתבה הקולית על-ידי לחיצה על כפתור הפעולה שממוקם בדופן הימני של הטלפון. ניתן להתחיל את הכתבת המלל לאחר הישמע הצפוף. אחרי כל קטע מוכתב המכשיר ירטוט קלות. ברגע זה ניתן יהיה לסיים את ההכתבה על-ידי לחיצה על כפתור האישור, כפתור "אחורה", או כפתור הפעולה שבדופן הטלפון. אם במשך מספר שניות לא מוכתב מלל, ההכתבה הקולית תסתיים אוטומטית.

עדכון השעה

לעדכון השעה ביישומים כגון שעון מעורר, לוח שנה או בהגדרות הטלפון, יש להזין את ארבע הספרות המייצגות את השעה הרצויה בעזרת לוח מקשי המספרים. צמד הספרות הראשון מייצג את השעות וצמד הספרות השני מייצג את הדקות.

6.3 שליטה קולית (Luna Voice Assistant)

ניתן לשלוט בטלפון לחילופין על ידי פקודות קוליות באמצעות Luna Voice Assistant. תולו לבקש מלונה לפתוח אפליקציות המותקנות בטלפון, לחייג לאיש קשר או לשלוח הודעת טקסט. אם תכונות AI מופעלות, לונה מספקת תכונות מורחבות באינטראקציה עם הטלפון והיישומים, יכולה לענות על שאלות טריוויה או לחפש אותך בדפדפן האינטרנט. תישאל אם תרצו להשתמש

בתכונות בינה מלאכותית בהפעלה הראשונה של לונה (עליך לספק הסכמה) או שתוכל להפעיל אותה מאוחר יותר בהגדרות הטלפון.

- כדי להפעיל את לונה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הפעולה בצד. לאחר צליל ביפ, התחל להכתיב את הפקודה או השאלה.
- כאשר תנהלו שיחה עם לונה תוכלו לנווט בתשובות שהתקבלו ובפקודות שלך באמצעות מקשי ניווט.
- כדי לחזור על כל התשובה של לונה או לקבל פרטי שיחה אחרים, לחצו על כפתור האישור.
- כדי לשאול שאלה נוספת, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור הפעולה הצדדית שוב.

ללונה ללא תכונות AI יש את הפונקציונליות הבאה:

- פתיחת כל אפליקציה על ידי אמירת השם שלה. לדוגמה, כדי לפתוח את הודעות האפליקציה, הפעילו את לונה ואמרו "הודעות".
- חיוג לאיש קשר מרשימת אנשי הקשר. לדוגמה, כדי להתקשר לנטלי, הפעל את לונה ואמרו "התקשר לנטלי".
- כתוב הודעה לאיש קשר מרשימת אנשי הקשר. לדוגמה, כדי לכתוב הודעה לרוני, הפעל את לונה ואמרו "שלחי הודעה לרוני". לאחר מכן, ניתן להזין את הטקסט באמצעות לוח המקשים הנומרי או הכתבה קולית.

ללונה עם תכונות AI יש את הפונקציונליות הנוספת הבאה:

- אינטראקציה משופרת עם אפליקציות מותקנות. לדוגמה, כדי ליצור פתק חדש, הפעל את לונה ואמרו "אני רוצה ליצור פתק חדש". לונה תדריך אתכם ביצירת פתק חדש. או בקשו לחפש מונח בדפדפן האינטרנט.
- ענו על שאלות טריוויה. לדוגמה, תוכלו לשאול "מהו ההר הגבוה באירופה?"
- ועוד הרבה. גלה כמה עוזרת לונה יכולה להיות שימושית!

הערה: לונה דורשת חיבור לאינטרנט אם זיהוי דיבור לא מקוון אינו מופעל. זיהוי דיבור לא מקוון חייב להיות נתמך על ידי השפה. פרטים נוספים ניתן למצוא בפרק הגדרות. נדרש חיבור לאינטרנט כדי להשתמש בתכונות AI.

7.3 קורא מסך

קורא מסך הוא פונקציה המאפשרת לנווט ביישומי צד-שלישי בטלפון BlindShell, דרך המקלדת או מסך המגע. קורא המסך מתמקד בפריטיבי האפליקציה וקורא אותם בקול. פריטים אלה יכולים להיות שדות טקסט, תוויות, לחצנים וכו'. כדי לנווט בפריטים אלה, השתמשו בלחצני ניווט או תכונת חקור באמצעות מגע.

- כפתור 1 - ניווט ברירת מחדל
- כפתור 2 - ניווט לפי כותרות
- כפתור 3 - ניווט לפי רכיבי שליטה
- כפתור 4 - ניווט לפי קישורים
- כפתור 5 - ניווט לפי מילים - חקור מילה אחת בכל פעם
- כפתור 6 - ניווט לפי נקודות ציון ומכולות
- כפתור 7 - גלילה ידנית למעלה
- כפתור 8 - החלף קריאה אוטומטית
- כפתור 9 - גלילה ידנית למטה
- כפתור 0 - אמור את הכותרת של החלון או היישום
- כפתור # - פותח את העזרה

8.3 מסך מגע

מסך מגע מופעל באפליקציות של צד-שלישי בהן קורא המסך פועל ובאפליקציות BlindShell אחרות התומכות בתכונה זו. השליטה מוסברת במדריך לאפליקציה אם היא תומכת בשליטה במסך מגע. עבור אפליקציות צד שלישי, שליטה במסך מגע מופעלת כברירת מחדל כפקד נוסף מלבד לוח מקשים פיזי. זה עוזר לשלוט באפליקציות האלה בצורה נוחה על ידי מחוות ולחקור באמצעות פונקציית מגע.

מחוות

- כדי לגלול, השתמש בשתי אצבעות כדי להחליק על פני המסך. אם תגיע להתחלה או לסוף של עמוד, יישמע צליל בגובה רב, בדומה לשימוש בלחצנים. בעת גלילה לכיוון המסך, צלילים קצרים יצינו תנועה. ככל שגוללים נמוך יותר, הטונים הופכים עמוקים יותר. ככל שגוללים גבוה יותר, כך הצלילים יהיו גבוהים יותר. אם לאפליקציה יש גלילה אופקית, החלק הצידה בשתי אצבעות כדי לנווט.
- כדי לאשר את הבחירה של פריט, הקש פעמיים על המסך.

חקור באמצעות מגע

תכונת 'חקר באמצעות מגע' מאפשרת לך להבין את פריסת האפליקציה ולנווט במהירות לפקדים בתוך האפליקציה. כדי לחקור את המסך ולעבור בין פריטים, הנח אצבע אחת על

המסך והזיז את האצבע. פלט קולי מכריז על הפריט שנבחר על ידי קורא המסך. כדי לבחור פריט, הקש פעמיים על המסך.

9.3 כפתור החירום (SOS)

לחיצה ארוכה על כפתור החירום (SOS) תיזום שיחה לאיש קשר שהוגדר מראש לעת חירום. אם לא הוגדר איש קשר עבור כפתור החירום, ניתן יהיה לעשות זאת על-ידי לחיצה ארוכה על כפתור החירום, שיפתח תפריט להגדרתו.

10.3 לוח מקשים חיצוני

ניתן לשלוט על הטלפון לחילופין על ידי מקלדת חיצונית המחוברת דרך מחבר ה-USB-C של הטלפון. את פריסת המקלדת החיצונית ניתן לשנות בהגדרות המקלדת.

ניווט חיצוני במקלדת

- למקשי החצים למעלה ולמטה יש את אותה פונקציה כמו לחצני למעלה ולמטה של הטלפון.
- למקש להכנס יש את אותה פונקציה כמו לחצן האישור.
- למקשי בריחה ו- מרווח אחורי יש את אותה פונקציה כמו לחצן גב.
- למקשי Cmd או לנצח יש את אותה פונקציה כמו לחצן הפעולה בצד.
- למקש התפריט יש את אותה פונקציה כמו לחצן הפעולה השמאלי.
- הקש על מקש לשלול כדי לקרוא את הטקסט הנוכחי.
- הקש על מקש חלופה כדי לאיית את הטקסט הנוכחי.
- לחץ על מקשי הגברת עוצמת הקול והנמכת עוצמת הקול כדי להגביר או להפחית את עוצמת הקול של הטלפון.

כתיבה חיצונית של מקלדת

- הקש על מקש להכנס כדי להזין שורה חדשה.
- הקש על מקשי לשלול ו- להכנס בו-זמנית כדי לאשר את הטקסט.
- למקש F1 יש את אותה פונקציה כמו לחצן הכוכבית.
- למקש F2 יש את אותה פונקציה כמו לחצן חשיש.
- כאשר נעילת מספרים מופעלת, ניתן להשתמש בלוח המקשים המספרי להזנת מספרים.

11.3 העברת קובץ מהמחשב למכשיר הטלפון BlindShell

מערכת חלונות (Windows)

יש להתייחס למכשיר הטלפון כהתקן חיצוני. ניתן להעתיק קבצים באמצעות כל יישום מנהל קבצים אחר מהמחשב אל הטלפון. אם המחשב לא מזהה את ההתקן, יש להתקין את העדכונים האחרונים ולוודא שקיים מנהל התקן (דרייבר) MTP.

מערכת הפעלה אפל

כדי להעתיק קבצים מהתקן מק (Mac) אל מכשיר הטלפון, יש צורך בהתקנת תוכנה להעברת קבצי אנדרואיד. ניתן להוריד תוכנה זו דרך הלינק הבא: <https://www.android.com/filetransfer>.

מערכת הפעלה לינוקס (Linux)

במערכת זו המחשב אמור לזהות באופן אוטומטי את מכשיר הטלפון. יש להעתיק קבצים אל הטלפון באמצעות יישום מנהל קבצים.

4 פונקציות מכשיר BlindShell

1.4 המסך הראשי

המסך הראשי הינו נקודת המוצא לשימוש במכשיר הטלפון. במסך הראשי ניתן לראות את השעה הנוכחית, מידע מתומצת המרכז הודעות שלא נקראו, שיחות שלא נענו, וכולי, במידה והיו כאלו. ניתן לבצע את הפעולות הבאות מתוך המסך הראשי:

- לפתיחת התפריט הראשי, יש ללחוץ על כפתור האישור או על הכפתורים "מטה" או "מעלה".
 - לביצוע חיוג, יש להקיש בלוח המקשים את מספר הטלפון ולאחר-מכן יש ללחוץ על כפתור האישור.
 - להפעלת חיוג מהיר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המספר שהוגדר מראש עבור מטרה זו. אם לא הוגדר, הלחיצה הארוכה תפתח תפריט להגדרתו.
 - לפתיחת "היסטוריית שיחות", יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור האישור.
- לחזרה למסך הראשי מכל מקום בטלפון, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור "אחורה".

2.4 שיחה

פריט התפריט 'שיחה' מאפשר לבצע שיחות טלפון למספרים או לאנשי קשר ברשימת אנשי הקשר. הוא מכיל גם היסטוריית שיחות והגדרות שיחות.

מענה לשיחה נכנסת

- כדי לענות לשיחה נכנסת, יש ללחוץ על כפתור האישור.
- כדי לדחות או לסיים שיחה, יש ללחוץ על כפתור "אחורה".

הכרזת שם המתקשר

להכרזה על שם המתקשר יש ללחוץ על כפתור הפעולה הימני. ניתן להפעיל את ההכרזה האוטומטית בתוך הגדרות "פלט קולי".

חיוג לאיש קשר

בתוך תפריט "אנשי קשר" ניתן למצא את רשימת אנשי הקשר. כדי לחייג לנמען הנבחר מתוך הרשימה, יש ללחוץ על כפתור האישור. לאיתור מהיר של איש קשר מסוים, יש להקיש את האות הראשונה של שמו כדי להציג את רשימת השמות המתחילים באותה אות.

חיוג מספר

תפריט "חיוג" מכיל את הפריט "חיוג מספר" בו ניתן להקיש מספרים. יש להקיש את מספר הטלפון וללחוץ על כפתור האישור כדי לחייג לנמען.

היסטוריית השיחות

התפריט "היסטוריית השיחות" מכיל את כל השיחות הנכנסות והיוצאות ואת פרטיהן. בחירת פריט על-ידי לחיצה על כפתור האישור תפתח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- חיוג לאיש הקשר או למספר הטלפון.
- כתיבת הודעה.
- מידע על משך השיחה.
- שמירה כאיש קשר חדש (אם לא נשמר עדיין).
- הוספה אל איש קשר קיים (אם לא נשמר עדיין).
- חסימת מספר.
- מחיקה מההסטוריה.
- מחיקת כל ההסטוריה -- תמחק את כל השיחות מההסטוריית השיחות.

הגדרות שיחה

סטטיסטיקת שיחות

פריט התפריט סטטיסטיקת שיחות פותח רשימה של סטטיסטיקות שיחות של החודש האחרון. הפריט האחרון מאפשר להגדיר יום תחילת מחזור חודשי. הוא קובע את יום ההתחלה של החודש שממנו נרשמים הסטטיסטיקה.

מספרים חסומים

פריט התפריט מספרים חסומים פותח רשימה של אנשי קשר ומספרי טלפון שמנועים מלבצע שיחות טלפון למכשיר שלך. כדי להוסיף מספר חסום או איש קשר חדש, בחר בפריט הוסף

מספר חסום. כדי לבטל את חסימת המספר או איש הקשר, לחץ על לחצן האישור במספר או איש הקשר שנבחרו.

תשובות מהירות

ניתן לשלוח תשובות מהירות בעת דחיית שיחה. כדי להשתמש בפונקציה זו, עליכם להפעיל אפשרות זו בהגדרות השיחה. לאחר שתדחה שיחה, תינתן לכם אפשרות לשלוח תשובה מהירה. תוכלו לבחור תשובה מהירה שיצרתם או תשובות שהוגדרו מראש. בחרו תשובה מהירה ב-SMS בעת דחיית שיחה - תוכלו להפעיל או לבטל אפשרות זו כאן. תשובות מהירות - ניתן ליצור תשובה מהירה חדשה או לבחור מתוך תשובות מהירות מוגדרות מראש על ידי בחירה באפשרות איפוס לברירת המחדל. ניתן לערוך או למחוק את התשובות המהירות הללו על ידי לחיצה על כפתור האישור.

הקלטת שיחה

כדי להקליט שיחת טלפון, יש ללחוץ על כפתור האישור במהלך שיחת טלפון פעילה ולבחור ב"תחילת הקלטת שיחה". כדי להפסיק את ההקלטה, יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור "הפסקת הקלטת שיחה". שיחת הטלפון המוקלטת נשמרת בתוך תיקיית BlindShell/recordings ואפשר למצא אותה בתוך "רשימת הקלטות" של יישום ה"רשמקול".

הפעלת הרמקול במהלך שיחת טלפון

כדי להפעיל את הרמקול, יש ללחוץ על כפתור האישור במהלך שיחת טלפון פעילה ולבחור "הפעלת רמקול" מתוך התפריט. כדי לכבות את הרמקול, יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור "כיבוי רמקול". ניתן להפעיל רמקול אוטומטי בתוך הגדרות "צלילים" של המכשיר.

השתקת המיקרופון במהלך שיחת טלפון

כדי להשתיק את המיקרופון, יש ללחוץ על כפתור האישור במהלך שיחת טלפון פעילה ולבחור "השתקת מיקרופון" מתוך התפריט. לביטול ההשתקה יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור ב"ביטול השתקת המיקרופון".

קרא הודעות אחרונות

כדי לקרוא את ההודעה האחרונה במהלך שיחת טלפון, לחץ על לחצן האישור במהלך שיחת טלפון פעילה. בחר בפריט התפריט הודעות.

מענה לשיחה נכנסת נוספת

כאשר שיחה נכנסת במהלך שיחה פעילה נשמעים צפצופים. יש ללחוץ על כפתור הפעולה הימני כדי להכריז על שם המתקשר של השיחה הנכנסת הנוספת. יש ללחוץ על כפתור האישור כדי לענות לשיחה זו ולהעביר להמתנה את השיחה המתנהלת כעת. כדי לסיים את השיחה הפעילה, יש ללחוץ על כפתור "אחורה".

שיחת ועידה

שיחת ועידה מאפשרת ליצור שיחה קבוצתית. בזמן שיחה פעילה, לחץ על לחצן האישור כדי להיכנס לתפריט השיחה. כדי להוסיף עוד שיחה לוועידה, נווטו אל האפשרות בצע שיחה נוספת. בזמן התקשרות למספר אחר, השיחה הקודמת תועבר להמתנה. כדי להוסיף את המספר החדש לשיחת הוועידה, בחרו בתפריט הוסף שיחה לשיחת הוועידה. פעולה זו תוסיף את השיחה לוועידה.

3.4 הודעות

פריט התפריט הודעות מאפשר כתיבת הודעות למספרים או לאנשי קשר ברשימת אנשי הקשר. הוא מכיל גם שיחות קודמות (הודעות נכנסות ויוצאות), תבניות SMS, טיוטות והגדרות הודעות. BlindShell תומך בקבלת הודעות MMS המכילות טקסט בלבד (למשל, הודעות קבוצתיות MMS).

הערה: בזמן כתיבת הודעה, לחצו על לחצן הפעולה הימני כדי להקריא בחזרה את כל ההודעה ואת מספר התווים הנותרים להודעה הבאה.

כתוב SMS לאיש קשר

כדי לכתוב SMS לאיש קשר, פתחו את האפשרות 'כתוב SMS' ולאחר מכן בחרו 'בחר איש קשר'. פריט התפריט בחר איש קשר פותח את רשימת אנשי הקשר. עברו ברשימה ולחצו על לחצן האישור כדי לבחור את איש הקשר. כתבו את הטקסט של ההודעה ושלחו אותו על ידי לחיצה על כפתור האישור.

כתוב SMS למספר

כדי לכתוב SMS למספר, פתחו את האפשרות 'כתוב SMS' ולאחר מכן בחרו הזן מספר. פריט התפריט הזן מספר פותח טופס עם הפריטים הבאים:

- מספר - הזינו את מספר הטלפון של הנמען.
- טקסט - הזינו את טקסט ההודעה.
- שלח הודעה - בחר כדי לשלוח את ההודעה.

כתיבת הודעה (SMS) למספר נמענים

בחירה באפשרות "כתיבת הודעה למספר נמענים" תפתח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- נמענים -- ניתן להוסיף מספר נמענים להודעה על-ידי בחירה ב"הוספת נמען". למחיקת הנמען מהרשימה, יש לבחור בו וללחוץ על כפתור האישור.
- מלל -- יש להזין את מלל ההודעה.
- שליחת הודעה -- יש לבחור באפשרות זו כדי לשלוח את ההודעה.

שיחות

תפריט "שיחות" מכיל את כל ההודעות הנכנסות והיוצאות המקובצות תחת אותו איש קשר או מספר טלפון. בחרו את ההודעה הרצויה ולחצו על כפתור האישור כדי לפתוח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- מענה -- פותח אפשרות להזנת מלל. יש להזין את ההודעה וללחוץ על כפתור האישור כדי לשלוח אותה כמענה לשולח.
- העברה -- מאפשר העברת הודעה לאיש קשר, מספר הטלפון או כתובת דוא"ל.
- חיוג -- חיוג לאיש קשר או למספר טלפון.
- מחיקה -- מחיקת ההודעה.
- מחיקת השיחה -- מחיקת כל ההודעות הנכנסות והיוצאות השייכות לאיש הקשר או למספר הטלפון.
- שמירה כאיש קשר חדש -- שמירה ברשימת אנשי הקשר (אם לא נשמר עדיין).
- הוספה אל איש קשר -- ניתן להוסיף מספר טלפון לאיש קשר קיים (אם לא נשמר עדיין).
- שימוש במידע ממלל -- מציג את כל מספרי הטלפון המופיעים בתוך ההודעה. כדי לבצע פעולות עם מספר טלפון מסויים, יש ללחוץ על כפתור האישור.

תבניות SMS

תפריט תבניות SMS מאפשר לשלוח הודעות מוגדרות מראש לאיש קשר או למספר. ניתן ליצור הודעות מוגדרות מראש בהגדרות ההודעה.

טיוטות

תפריט "טיוטות" מכיל רשימת הודעות שנשמרו כטיוטות. טיוטה הינה הודעה שכתובתה עדיין לא הסתיימה והיא עדיין לא נשלחה. יש ללחוץ על כפתור האישור כדי לבחור את הטיוטה הרצויה כדי לסיים את כתיבת ההודעה, לשלוח אותה או לשמור אותה שוב כטיוטה.

הגדרות הודעות

פריט התפריט 'הגדרות הודעות' פותח את התפריט כדי להגדיר הודעות על מסירת הודעות, לערוך תבניות SMS או להפעיל ולכבות שליחת הודעות עם סימנים דיאקריטיים.

4.4 אנשי קשר

תפריט אנשי הקשר מאפשר עיון ברשימה, הוספת אנשי קשר חדשים, עריכת פרטי הקיימים, הקצאת חיוג מהיר לאיש קשר, ייבוא וגביית אנשי קשר.

רשימת אנשי הקשר

רשימת אנשי הקשר מכילה את רשימת כל אנשי הקשר המאוחסנים בזיכרון הפנימי של הטלפון ובכרטיס הסיים. בעת עיון ברשימה, ניתן לדלג לכל אנשי הקשר המתחילים באות מסויימת על-ידי הקשת האות בלוח המקשים. לבחירת איש קשר, יש ללחוץ על כפתור האישור ויפתח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- חיוג -- מתקשר לאיש הקשר.
- שליחת הודעה -- פותח תיבת מלל. לאחר הזנת המלל, יש ללחוץ על כפתור האישור כדי לשלוח את ההודעה לנמען.
- שליחת דוא"ל -- פותח טופס דוא"ל חדש בו מוזנת בשדה "נמען", כתובת הדוא"ל של איש הקשר (זמין רק אם כתובת הדוא"ל הוזנה מראש).
- עריכת איש קשר -- פותח טופס עם שדות להזנת מלל, בהם ניתן לערוך את פרטי איש הקשר.
- הקצאת צלצול -- רשימת מנגינות הניתנות להקצאה כצלצול. לבחירת מנגינה והקצאתה כצלצול עבור איש קשר, יש לעמוד עליה וללחוץ על כפתור האישור. מנגינה זו תושמע בעת קבלת שיחה נכנסת מאיש קשר זה.
- שליחת איש קשר ככרטיס ביקור -- פותח תפריט בו ניתן לבחור איש קשר או מספר טלפון שאליו יישלח כרטיס הביקור.
- מחיקת איש קשר -- מוחק את איש הקשר מהרשימה.

הוספת איש קשר חדש

ניתן להוסיף איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר דרך התפריט "הוספת איש קשר חדש". ניתן לאחסן את המידע הבא לגבי איש הקשר: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, מספר טלפון בעבודה, מספר טלפון אחר, כתובת דוא"ל וכתובת דואר למכתבים. ניתן לשמור את איש הקשר על-ידי בחירה ב"שמירת איש קשר".

הגדרות אנשי קשר

פריט התפריט הגדרות איש קשר פותח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- מיון אנשי קשר - משנה מיון אנשי קשר, ניתן לסדר את רשימת אנשי הקשר בסדר אלפביתי לפי שם פרטי או לפי שם משפחה.
- סדר תצוגה - משנה את סדר קריאת פריטי אנשי הקשר. ניתן להכריז תחילה על שם פרטי או שם משפחה.
- חיוג מהיר - חיוג כפתור יחיד מאפשר הגדרת איש קשר חיוג מהיר עבור כל מספר בלוח המקשים. החיוג המהיר משמש לחיוג מהיר של עד 10 אנשי קשר נבחרים. כדי להקצות איש קשר בחיוג מהיר למספר, עבור ברשימת המספרים (0-9) ולחץ על כפתור האישור במספר הנבחר. כדי להסיר חיוג מהיר של המספר, בחר את המספר שהוקצה. ניתן להקצות כאן גם איש קשר חירום עבור כפתור SOS. בזמן שאתה נמצא במסך הראשי, לחץ לחיצה ארוכה על המספר בלוח המקשים כדי לחייג במהירות לאיש הקשר שהוקצה.
- ייבוא אנשי קשר מקובץ - פריט התפריט ייבוא אנשי קשר מקובץ ייבא של אנשי קשר מהקובץ לרשימת אנשי הקשר של הטלפון. כדי לייבא אנשי קשר, העתק את קובץ ה-vcf לתיקיית הבסיס של כרטיס ה-SD במידה וקיים, או לתיקיית השורש של האחסון הפנימי של הטלפון. הקובץ צריך לקבל את השם Contacts.vcf. אם Contacts.vcf קיים בשני המיקומים הקובץ הממוקם על כרטיס הזיכרון SD ישמש. אנשי קשר בקובץ Contacts.vcf הזהים לאנשי קשר שכבר מאוחסנים ברשימת אנשי הקשר ידלגו במהלך הייבוא. לאחר סיום ייבוא אנשי הקשר, השם של הקובץ Contacts.vcf ישונה ל-Contacts-imported.vcf.
- גיבוי אנשי קשר לקובץ - פריט התפריט גיבוי אנשי קשר לקובץ מפעיל גיבוי של אנשי קשר לקובץ Contacts.vcf. אם כרטיס הזיכרון SD קיים בטלפון, הקובץ Contacts.vcf נוצר בתיקיית השורש של כרטיס הזיכרון SD. אם אין כרטיס זיכרון SD בטלפון, הקובץ Contacts.vcf נוצר בתיקיית השורש של האחסון הפנימי של הטלפון.
- העתק אנשי קשר מה-SIM.
- מחק את כל אנשי הקשר.

5.4 יישומים

Communication

Tandem

אפליקציית Tandem מאפשרת תקשורת עם משתמשים אחרים באמצעות צ'אט, שיחות, שיחות וידאו וסיוע בשלט רחוק. כל התקשורת מוצפנת. תוכלו לתקשר עם משתמשי טלפון BlindShell אחרים כמו גם עם סמארטפונים המריצים אנדרואיד או iOS. כל שעליך לעשות הוא לשלוח להם הזמנה והם יוכלו להתקין את אפליקציית Tandem ותוכלו לתקשר בינכם.

הוספת איש קשר חדש

כדי להתחיל לתקשר עם אחרים, עליך להוסיף איש קשר חדש. אתה יכול/ה לעשות זאת בשתי דרכים:

קבלת הזמנה:

- קבל/י את ההזמנה שהתקבלה באמצעות SMS ממשתמש אחר.
- פתחו את ההזמנה מה-SMS שהתקבלה (בתפריט "השתמש במידע מטקסט" > כתובת URL > "פתח באפליקציית Tandem") או מההודעה שמופיעה לאחר קבלת ההזמנה.

יצירת הזמנה:

צרו הזמנה ושלחו אותה באמצעות SMS למספר טלפון או לאיש קשר בספר הטלפונים שלך. שלבים ליצירת ההזמנה:

- פתחו את התפריט הראשי ובחרו הוסף איש קשר חדש.
- בחרו איש קשר או הזנו מספר טלפון.
- SMS עם ההזמנה יישלח לאיש הקשר הנבחר.

לאחר יצירת ושליחת ההזמנה החדשה באפליקציית Tandem, עליכם להמתין עד שהצד השני יקבל אותה. לאחר שהם יקבלו, תוכלו להתחיל להשתמש בכל אפשרויות התקשורת עם אותו איש קשר.

רשימת אנשי קשר

רשימת אנשי הקשר מכילה את כל אנשי הקשר שנוצרו על ידי שליחת או קבלת הזמנות. איש קשר יכול להיות באחד משלושה מצבים:

- ממתין לקבלת ההזמנה: ההזמנה נשלחה, אך איש הקשר לא אישר אותה עדיין. עד שהם לא יקבלו, לא תוכלו לתקשר איתם.
- פעיל: לאחר קבלת ההזמנה, תוכל לתקשר עם איש הקשר: התחל צ'אט ביצוע שיחה או שיחת וידאו. הפעל שליטה מרחוק.
- איש הקשר נותק: מצב זה מתרחש אם הצד השני מסיר את החיבור. לא תוכלו לשלוח הודעות חדשות או לתקשר בשום אופן. תוכלו רק להציג את היסטוריית הצ'אט או למחוק את איש הקשר.

צ'אט

בזמן צ'אט, תוכלו לשלוח ולקבל הודעות טקסט וקוליות עם איש הקשר שלכם. כדי להתחיל צ'אט:

- בחרו את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר שלכם.
- בחרו באפשרות צ'אט.
- בתפריט, בחרו הודעה חדשה.

מתקשר

עבור שיחות או שיחות וידאו, השתמשו בפונקציית שיחה או שיחות וידאו. כדי להתחיל שיחה:

- בחרו את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר שלכם.
- בחרו שיחה או שיחת וידאו.
- המתינו עד שהצד השני יקבל את השיחה.

במהלך השיחה, ניתן לשנות את ההגדרות הבאות (לחץ על כפתור האישור):

- מעבר בין אוזנייה לרמקול.
- הפעל או כבה את המצלמה.
- השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון.

שליטה מרחוק

פונקציית השליטה מרחוק מאפשרת למשתמש אחר לשלוט מרחוק בטלפון שלכם, או להיפך, תוכלו לשלוט בטלפון שלו. תכונה זו שימושית במיוחד אם אתה זקוק לסיוע בהגדרות הטלפון או פונקציות ספציפיות. כאשר תפעילו שליטה מרחוק, הטלפון שלכם נשלט על ידי משתמש אחר. כדי להפעיל את השלט המרחוק:

- בחרו את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר שלך.
- בחרו באפשרות שליטה מרחוק.
- המתינו עד שהצד השני יקבל את הבקשה.
- הצד השני יכול כעת לשלוט בטלפון שלך מרחוק.

כדי לסיים את השליטה מרחוק, לחצו על לחצן החזרה ואשרו את הסיום.

ניהול אנשי קשר

בניהול אנשי קשר, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

- שנה שם: שנו את השם שמופיע עבור איש קשר זה.
- מחקו: מחקו את כל הנתונים המשייכים לאיש קשר זה, כולל היסטוריית הצ'אט.
- שלח שוב הזמנה: זמין רק אם איש הקשר עדיין לא אישר את ההזמנה שלך.

הגדרות

בהגדרות תוכלו למחוק את כל הנתונים המאוחסנים מהאפליקציה.

On-line

דפדפן אינטרנט

דפדפן האינטרנט מאפשר גלישה בדפי אינטרנט.

תפריט דפדפן אינטרנט

- כדי להתחיל לגלוש באינטרנט, בחר את הפריט 'הוסף כתובת אתר' או את פריט התפריט 'חיפוש'.
- כדי לחזור לתפריט בזמן הגלישה, לחץ על כפתור החזרה.

- כדי לחזור לדף האינטרנט שכבר נפתח, בחר בפריט התפריט עיון בעמוד.
- כדי לטעון מחדש את הדף, חזור אחורה או קדימה בגלישה, בחר בפריט תפריט ניווט.
- כדי לשמור את הדף כסימנייה, כאפליקציה מועדפת או כדף בית, בחר בפריט התפריט 'פעולות עמוד'.

גלישה

- כדי לנווט על רכיבי העמוד, לחץ על הלחצן למטה או למעלה.
 - כדי ללחוץ על האלמנט הממוקד, לחץ על כפתור האישור.
- כדי להפוך את הגלישה ליעילה יותר, ללחצנים של לוח המקשים הנומרי יש את הפונקציות הבאות:

- 1 - עבור לניווט לפי רכיבי ברירת מחדל.
- 2 - עבור לניווט לפי כותרות.
- 3 - עבור לניווט באמצעות פקדים.
- 4 - עבור לניווט לפי קישורים.
- 5 - עבור לניווט לפי מילים.
- 6 - עבור לניווט לפי ציוני דרך של ARIA.
- 7 - קפוצ' לראש העמוד.
- 8 - הפעל/כיבוי תנועה אוטומטית בין אלמנטים.
- 9 - קפוצ' לתחתית העמוד.
- * - חזור לגלישה.
- 0 - אמור את הכותרת של העמוד הנוכחי ואת מצב הניווט.
- # - פותח תפריט ההקשר המכיל פעולות מהירות ועזרה.

ציוני דרך (ARIA (Accessible Rich Internet Applications משרתים את המטרה של ניווט מהיר יותר ומציינים באופן סמנטי את המטרה של אזורים ספציפיים בדף, כגון סרגלי ניווט, באנרים, סרגלי חיפוש, טפסים או קטעי תוכן ראשיים.

נגישות האינטרנט מסתמכת על תכונות הנגישות של דף האינטרנט שבו אתה מבקר. אם לדף יש תמיכת נגישות לקויה או שגויה, אתה עלול להיתקל בבעיות באינטראקציה איתו.

מצא בדף

- כדי למצוא טקסט בעמוד הנוכחי, פתח את תפריט ההקשר על ידי לחיצה על כפתור #, ולאחר מכן בחר בפריט התפריט מצא בעמוד.
- כדי לעבור בין תוצאות החיפוש בדף, לחץ על הלחצן למטה או למעלה.
- כדי לבטל את החיפוש ולעבור בין רכיבי ברירת המחדל, לחץ על כפתור מספר 1.

הגדרות

- הגדרות Earcon - קובע אילו אירועים יוכרוזו על ידי earcon (סאונד) בזמן גלישה בדף אינטרנט.
- דף הבית - מגדיר את דף הבית והאם יש לפתוח אותו באופן אוטומטי בעת ההפעלה.
- הגדרות פרטיות - הגדר את פרופיל הפרטיות, כולל התנהגות עוגיות והגנה נגד מעקב.
- מנוע חיפוש - מגדיר את מנוע החיפוש המשמש בעת חיפוש באינטרנט.
- הצג שכבת על של טקסט - מציג שכבת על שקופה על הדף עם הטקסט הגדול של האלמנט הממוקד.
- מצב פרטי - כאשר נבחר, דפים שביקרו בהם לא יישמרו בהיסטוריה.
- השתמש באפליקציה לצפייה בסרטוני YouTube - כאשר נבחר, סרטוני YouTube ייפתחו באפליקציית BlindShell.
- ניקוי קבצי דפדפן - מוחק את המטמון וקבצי הדפדפן הזמניים.

Uncategorized

דואר אלקטרוני

אפליקציית הדואר האלקטרוני היא לקוח דואר אלקטרוני המאפשר לך להיכנס ולנהל מספר חשבונות דואר אלקטרוני. אתה יכול לעבור בקלות בין כל החשבונות המחוברים.

כניסה לדואר אלקטרוני

כדי להיכנס לאימייל שלך, עליך להזין תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. בהתבסס על הכתובת שהוזנה, האפליקציה תנסה לקבוע באופן אוטומטי את הנתונים הדרושים לקבלת ושליחת הודעות (שרתי IMAP ו-SMTP, כולל יציאות). אם לא ניתן לאחזר מידע זה באופן אוטומטי, יופיע תפריט נוסף, המאפשר לך להזין באופן ידני את פרטי ה-SMTP וה-IMAP (שרת, יציאה וסוג אבטחה). אם המידע אוחזר בהצלחה, אתה רק צריך להזין את הסיסמה שלך ולהיכנס. אם חסרים לך פרטי תצורת ה-SMTP וה-IMAP, תוכל למצוא אותם באתר הרשמי של ספק שירותי הדואר האלקטרוני שלך. ספקים מסוימים (למשל, Gmail, Outlook וכו') דורשים כניסה באמצעות OAuth2 (OAuth2 הוא תקן אבטחה להרשאה המאפשר ליישומים לגשת לחשבונות משתמש בפלטפורמות אחרות מבלי לאחסן סיסמאות משתמש). במקרה זה, לאחר הזנת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תופנה לדפדפן אינטרנט שבו תשלים את תהליך ההתחברות באתר האינטרנט של הספק. לאחר מכן, הדפדפן יחזיר אותך אוטומטית

לאפליקציית הדואר האלקטרוני. אתה יכול להוסיף חשבון דואר אלקטרוני נוסף בקטע הגדרות - רשימת חשבונות. עבור חלק מהדומיינים, הכנו מדריך התחברות מפורט יותר בסעיף "טיפים וטריקים" באתר שלנו.

עבודה עם דואר אלקטרוני

עיון בהודעות דואר אלקטרוני

אם הוגדרו מספר חשבונות ב-BlindShell, תחילה עליך לבחור את החשבון איתו ברצונך לעבוד לאחר הפעלת האפליקציה. לאחר הבחירה, כל התיקיות של אותו חשבון ייטענו, ותוכל לעיין בהודעות הדואר האלקטרוני בהן. כאשר אתה פותח דואר אלקטרוני ספציפי, אתה יכול לקרוא את תוכנו באופן ידני או ללחוץ על מקש 8 כדי להתחיל קריאה רציפה של ההודעה. מהתפריט ניתן גם להשיב למייל, להשיב לכל הנמענים, להעבירו, לפתוח קבצים מצורפים (אם יש), לפתוח את המייל בדפדפן אינטרנט (ניתן להשתמש אם ההודעה נטענת בצורה לא נכונה או מופיעה כדי להיות ריק), השתמש במידע מהטקסט, שתף אותו, הוסף את השולח לאנשי הקשר שלך, או מחק את הדואר האלקטרוני.

דואר אלקטרוני חדש

לאחר פתיחת חשבון הדואר האלקטרוני, האפשרות הראשונה היא "דואר אלקטרוני חדש". כאן, עליך לבחור נמען אחד או יותר, להזין את הנושא ולהוסיף טקסט או קובץ מצורף. קבצים מצורפים יכולים לכלול תמונה, הקלטת אודיו או כל קובץ אחר המאוחסן בטלפון שלך.

הגדרות

רשימת חשבונות

בחלק זה תוכל לנהל חשבונות קיימים או להוסיף חשבונות חדשים. עבור כל חשבון, אתה יכול:

- ערוך את התצורה שלו (למשל, שרתי SMTP/IMAP, יציאות, אבטחה)
- הגדר את שם השולח
- בחר אם לשמור עותקים של הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו בתיקייה "נשלח" (ניתן לבטל אפשרות זו אם ספק הדואר שלך שומר אוטומטית דואר שנשלח, כדי למנוע כפילויות)
- מחק את החשבון מהטלפון

בודק אם יש הודעות דואר אלקטרוני חדשות ברקע

באפשרות זו, תוכל להגדיר האם, ובאיזה מרווח זמן, האפליקציה צריכה לבדוק אוטומטית אם יש הודעות נכנסות חדשות. אם תגדיר מרווח קבוע, תקבל הודעה על ידי התראה בכל פעם שמגיע דואר אלקטרוני חדש.

כלים

שעון מעורר

יישום השעון המעורר מאפשר ליצור התראות בזמנים ובימים נבחרים. כדי להפסיק התראה פעילה, יש ללחוץ על כפתור "אישור" או על כפתור "אחורה".

שעון מעורר חדש

כדי ליצור התראה חדשה, יש לבחור בתפריט "שעון מעורר חדש". תיפתח רשימה ובה האפשרויות הבאות:

- קביעת זמן -- נפתח שדה מספרי בשם "זמן", בו ניתן לרשום את השעה הרצויה על ידי הקלדת ארבע ספרות. צמד הספרות הראשון מייצג שעות וצמד הספרות השני מייצג דקות.
- קביעת חזרה -- נפתחת רשימה של ימות השבוע. יש לבחור את הימים שבהם השעון המעורר יפעל. אם לא תבחרו באף יום, השעון המעורר יפעל כל יום, אחרת השעון המעורר יפעל רק בימים נבחרים.
- שמירת שעון מעורר -- שומר את ההתראה ומפעיל אותה.

עריכת שעון מעורר

יש לבחור מתוך הרשימה את ההתראה שנוצרה קודם לכן ויפתח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- כיבוי שעון מעורר -- התראה לא פעילה עדיין תישאר בטלפון, אך לא תפעל.
- שינוי שעון מעורר -- נפתח תפריט ובו אפשרויות לשינוי השעה והיום של ההתראה.
- מחיקת שעון מעורר -- מוחק את ההתראה ממכשיר הטלפון.

מחשבון

המחשבון מאפשר ביצוע פעולות חשבון בסיסיות -- חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

- לביצוע הפעולה החשבונית, יש ללחוץ על כפתור האישור.
- פעולות החשבון נמצאות בכפתור הכוכבית.
- הנקודה העשרונית נמצאת בכפתור הסולמית.

לוח שנה

יישום לוח השנה מאפשר יצירת סדר יום ומעקב אחריו.

הוספת אירוע חדש

בחירת "הוספת אירוע חדש" מתוך התפריט תביא לפתיחת תפריט נוסף שבו ניתן יהיה להגדיר את פרטי האירוע.

- כותרת -- כותרת האירוע (שדה חובה).
- מיקום -- מיקום האירוע ואפשרות למילוי מידע נוסף.
- תאריך התחלה -- היום הראשון של האירוע (שדה חובה).
- זמן התחלת האירוע -- אם האירוע אמור להימשך יום שלם, יש להשאיר את השדה ריק.
- תאריך סיום -- היום האחרון של האירוע.
- זמן הסיום -- זמן סיום האירוע.
- חזרות -- להזנת אירוע מחזורי בלבד. יש לבחור את מספר החזרות ואת תאריך סיום החזרות, במידה ויש תאריך סיום.
- תזכורת -- מאפשר בחירת פרק הזמן לקבלת התראה לפני תחילת האירוע.
- שמירת האירוע -- שומר את האירוע.

עיון בסדר היום

לעיון בסדר היום יש לבחור "סדר יום" מתוך התפריט. לעריכה או מחיקת סדר היום יש ללחוץ על כפתור האישור.

עיון בלוח השנה

כדי לעיין בלוח השנה לפי שבועות או לפי ימים יש לבחור באפשרות "עיון בלוח השנה". יש לבחור שנה, חודש ואת השבוע בחודש שבו ברצונכם לצפות באירועים שנקבעו. יש ללחוץ על כפתור האישור כדי לעיין בכל אירועי השבוע או באירועים לפי ימים.

איתור אירוע

לאיתור אירוע, יש לבחור "חיפוש" ולהזין את שם האירוע.

איתור אירוע

לאיתור אירוע, יש לבחור "מצא" ולהזין את שם האירוע.

חגים ומועדים

להצגת חגים ומועדים יש לבחור ב"הגדרות" מתוך התפריט ולקבוע "נראה". נדרש חיבור לאינטרנט כדי להוריד את רשימת החגים והמועדים.

פנס

יישום הפנס מפעיל את תאורת הלד של המצלמה.

מד דקות

היישום מד דקות מבצע ספירה לאחור בסיסית ומשמיע התראה מתנגנת בתום פרק הזמן שהוגדר. בעת שהיישום מופעל, ניתן בו-זמנית להשתמש בו ובפונקציות נוספות של הטלפון. לעצירת ההתראה המתנגנת, יש ללחוץ על כפתור האישור או על כפתור אחורה.

קביעת פרק זמן הספירה לאחור

- לבחירת מד הדקות, יש ללחוץ על כפתור האישור.
- יש לבחור "קביעת זמן" מתוך התפריט ולהזין את פרק הזמן לספירה לאחור בעזרת תפריט המציג את האפשרויות הבאות: שעות, דקות ושניות.
- יש לבחור "הפעל" מתוך התפריט כדי להפעיל את הספירה לאחור.

השהייה וביטול הספירה לאחור

- השהיית הספירה לאחור - בזמן שמד הדקות מריץ את הספירה לאחור, יש ללחוץ על כפתור האישור ולאחריו לבחור "הפסק" מתוך התפריט והספירה לאחור תיעצר על הזמן הנוכחי.
- כדי להפעיל את הספירה לאחור מחדש, יש ללחוץ על כפתור האישור ולאחריו לבחור "המשך" מתוך התפריט.
- ביטול הספירה לאחור -- יש לבחור "בטל" כדי לעצור את הספירה לאחור ולאפס אותו לזמן ההתחלתי שנקבע.

פתקים

יישום פתקים מאפשר כתיבת פתקים.
לעריכה, שליחה או מחיקה של פתק, יש לבחור אותו מתוך רשימת הפתקים.

שעון עצר

שעון העצר הוא כלי למדידת פרקי זמן. ניתן בו-זמנית להשתמש בו ובפונקציות נוספות של הטלפון.

- להפעלתו, יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור ב"הפעלת שעון עצר" מתוך התפריט.
- לעצירתו, יש ללוח על כפתור האישור בזמן שהשעון רץ.
- להפעלת שעון העצר מנקודת הזמן שבה נעצר מוקדם יותר, יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור ב"המשך שעון עצר" מתוך התפריט.
- להפעלת השעון מחדש, יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור "הפעל שעון עצר מחדש" מתוך התפריט.
- לאיפוס שעון העצר כדי שיתחיל מאפס שניות, יש ללחוץ על כפתור האישור ולבחור ב"איפוס שעון עצר" מתוך התפריט.

ממיר יחידות

יישום ממיר יחידות מאפשר המרת יחידות פיזיקליות.
המרת יחידות -- יש לסמן את יחידת הקלט הרצויה, להזין את הערך ולבחור "המרה" מתוך התפריט.

רשמקול

הרשמקול הוא יישום להקלטת קולות וצלילים.

- שמירת ההקלטה נעשית על ידי לחיצה על כפתור האישור בסיום ההקלטה.
- השהיית ההקלטה נעשית על ידי לחיצה על כפתור אחורה תוך כדי הקלטה. להמשך ההקלטה, יש ללחוץ על כפתור האישור. לשמירת ההקלטה, יש ללחוץ על כפתור אחורה בזמן שההקלטה מושהית.
- כדי לנגן, לשתף, למחוק או לשנות את שם ההקלטה, יש לבחור אותה מתוך רשימת ההקלטות.

מזג אוויר

יישומון מזג האוויר מראה את מזר האוויר הנוכחי של המיקום הנוכחי ותחזית לשלושת הימים הקרובים.
הערה: אפשרות זו דורשת חיבור אינטרנט.

מזג אוויר מקומי

מראה את מזג האוויר למיקום הנוכחי שלכם. ניתן לראות את התחזית לשלושת הימים הקרובים.

- תחזית שעתית - תחזית שעתית לכל יום ניתן למצוא ע"י בחירה של היום הרלוונטי. ניתן לראות מידע כגון טמפרטורה, מהירות רוח או לחות לכל שעה.
- פרטים - מראה יותר מפורט על מצג האוויר ליום הנבחר, כגון זריחה, שקיעה, מדד UV, או מדד איכות אוויר.

מדד UV

אינדקס אולטרה-סגול, שמציג את העוצמה של קרינת השמש. ככל שמדד ה-UV גבוה יותר, תגדל כמות קרם ההגנה שתצטרכו להשתמש בה מתחת לשמש.

מדד איכות אוויר

מספר עד כמה נקי או מזוהם האוויר במיקומך. ככל שמדד איכות האוויר נמוך יותר, האוויר יותר בריא יותר בחוץ. מדד איכות האוויר זמית ליום הנוכחי בלבד, כי הוא לא ניתן לחיזוי והנתונים "נמדדו באופן טרי".

למצוא עיר

כדי לחפש עיר, בחרו בפריט "חיפוש עיר" שפותח את שורת החיפוש. ניתן למצוא כל עיר בכל מדינה. ניתן לשמור את העיר שתמצאו למועדפים.

מועדפים

רשימה שם ערים שמורות ניתןן כאן לבחירה או מחיקה.

ברומטר

פונקציה למדידת לחץ אטמוספרי באמצעות חיישן טלפון BlindShell. הלחץ שנמדד במיקומך הנוכחי ובגובה בו אתה נמצא, נמדד על ידי החיישן הברומטרי של הסמארטפון. בגובה פני הים נמדד הלחץ האטמוספרי הממוצע זהו הלחץ האטמוספרי הניתן בדרך כלל בדיווחי מזג האוויר.

הגדרות

לשנות את הטמפרטורה, מהירות הרוח ולחץ להעדפתך.

- טמפרטורה - ניתן להחליף בין צלסיוס ופרנהייט
- מהירות רוח - אפשרויות כגון קילומטר לשעה, מטר לשניה, מייל לשעה וקשרים ניתנות לבחירה.
- לחץ - מיליבר, הקטופסקל, מילימטרים של כספית או אינצ'ים של כספית ניתנים לבחירה.

מנהל קבצים

מנהל הקבצים הוא כלי לגלישה ולעבודה עם קבצים ותיקיות בטלפון שלך. ניתן לגשת גם לזיכרון הפנימי וגם לכרטיס SD.

עיין בקבצים

במצב זה, ניתן לעיין בזיכרון הפנימי ובכרטיס SD. כל פריט מכיל מידע בין אם זה תיקיה או קובץ. קבצים, אם הסוג נתמך, ניתן לפתוח ישירות ממנהל הקבצים באפליקציה המתאימה. ניתן להעתיק או להעביר קבצים או תיקיות למיקום אחר לפי בחירתך. ניתן גם לשנות שם או למחוק תיקיות. כל הפונקציות הללו זמינות בתפריט על ידי בחירת התיקיה או הקובץ המתאימים.

העתקה, העברה והדבקה של קובץ או תיקיה

ניתן לבצע פעולות העתקה או העברה עם כל קובץ או תיקיה. כדי להעתיק או להעביר קובץ או תיקיה, פתח את תפריט התיקיות או הקובץ ובחר העתק או העבר. לאחר מכן הקובץ או התיקיה נשמרים בלוח. לאחר מכן דפדף לאן ברצונך להעתיק או להעביר את הקובץ או התיקיה ובחר העתק לכאן או העבר לכאן מתפריט התיקיות. אם תבחר להעתיק, הקובץ המקורי יישאר ללא שינוי כאשר יודבק במיקום החדש. אם נבחרה אפשרות ההעברה, הקובץ או התיקיה יועברו מהמיקום הישן למקום החדש.

יצירת תיקיה חדשה או מסמך טקסט חדש

ניתן ליצור מסמך טקסט חדש או תיקיה ריקה חדשה בתיקייה על ידי בחירה בפריט התפריט אפשרויות נוספות.

מנהל ארכיון

מנהל הארכיון הוא חלק ממנהל הקבצים ומאפשר עבודה עם קבצי ארכיון (קובצי ZIP). ניתן לחלץ קובץ ארכיון לתיקיה. כדי לעשות זאת, פתח את קובץ הארכיון ובחר פתח במנהל הארכיון. אפשר גם ליצור קובץ ארכיון חדש מתיקיה או קובץ. בחר קובץ או תיקיה ולאחר מכן בחר פתח במנהל הארכיון או בחר פריט תפריט מנהל הארכיון בהתאמה.

עורך טקסט

מנהל הקבצים מכיל עורך טקסט פשוט. אתה יכול לכתוב ולערוך מסמכי טקסט פשוטים בעורך הטקסט. כדי לפתוח את הקובץ בעורך הטקסט, אתר את מסמך הטקסט, פתח אותו ובחר פתח בעורך הטקסט.

הגדרות

למנהל הקבצים יש הגדרות שמשנות את העבודה עם קבצים.

- מיון קבצים ותיקיות - מגדיר את הסדר שבו ימוינו התיקיות והקבצים (לפי שם, לפי שינוי אחרון, לפי גודל). כברירת מחדל, קבצים ותיקיות ממוינים לפי שם.
- הצג סיומת קובץ - קובע אם יש להציג סיומות קבצים.

הערה: אם הצג סיומת קובץ מופעלת, ניתן לערוך את סיומת הקובץ לאחר מכן. שינוי סיומת הקובץ עלול לגרום לבעיה בעת פתיחת הקובץ. כברירת מחדל, הרחבות אינן מוצגות.

מדייה

מצלמה

יישום המצלמה מאפשר לצלם תמונות בעזרת המצלמה המשולבת של הטלפון.

- כאשר יישום המצלמה פתוח ומוכן לצילום, נשמעים קליקים במרווחי זמן קבועים.
- יש לכוון את המצלמה אל עבר אובייקט הצילום וללחוץ על כפתור האישור כדי לצלם את התמונה.
- לאחר שצילום התמונה מסתיים, נשמע צליל המדמה סגירת תריס. לאחריו אפשר לבחור מהתפריט "שמירת תמונה" או "הצגת תמונה".
- באפשרות "שמירת תמונה" ניתן להקליט תיאור קולי קצר של התמונה, אשר יסייע בזיהוי בתוך גלריית התמונות שלכם.

רדיו FM

יישום רדיו FM מאפשר השמעת תחנות רדיו המשדרות בתדר FM. לתפעול היישום, יש לחבר אוזניות, הן פועלות כאנטנה.

- להפעלת תחנת רדיו יש לבחור ב"ניגון רדיו" מתוך התפריט.
- כדי להעביר תחנות, יש ללחוץ על הכפתורים מטה ומעלה.
- שמירה למועדפים -- יש ללחוץ על כפתור האישור בזמן השמעת התחנה ולבחור ב"שמירה למועדפים". להסרה מהמועדפים, יש לחזור על אותן הפעולות ולבחור ב"הסרה מהמועדפים".
- לכיוון באופן ידני של התדר, יש ללחוץ על כפתור האישור בזמן ההשמעה ולבחור ב"כיוון ידני". הכפתורים מטה ומעלה יכוונו את התדר ב-1.0 מגה הרץ. לכיוון אוטומטי, יש לחזור על אותן הפעולות ולבחור ב"כיוון אוטומטי".
- להזנה באופן ידני של תדר מסוים, יש ללחוץ על כפתור האישור בזמן ההשמעה ולבחור ב"הזן תדר".

תמונות

יישום התמונות מאפשר צפייה בתמונות שצולמו באמצעות יישום המצלמה ותמונות שהועתקו לטלפון ושמורות בו.

- לצפייה בתמונות שצולמו באמצעות המצלמה, יש לבחור ב"תמונות מצלמה" מתוך התפריט.
- לצפייה בתמונות שהורדו או הועתקו אל הטלפון, יש לבחור ב"תמונות אחרות" מתוך התפריט.
- בזמן הצפייה בתמונות, יושמע תיאור קולי.
- כדי להגדיל את התמונה, יש ללחוץ על כפתור האישור בעת הצפייה בה ולבחור "הגדלה". כדי להקטין אותה, יש לחזור על אותן הפעולות ולבחור "הקטנה". אפשר להגדיל את תצוגת

התמונה גם על-ידי לחיצה על כפתור הסולמית, והקטנת תצוגת התמונה על-ידי לחיצה על כפתור הכוכבית.

- להצגת המידע אודות התמונה, שינוי התיאור הקולי או מחיקת התמונה, יש ללחוץ על כפתור האישור בעת הצפייה בתמונה ולבחור את האפשרות הרצויה מתוך התפריט.

שיתוף תמונה

שיתוף תמונה -- יש ללחוץ על כפתור האישור בעת הצפייה בה ולבחור ב"שיתוף תמונה" מתוך התפריט. ייפתח תפריט עם האפשרויות הבאות:

- שיתוף תמונה באמצעות הדואר האלקטרוני -- תיפתח הודעת דואר אלקטרוני חדשה ותצורף בה התמונה הנבחרת.
- שיתוף התמונה על ידי הודעות -- תמונה מוצפנת תועלה לשרתי ה-BlindShell והמסרון יכיל קישור שבאמצעותו ניתן יהיה לצפות בתמונה. פעולה זו מחייבת חיבור לאינטרנט.

עלויות ומידע על פרטיות

- לא נעשה שימוש בשירות הודעות מולטימדיה (MMS) כדי לשרת פונקציה זו. העלות תהיה בהתאם לדמי מסרון סטנדרטי של ספקית הסלולר שלכם (וכן תשלום בעבור העברת נתונים במקרה שנעשה שימוש בנתונים סלולריים).
- כל התמונות הנשלחות באופן הזה מוצפנות מקצה לקצה באמצעות קוד מאובטח (AES). מפתח ההצפנה כלול בתוך הודעת הטקסט ונשלח אך ורק לנמען שנבחר. לעולם אינו מועבר למקום אחר. אף-על-פי שהנתונים המוצפנים של התמונה מאוחסנים על גבי השרתים של BlindShell, אין אפשרות לאף אדם (גם לא לחברת BlindShell) לצפיות בתוכן של התמונות המשותפות ללא המפתח.
- הנתונים המוצפנים של התמונות מאוחסנים למשך 14 יום לפחות לאחר העלאתם.

רדיו באינטרנט

יישום הרדיו באינטרנט מאפשר השמעת תחנות רדיו מכל העולם המשודרות דרך האינטרנט.

- להשמעת תחנת רדיו מסוימת, יש לבחור את התחנה הרצויה מתוך רשימת התחנות.
- ניתן להוסיף תחנות רדיו למועדפים על-ידי לחיצה על כפתור האישור במהלך ההשמעה ולבחור ב"שמירה למועדפים". להסרת התחנות מרשימת המועדפים, יש לחזור על הפעולות שלהלן.

הערה: אפשרות זו דורשת חיבור אינטרנט.

נגן המוזיקה

נגן המוזיקה מאפשר השמעת קבצי שמע המאוחסנים בזיכרון הפנימי של טלפון או על כרטיס זיכרון SD. כדי להוסיף קבצי שמע לרשימה בנגן המוזיקה, יש לשמור אותם בתיקיית המוזיקה בטלפון או על כרטיס זיכרון.

- להשמעת קובץ שמע יש לבחור אותו מתוך רשימת "כל השירים".
- להשמעת קובץ השמע הבא או הקודם יש ללחוץ על הכפתורים מטה ומעלה.
- להשהיית ההשמעה, יש ללחוץ על כפתור אחורה.
- כדי לחזור לרשימת כל השירים, יש ללחוץ על כפתור אחורה בזמן שההשמעה מושהית.
- להרצה קדימה, יש ללחוץ על הכפתור מטה בזמן שהשיר מתנגן.
- להרצה אחורה, יש ללחוץ על הכפתור מעלה בזמן שהשיר מתנגן.
- להוספת קובץ שמע למועדפים, יש ללחוץ על כפתור האישור בזמן שהשיר מתנגן ולבחור "שמירה למועדפים". יש לחזור על פעולות אלו להסרה מהמועדפים.
- למחיקת קובץ שמע, יש ללחוץ על כפתור האישור בזמן שהשיר מתנגן ולבחור "מחיקת שיר".

יוטיוב

היישום מאפשר ניגון של תוכן אודיו-ויזואלי (שמע-חזותי), הזמין חינם באתר יוטיוב. חשוב לדעת

- כל הסרטונים ביוטיוב שייכים ליוצרים עצמאיים. ל-BlindShell אין כל קשר לפלטפורמה של יוטיוב או ליוצרי התוכן בכל דרך שהיא, ואינה אחראית למה שמתפרסם ביוטיוב.
- הגישה ליוטיוב היא במצב אנונימי. BlindShell אינה דורשת התחברות משתמש ואינה מספקת תמיכה לכך. התוכן של יוטיוב פרימיום או תוכן עם הגבלת גיל אינו זמין.
- רשימת הסרטונים המועדפים שלכם, ההסטוריה או הערוצים השמורים במכשיר ה-BlindShell Classic 2 שלכם, אינם מסונכרנים למכשירים אחרים או לחשבון היוטיוב שלכם.
- חלק מהסרטונים או הסטרימרים בשידור חי עשויים להשתמש בפורמטים שאינם מותאמים, לכן לא ניתן לנגן אותם בטלפון שלכם.

ניגון סרטון

- אפשר לחפש סרטון או ערוץ על-ידי בחירת "חיפוש" מתוך התפריט.
- אפשר לעיין בסרטונים שנצפו בעבר על-ידי בחירת "היסטוריה" מתוך התפריט.
- לעיין בסרטונים המועדפים שלכם, יש לבחור ב"מועדפים" מתוך התפריט.
- לעיין בסרטונים החדשים ביותר על-פי קטגוריות, יש לבחור "קטגוריות" מתוך התפריט.

- לפתיחת אפשרויות סרטון, יש לבחור את הסרטון הרצוי מתוך הרשימה.
- לניגון סרטון, יש לבחור "מנגן מההתחלה" או "חידוש השמעה" מתוך התפריט.

הגדרות

במצב סרטון ניתן לקבוע כיוון ומיקום הסרטון במסך. מצב לאורך הוא ברירת המחדל בטלפון, כאשר הסרטון ממורכז על המסך. במצב לרוחב, התמונה מוצגת ב-90 מעלות עם כיוון השעון, על פני כל המסך. רק האפשרות "קול" מונעת את הורדת נתוני הסרטון, וזאת כדי להפחית בעומס הנתונים.

נגן וידאו

נגן הוידאו מאשפר לנגן קבצי וידאו השמורים בזיכרון הפנימי של הטלפון, או בכרטיס זיכרון SD. שימו קבצי וידאו בתיקיית הסרטים של הטלפון או בכרטיס הזיכרון על מנת להציג אותם בנגן הוידאו. כדי לארגן את קבצי הוידאו, ניתן ליצוק תיקיות בשבילים (כגון סרטוני משפחה, או סרטוני מוזיקה)).

ניגון וידאו

- בחרו בפריט "כל הוידאו" כדי להציג את כל הוידאו.
- בחרו בפריט "אלבומים" כדי להציג את כל התיקיות עם קבצי וידאו, ולאחר מכן תבחרו אלבום מסוים כדי להציג את קבצי הוידאו מאלבום זה.
- בחרו בפריט "מועדפים" כדי להציג את סרטונים המועדפים.
- על מנת לנגן וידאו, בחרו אותו מתוך רשימת הוידאו.
- בזמן ניגון וידאו, לחצו על לחצן האישור כדי לפתוח תפריט הקשר לוידאו שמתנגן כעת.

הגדרות

מצב וידאו - קובע את כיוון של תמונת הוידאו. תמונה אנכית זו היא ברירת המחדל של הטלפון, הוידאו ממורכז במסך. תמונה אופקית מסובבת את הוידאו 90 מעלות עם כיוון השעון והופכת אותו למסך מלא. הגדרת הקול בלבד, מנגנת רק את הקול של קבצי הוידאו.

ספרים

קורא הספרים

יישומון קורא הספרים תומך קריאת ספרי אודיו בפורמטי אודיו m4a, mp3 ו-m4b, בנוסף ל-EPUB, Daisy, וספרים בקבצי txt. כדי להשתמש בקורא הספרים, עליכם להוריד ספרים באמצעות הספרייה או להעתיק את קבצי הספרים אל תיקיית BlindShell/Books בכרטיס הזיכרון הפנימי של הטלפון או לכרטיס ה-SD. כל קובץ בתיקיית הספרים מזוהה כספר יחיד.

- קריאה מההתחלה - יש לבחור את הספר מתוך רשימת הספרים ולאחר מכן לבחור בקרא מההתחלה או המשך קריאה.
- השהיית ההקראה -- לחיצה על כפתור "אחורה" במהלך ההשמעה.
- להמשך ההקראה -- לחיצה על כפתור "אישור" בזמן שההשמעה מושהית.
- מעבר לחלק הקודם או החלק הבא בספרי שמע -- לחיצה על כפתורים מטה ומעלה.
- מעבר לחלק הקודם או החלק הבא בספרים בפורמט טקסט -- לחיצה על כפתורים מטה ומעלה.

תפריט ההשמעה

לפתיחת תפריט ההשמעה, יש ללחוץ על כפתור האישור בזמן ההשמעה. בתפריט ההשמעה ישנן האפשרויות הבאות:

- קפיצה לאחוז מהספר -- יש לבחור ולהזין אחוז מהספר (0-99) שיישום הקורא יקפוץ אליו.
- גגן את הפרק הבא או את החלק הבא - משמיע את הפרק הבא/החלק הבא בספר, במידה וקיים.
- גגן את הפרק הקודם או את החלק הקודם -- משמיע את הפרק הקודם או את החלק הקודם בספר, במידה וקיים.
- הוספת סימנייה - יצירת סימנייה עבור המיקום הנוכחי בספר. יש להזין את שם הסימנייה בעת יצירתה. אם לא יוזן טקסט, ייעשה שימוש בחותמת הזמן בתור שם הסימנייה.
- ניווט בספר (רק בספרי שמע) -- משנה את פעולת הכפתורים מטה ומעלה ולחיצה עליהם תעביר אתכם בקפיצות של 10 שניות קדימה ואחורה בתוך הספר. במידה ולא תלחצו על אף אחד מהכפתורים הללו למשך 10 שניות, פעולת הכפתורים מטה ומעלה יחזרו ליעודם המקורי.
- קצב הדיבור (רק בספרים בפורמט טקסט) -- משנה את קצב הדיבור של יישום קורא הספרים.

- מהירות ניגון (רק בספרי אודיו) - משנה את מהירות הניגון של האודיו.
- שפת הדיבור (רק בספרים בפורמט טקסט) -- משנה את השפה שבה ייקרא הספר.

כדי להפוך את חווית הקריאה לנוחה יותר, לכפתורים של לוח המקשים המספרי יש את התפקידים הבאים:

- 4 - מנגן את הפרק או החלק הקודם של הספר, אם ישנם.
- 5 - מנגן או מפסיק את קריאת הספר.
- 6 - מנגן את הפרק או החלק הבא של הספר, אם ישנם.
- 7 - מוריד את מהירות הניגון או קצת הדיבור.
- 8 - מגדיר ברירת מחדל של מהירות הניגון או קצב הדיבור.
- 9 - מעלה את מהירות הניגון או קצת הדיבור.
- 0 - מוסיף סימניה.

עזרי ראייה

איתורית

היישום איתורית עוזר במציאת המיקום של חפצים אישיים כגון מפתחות, תיקים, ארנקים, ביגוד, ועוד. על מנת לזהות את מיקום החפץ במקרה הצורך, יש להצמיד את האיתורית לחפץ ולהשתמש בטלפון כדי לתקשר עם האיתורית.

תכונה זו דורשת התקן איתורית. ניתן לרכוש אותה בנפרד ממשווק הטלפון. להפעלה ראשונה של האיתורית (או לאחר הכנסת הסוללה), יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור האיתורית. מיד עם הפעלתה יישמעו צפצופים ממושכים. כדי להגדיר את האיתורית, יש לפתוח את היישום איתורית בטלפון שממוקם תחת יישומים/עזרי ראייה, ובעזרתו לאתר את האיתורית או לערוך את המאפיינים שלה.

צימוד האיתורית

כדי לצמד את האיתורית עם הטלפון, יש לבחור ב"הוספת איתורית חדשה" מתוך התפריט, לאחר מכן יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הכפתור של האיתורית כדי לחבר אותה. כאשר האיתורית מתחברת לטלפון, תוצג הנחיה להזין שם עבור האיתורית.

צפצוף האיתורית

כדי לאתר את האיתורית בעזרת הטלפון, במידה וישנן מספר איתוריות, יש לבחור ב"מצא את האיתורית" מתוך התפריט ולסמן את האיתורית הרצויה מתוך הרשימה. כאשר הטלפון מתחבר לאיתורית, היא תתחיל לצפצף. כדי להפסיק את הצפצוף, יש ללחוץ על לחצן האישור.

עריכת האיתורית

כדי לבטל את הצימוד של האיתורית או לערוך את שם האיתורית, יש לבחור ב"איתוריות" מתוך התפריט ולסמן את האיתורית הרצויה מתוך הרשימה, במידה וישנן מספר איתוריות.

מציין צבע

יישום מציין צבע משמש לזיהוי צבעיהם של עצמים ומשתמש במצלמת הטלפון הממוקמת בצדו האחורי של הטלפון, מעל כפתור החירום. כדי לזהות צבע, יש לכוון את המצלמה לעבר האובייקט, במרחק של כ-10 סנטימטרים ממנו וללחוץ על כפתור האישור להשמעת הצבע שזוהה.

חשוב לדעת שיישום מציין צבע תלוי מאוד בתאורה הסביבתית ואינו פועל כראוי בתנאי אור נמוכים. בתנאים כאלו, ייתכן שתוצאות זיהוי הצבעים לא יהיו תואמות למציאות. כדי להעלות את רמת הדיוק, מומלץ לחזור על התהליך מספר פעמים ולבחור את הצבע שזוהה במרבית המקרים.

מיקום

יישום המיקום אוסף נתונים מ-GPS, רשתות אלחוטיות ורשתות סלולריות כדי לאמוד את הכתובת הפיזית הקרובה ביותר בסביבתכם. כל תהליך הערכת מיקומכם עשוי להימשך עד 30 שניות. כדי לשלוח את המיקום המשוער באמצעות מיסרון, יש לעבור על רשימת התוצאות שהתקבלו ולבחור ב"שיתוף על ידי הודעות". חשוב לדעת: דיוק אומדן המיקום עשוי להשתנות ואין להסתמך על התוצאה באופן מוחלט. יש להביא בחשבון את עניין הדיוק. הערה חשובה: חובה להיות מחוברים לאינטרנט על-מנת להפעיל את יישום המיקום.

זכוכית מגדלת

יישום זכוכית מגדלת מאפשר הגדלת תצוגת המסך.

- להגדלת האובייקט, יש לכוון את מצלמת הטלפון לכיוון האובייקט וללחוץ מספר פעמים על כפתור מטה עד להצגת ההגדלה הרצויה. להקטנה, יש ללחוץ על כפתור מעלה מספר פעמים, עד לקבלת התצוגה הרצויה.
- יש ללחוץ על כפתור האישור לקבלת תפריט ובו האפשרויות הבאות: הפעלה או כיבוי הקפאת מסך, הפעלה או כיבוי היפוך צבעים והפעלה או כיבוי הפנס.

תיוג חפצים עם NFC

היישום תיוג חפצים עם NFC עוזר לזהות חפצים שאינם ניתנים לזיהוי ודאי על-ידי מגע, כמו למשל תיקים, תבלינים, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי ניקוי לבית, בקבוקים, פחיות, ועוד. יש להניח את מדבקת תיוג ה-NFC על החפץ ולסרוק אותה עם מכשיר הטלפון. חובה להשתמש במדבקות תיוג NFC אשר מגיעות באריזת מכשיר הטלפון. אפשר לרכוש מדבקות נוספות ממשווק ה-BlindShell Classic 2.

תיוג חפץ

- כדי לתייג חפץ, יש להניח את מדבקת תיוג ה-NFC על החפץ הנבחר.
- יש לבחור "הוספת תגית" מתוך התפריט ולמקם את התג קרוב לחלקו האחורי של הטלפון. לאחר-מכן יש להקליד או להקליט את תיאור החפץ.

קריאת תגית

לקריאת התגית יש לבחור "קריאת תגיות" מתוך התפריט ולמקם את התג בחלקו האחורי של הטלפון.

עריכת תגית

לעריכה או הסרה של תגית, יש לבחור בתגית הרצויה מתוך "רשימת תגיות".

התקן ונהל יישומים

כאן תוכלו למצוא ולהתקין יישומים חדשים לטלפון, לרשום יישומים שמוחקנים בטלפון, לנהל אותם או להסיר אותם. הגדרות הקשורות לעדכוני אפליקציות ניתן למצוא גם כאן.

קטלוג אפליקציות BlindShell

קטלוג האפליקציות של BlindShell מכיל יישומים שפותחו על ידי BlindShell והשליטה והממשק שלהם מתאימים לסביבת הטלפון של BlindShell. בקטלוג, תוכל לעיין בחבילות מומלצות עבורך, לחפש חבילות ספציפיות, לבדוק יישומים שנוספו לאחרונה לקטלוג, או לעיין בכל החבילות ממוינות לפי קטגוריות.

אפליקציות של צד-שלישי

באפליקציות צד-שלישי תוכלו למצוא אפליקציות שפותחו על ידי חברות אחרות מלבד BlindShell. יישומי צד שלישי אינם מאומתים או מאושרים על ידי BlindShell, ולכן BlindShell אינה אחראית לכל בעיה הנובעת מהשימוש ביישומים אלה וההתקנה היא באחריותך בלבד. ניתן למצוא ולהתקין אפליקציות אחרות באמצעות חיפוש פריט תפריט של אפליקציות של צד-שלישי. האפליקציות שהורדת יישמרו בקטגוריה של אפליקציות צד-שלישי.

חבילות מותקנות

בחבילות המותקנות תוכל למצוא יישומים שהותקנו מקטלוג האפליקציות של BlindShell או מאפליקציות צד-שלישי. אתה יכול לפתוח אותם מכאן, לקרוא מידע על חבילה, להציג היסטוריה או שינויים, או לנהל אפשרויות מתקדמות, שבהן אתה יכול למחוק נתונים זמניים או למחוק נתוני אפליקציה.

- מחק נתונים זמניים: אפשרות זו מנקה נתונים פנימיים שנשמרו על ידי האפליקציה, לא כולל נתוני משתמש. זה שימושי אם האפליקציה מתנהגת בצורה חריגה.
- מחק נתוני אפליקציה: אפשרות זו מסירה את כל נתוני האפליקציה, ומחזירה את האפליקציה למצבה המקורי כפי שהיה לאחר ההתקנה הראשונה.

הערה: לא ניתן להסיר אפליקציות מותקנות מראש, אך הן עשויות להיות מושבתות באפשרויות המתקדמות של החבילה. כאשר החבילה מבוטלת, היא לא תוצג באפליקציות של הטלפון.

עדכונים

כאן תוכלו לראות עדכונים זמינים עבור יישומים מותקנים, לעדכן את כל החבילות בבת אחת, או לעיין בהיסטוריה של יישומים שעודכנו לאחרונה.

הגדרות

ניתן להפעיל עדכונים אוטומטיים מכאן. תוכלו לבחור לעדכן אוטומטית רק דרך WiFi או WiFi ונתונים נידים. אתה יכול גם לבחור ללא עדכונים אוטומטיים - כאשר נבחר, יש לבצע עדכונים של אפליקציות באופן ידני דרך פריט התפריט עדכן. ניתן להפעיל או להשבית התראות על עדכוני יישומים. תוכלו גם לקבל הודעה על יישומים חדשים בקטלוג BlindShell.

6.4 הגדרות

צלילים

פרופילים

פרופיל פעיל

פריט התפריט פרופיל פעיל מאפשר להגדיר את פרופיל השמע המשמש לשיחות נכנסות, הודעות והתראות אחרות. כדי לגשת במהירות להגדרות אלה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ה-hash. הפרופילים הבאים זמינים:

- רינגטון ורטט.
- רטט בלבד.
- רינגטון ללא רטט.
- שקט ללא רטט.
- מצב טיסה - משעה את טכנולוגיות העברת אותות בתדר רדיו של הטלפון (Bluetooth, טלפוניה ו-Wi-Fi).

מצב לילה

פריט תפריט מצב לילה מאפשר להגדיר את פרופילי הלילה והיום, המתחלפים בשעה מוגדרת.

- החליפו את מצב מצב הלילה על ידי לחיצה על לחצן האישור
- כדי להגדיר את שעת ההתחלה והסיום של מצב הלילה, בחרו בפריט התפריט שעת התחלה או שעת סיום.

- לבחירת פרופיל הלילה, בחרו בפריט התפריט של פרופיל לילה.
- לבחירת פרופיל היום, בחרו בפריט התפריט פרופיל יום.
- תוכלו עדיין לשנות באופן ידני פרופיל פעיל באמצעות פריט התפריט "פרופיל פעיל" או על ידי לחיצה ארוכה על מקש Hash מהמסך הראשי.

עוצמה

בתפריט "עוצמה" ניתן להגדיר את רמת הצלצול עבור שיחות נכנסות, התראות, שעון מעורר וצלילי משוב של הטלפון.

מנגינות

בתפריט "מנגינות" ניתן לקבוע צליל צלצול עבור שיחות נכנסות, צליל התראה וצליל שעון מעורר. להגדרת צלצול בהתאמה אישית, יש להעתיק את הקובץ שבחרת אל תוך האחסון הפנימי של הטלפון. עבור הגדרה של צליל (רינגטון), יש להעתיק את קובץ הצלצול, עבור הגדרה של הודעות, יש להעתיק את קובץ ההודעות ועבור הגדרה של שעון מעורר, יש להעתיק את קובץ השעון המעורר.

פלט קולי

פריט התפריט פלט קולי מאפשר להגדיר את המאפיינים של הפלט הקולי של הטלפון. ניתן לשנות או להגדיר את המאפיינים הבאים:

- קצב דיבור.
- גרסה קולית (רק אם נתמכת על ידי השפה).
- זיהוי שפה - כאשר מוגדר, פלט קולי מבוטא בשפה שזוהתה. רק אם נתמך על ידי השפה
- השתקת פלט קולי - כאשר מוגדר, פלט קול מושבת.

משוב

פריט התפריט משוב מאפשר להגדיר את המשוב הנוסף של צליל ורעידות. משוב זה משלים את הפלט הקולי בזמן הפעלת הטלפון.

- צליל ורטט
- רק צליל

- רק רטט
- ללא צלילים, ללא רטט

הודעות

- הודעת מתקשר נכנסת - כאשר מוגדרת, שם המתקשר מוכרז אוטומטית במהלך שיחה נכנסת. אחרת, לחצו על לחצן הפעולה הימני כדי להכריז על שם המתקשר.
- הודעת מקלדת נעולה - כאשר מוגדרת, הטלפון מכריז שהוא נעול כאשר מקש כלשהו נלחץ מספר פעמים כאשר הטלפון נעול.
- חיווי מיקום בתפריט - כאשר מוגדר, הפלט הקולי מתווסף במידע על המיקום הנוכחי בתפריט וספירת פריטי התפריט (למשל, "שניים מתוך חמישה")
- הודעת רמת הסוללה במסך הראשי.
- הכרזה כאשר הסוללה נגמרת.
- הודע כאשר הסוללה טעונה במלואה.

תזכורת על התראה

בתפריט "תזכורת על התראה" ניתן להגדיר תזכורות עבור התראות שלא נקראו. על כל התראה שלא נקראה, הטלפון משמיע צפצוף עדין שחוזר כל חמש דקות. כאשר האירוע החדש נקרא, הצפצוף המחזורי מופסק.

רמקול אוטומטי

בתפריט "רמקול אוטומטי" ניתן להפעיל או לכבות את הרמקול האוטומטי בזמן שיחת טלפון. כאשר פעיל והטלפון מורחק מהאוזן בזמן שיחה, הפלט הקולי אוטומטית עובר לרמקול.

צליל מסך ראשי

כאן ניתן להפעיל או להשבית צליל היכרות במסך הראשי.

מקלדת

נעילת לוח המקשים

בתפריט "נעילת המקלדת" ניתן להגדיר את אופן הנעילה, אשר תפקידה למנוע הקלדה לא מכוונת על מקשי הטלפון. להלן האפשרויות:

- נעילת מקלדת ידנית - לחיצה ארוכה על כפתור הכוכבית נועל נעילה ידנית. לשחרור הנעילה, יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה על כפתור הכוכבית.
- נעילת מקלדת ידנית או אוטומטית -- המקלדת ננעלת אוטומטית לאחר שהמסך מחשיך או לנעילה ידנית, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הכוכבית.
- ללא נעילת מקלדת -- הנעילה לא פעילה.

טיפ: להקראה חוזרת של השעה הנוכחית כאשר המקלדת נעולה, יש ללחוץ על כפתור האישור. המקלדת תישאר נעולה.

קריאה בעת מחיקת תווים

בתפריט "קריאה בעת מחיקת תווים" ניתן להגדיר מה יוכרז כאשר מוחקים תווים בעת הזנת המלל. אלו האפשרויות:

- קריאת התו שלפני זה שנמחק.
- קריאת התו שנמחק.

חזרה בעת הקלדת אותיות

בתפריט "חזרה בעת הקלדת אותיות" ניתן להגדיר את החזרה בזמן הזנת המלל. אלו האפשרויות:

- חזרה על המילה לאחר הקשה על רווח.
- חזרה על כל המלל בעת הקשה על רווח.
- ללא חזרה.

חיווי על אותיות רישיות

בתפריט "חיווי על אותיות רישיות" ניתן להגדיר כיצד אותיות רישיות יוכרזו בזמן הזנת מלל. אלו האפשרויות:

- חיווי בדיבור -- מכריז על אות גדולה בזמן הקלדת אותיות רישיות.
- חיווי באמצעות גובה צליל גבוה יותר -- משנה את גובה הטון של הפלט הקולי בזמן הקלדת אותיות רישיות.
- ללא חיווי -- הכרזת אותיות רישיות אינה מופעלת.

קריאת תווים במהלך הכתיבה

פריט התפריט קריאה של תווים במהלך כתיבה מאפשר הגדרות אם תווים יקראו במהלך הכתיבה. האפשרויות הבאות זמינות.

- קרא תווים - מכריז על כל התווים במהלך הכתיבה.
- אל תקראו אותיות - מכריז על תווים אחרים מאשר אותיות.
- אל תקרא אף דמות - קריאת תווים במהלך הכתיבה מושבתת.

רשימת סמלי הבעה

ערוך רשימת סמלי הבעה - ניתן למחוק או להזיז את סמלי ההבעה למעלה או למטה ברשימה הוסף - חפש כדי להוסיף סמלי הבעה מחק הכל - פעולה זו תמחק את כל סמלי הבעה איפוס לברירת המחדל - לאחר איפוס לברירת המחדל, רשימת סמלי הבעה תוגדר כברירת מחדל.

מצב הכתבה

פריט תפריט מצב הכתבה מאפשר בחירה בזיהוי דיבור לא מקוון או מקוון. האפשרויות הבאות זמינות:

- השתמש בזיהוי דיבור מקוון כאשר הרשת זמינה - משתמש בזיהוי דיבור מקוון כאשר זמין, אחרת נעשה שימוש בזיהוי דיבור לא מקוון.
- השתמש תמיד בזיהוי דיבור לא מקוון - זיהוי דיבור מקוון מושבתת.

הערה: פריט תפריט זה זמין רק עבור שפות עם זיהוי דיבור לא מקוון. שפות נתמכות: גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, הולנדית, פורטוגזית, רוסית.

פריסת מקלדת חיצונית

פריט התפריט של פריסת מקלדת חיצונית מאפשר הגדרה באיזו פריסת מקלדת חיצונית נעשה שימוש. הערה: פריט תפריט זה זמין רק כאשר מקלדת חיצונית מחוברת.

תצוגה

הגדרת בהירות

פריט תפריט הגדרות הבהירות מאפשר לשנות את בהירות התצוגה. רמה גבוהה יותר פירושה מסך בהיר יותר אך חיי סוללה קצרים יותר. מסך עמום לחלוטין אומר שהמסך כבוי - זה עשוי לתמוך בפרטיות ולהאריך את חיי הסוללה.

זמן להחשכת מסך

בתפריט "זמן להחשכת מסך" ניתן להגדיר זמן חוסר פעילות, שלאחריו הטלפון ייכנס למצב שינה כדי לשמר את הסוללה. כדי להעיר את הטלפון ממצב שינה, יש ללחוץ על מקש כלשהו. כאשר נעילת המקלדת האוטומטית במצב פעיל, גם לוח המקשים של הטלפון יהיה נעול. במקרה זה, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הכוכבית כדי לשחרר את לוח המקשים ממצב נעילה.

ערכת צבעים

פריט תפריט ערכת צבעים מאפשר לבחור ערכות צבעים שונות לסביבת הטלפון. הצבע הראשון מציין את צבע הטקסט, השני הוא צבע הרקע. האפשרויות הבאות זמינות:

- לבן על שחור.
- שחור על לבן.
- לבן על כחול.
- שחור על צהוב.
- צהוב על שחור.
- כחול על לבן.
- צהוב על כחול.
- כחול על צהוב.
- אדום על שחור.
- שחור על אדום.
- אפור על שחור.
- שחור על אפור.

סגנון התפריט הראשי

ב"סגנון התפריט הראשי" ניתן לשנות את העיצוב הגרפי של התפריטים השונים. אלו האפשרויות:

- סמלים ומלל.
- מלל בלבד.
- סמלים בלבד.

גודל המלל

בתפריט "גודל המלל" ניתן לשנות את גודל הגופן בתפריטים השונים. אלו האפשרויות:

- גודל מלל רגיל.
- גודל מלל גדול מאוד -- אפשרות זו יכולה לשבור את גלישת השורות ומילה בודדת עשויה להתפרש על מספר שורות.

הודעות לד אור

הודעות פריט תפריט תאורת לד מאפשר הגדרה אם נורית לד הודעה ב- יש להשתמש בחזית הטלפון לציון הודעות. צבעי אור לד מבחינים בין סוגים שונים של הודעות:

- שיחות שלא נענו הן מסומן על ידי נורה אדומה.
- הודעות SMS שהוחמצו הן מסומן באור כחול.
- אירועים אחרים שהוחמצו מסומנים על ידי נורה ירוקה.

רשתות

אינטרנט אלחוטי (WiFi)

בתפריט "אינטרנט אלחוטי" ניתן להתחבר לרשת אלחוטית (WiFi).

- להפעלת חיבור אלחוטי, יש לבחור ב"הפעלת אינטרנט אלחוטי".
- כדי להתחבר לרשת אלחוטית, יש לבחור את הרשת האלחוטית מתוך הרשימה ואחר-כך לבחור ב"חיבור לרשת". אם הרשת האלחוטית מוגנת על-ידי סיסמה, יש להזין אותה.

- כדי להתחבר לרשת אלחוטית מוסתרת, יש לבחור ב"חיבור לרשת מוסתרת" בתפריט ולאחר-מכן להזין את שם הרשת (SSID) ואת הסיסמה.
- כדי להתחבר לרשת וויי פיי הדורשת כניסה, המשך לדפדפן האינטרנט ומלא את פרטי הכניסה.

נקודה חמה של WiFi

הנקודה החמה של WiFi מאפשרת לשתף נתונים ניידים דרך WiFi.

- כדי להפעיל נקודה חמה של WiFi, בחרו בפריט התפריט הפעילו את הנקודה החמה של WiFi.
- הפעלת הנקודה החמה של WiFi תנתק את חיבור ה-WiFi הנוכחי.
- כדי לבטל את נקודת ה-WiFi, בחרו בפריט התפריט כבה את הנקודה החמה של WiFi.
- כדי לשנות את פרטי הכניסה לרשת ה-WiFi hotspot, בחרו בפריט התפריט הגדרות.

הערה: פריט תפריט זה זמין רק כאשר קיים כרטיס SIM בטלפון.

אינטרנט אלחוטי (WIFI) בעזרת קובץ טקסט

ניתן להקים חיבור אלחוטי בעזרת קובץ טקסט השמור באחסון הפנימי של הטלפון.

- יש להעתיק קובץ טקסט בשם wifi.txt אל התיקייה הראשית של האחסון הפנימי של הטלפון.
- יש להזין את שם הרשת האלחוטית בשורה הראשונה של הקובץ.
- יש להזין את סיסמת הרשת בשורה השנייה של הקובץ.
- הסיסמה בקובץ תשמש אוטומטית לחיבור לרשת שנבחרה.

הערה: פריט תפריט זה זמין רק כאשר קיים כרטיס SIM בטלפון.

בלוטות Bluetooth

בתפריט "Bluetooth" ניתן להתחבר ולנהל התקני Bluetooth.

כיצד לצמד מכשיר חדש

- יש לאפשר את מצב הצימוד במכשיר שלכם. חלק מהמכשירים נמצאים במצב צימוד כברירת מחדל כשהם מופעלים ומחוץ לאיזור קליטה. במכשירים אחרים קיים מקש או

- צירוף מקשים מיוחד המפעיל את מצב הצימוד. דבר זה משתנה ממכשיר למכשיר וניתן למצוא את ההסבר לכך במדריך למשתמש של המכשיר.
- יש להפעיל את ה-Bluetooth ולבחור באפשרות "סריקה עבור התקנים". הסריקה תימשך עד חצי דקה, ולאחריה תוצג רשימה של התקנים קרובים.
- לצימוד המכשיר, יש לבחור אותו מתוך הרשימה. התהליך יימשך מספר שניות.
- חלק מהמכשירים עשויים לדרוש קוד אימות. במקרה כזה, יש להזין את הקוד הניתן על-ידי מכשיר ה-BlindShell בהתקן ה-Bluetooth החיצוני.
- לביטול הצימוד, יש לבחור בהתקן מתוך רשימת "התקנים מוצמדים" ואחר כך לבחור ב"ביטול צימוד".

חיבור וניתוק התקן

התקן חדש שצומד אמור בדרך כלל להתחבר באופן אוטומטי. כדי לחבר או לנתק התקן באופן ידני, יש לבחור את ההתקן מתוך רשימת "התקנים מוצמדים" ולאחר מכן לבחור ב"חיבור" או "ניתוק".

הערה חשובה:

- לפני שניתן יהיה לחבר התקן מוצמד, יש צורך בדרך כלל בהדלקתו על ידי מתג שממוקם על גבי ההתקן. חלק מן ההתקנים נכבים באופן אוטומטי לאחר זמן מסוים של חוסר פעילות.
- מספר התקני ה-Bluetooth בשוק הוא עצום. חברת BlindShell אינה יכולה להבטיח תאימות עם כל אחד מן ההתקנים. ייתכן שהמוכר ממנו נקנה מכשיר ה-BlindShell, יוכל לייעץ או להציע לך התקן שנבדק.
- כתוצאה מהפרעות אפשריות של גלי רדיו וכתוצאה מפרוטוקול Bluetooth, אי אפשר לדעת בוודאות שההתקן יזוהה בתהליך הסריקה. אם ההתקן אינו ברשימה או שתהליך הצימוד נכשל, השאירו אותו במצב צימוד וחזרו שוב על התהליך. אם הבעיה אינה נפתרת, יש לוודא שאין בסביבה גורמי הפרעה חזקים, כגון התקן Bluetooth נוסף, נתב אלחוטי, או מכשיר אחר המשדר גלי רדיו.

רשת סלולרית

נתונים ניידים

פריט התפריט 'נתונים ניידים' מספק ניהול של נתונים ניידים. המכשיר משתמש בסוג החיבור הטוב והזמין ביותר כרגע. למידע על סוג החיבור הנוכחי, עיין במידע על מצב הטלפון (לחץ על לחצן הפעולה השמאלי).

- פריט תפריט כפתור נתונים ניידים מאפשר הפעלה וכיבוי של הנתונים הניידים.
- פריט תפריט הגדרות APN מאפשר הגדרה של נקודות גישה לרשת סלולרית.
- פריט תפריט שימוש בנתונים ניידים מספק מידע מפורט על שימוש בנתונים ניידים.

הערה: פריט תפריט זה זמין רק כאשר קיים כרטיס SIM בטלפון.

PIN קוד

פריט התפריט קוד PIN מאפשר הפעלה, ביטול או שינוי של קוד ה-PIN. כאשר מופעל, קוד ה-PIN מתבקש בעת הפעלת הטלפון. הודעה חשובה: אם תזינו את קוד ה-PIN שגוי שלוש פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM שלך ייחסם זמנית ויתבקש קוד PUK. אם תזין את קוד ה-PUK בצורה שגויה עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM שלך ייחסם לצמיתות. הערה: פריט תפריט זה זמין רק כאשר קיים כרטיס SIM בטלפון

העברת שיחות

בהעברת שיחות תוכלו לבחור באילו מקרים תרצו להעביר שיחה ל-SIM אחר. תוכלו לבחור להעביר שיחה למספר אחר במקרה שאתם עסוקים או כאשר השיחה לא נענתה.

הגדרות שיחה מתקדמות

בהגדרות שיחה מתקדמות, תוכלו להגדיר אפשרויות שונות. ניתן לבחור 1 SIM או 2 כדי להגדיר תא קולי או שיחה ממתינה.

בדיקת חיבור

פריט התפריט בדיקת חיבור מפעיל בדיקת חיבור לאינטרנט. התוצאה מספקת מידע על איכות החיבור לאינטרנט וזמינות שרת BlindShell.

כרטיסי סים

בתפריט "כרטיסי סים" ניתן לנהל את כרטיסי הסים המועדפים עבור שיחות יוצאות, הודעות יוצאות או העברת נתונים. שימו לב: אפשרות זו תהיה זמינה רק במקרה שיהיו שני כרטיסי סים בשימוש בתוך הטלפון.

יישומים מועדפים

פריט התפריט יישומים מועדפים מאפשר ניהול רשימת היישומים המועדפים. רשימה זו נגישה במהירות על ידי לחיצה על כפתור הפעולה הצדדית. כדי להוסיף אפליקציה למועדפים, בחרו בפריט התפריט הוסף יישום מועדף. כדי להסיר אפליקציה מהמועדפים או לשנות את מיקומה ברשימה, בחרו את האפליקציה על ידי לחיצה על לחצן האישור. טיפ: כדי לעבור בין אפליקציות, השתמשו בלחצן הצד. לדוגמה, אם יש לך את האימייל שלך ואפליקציה אחרת שמורה במועדפים, תוכלו לדלג במהירות מהמייל לאפליקציה השנייה ולחזור למקורי באמצעות כפתור החזרה.

קורא מסך

הכרזת פריט מרשימה - מכריזה על סדר הפריטים זה מתחת זה באפליקציות צד-שלישי כדוגמה הבאה: 1 מתוך 3, 2 מתוך 3, 3 מתוך 3. הכרזת פריט מגריד - מכריזה על שורות ועמודות עבור פריטים מסוימים באפליקציה של צד-שלישי, כגון תמונות באלבום.

העוזרת הקולית לונה

פריט תפריט זה מאפשר לשנות את המאפיינים של העוזרת הקולית לונה. לונה עם תכונות AI - אם מופעלת לונה תשתמש בבינה מלאכותית כדי לספק תכונות מורחבות באינטראקציה עם הטלפון והיישומים, תוכלו לענות על שאלות טריוויה או לחפש אותכם בדפדפן האינטרנט. כדי להפעיל, תתבקשו להסכים לתנאים ולהגבלות.

פורמט כרטיס SD

- פירמוט כרטיס SD פירושו הכנתו לשימוש על ידי מחיקת כל הנתונים הקיימים והגדרת מערכת קבצים חדשה. תהליך זה הופך את הכרטיס מוכן לאחסון קבצים חדשים.
- לפני הפרמוט, הקפדו להעתיק את כל הקבצים החשובים למכשיר אחר, מכיוון שהפירמוט ימחק את כל מה שבכרטיס.

לשם מה ניתן להשתמש בפורמט כרטיס ה-SD:

- כדי למחוק את כל הנתונים: עיצוב מוחק לחלוטין את כל הקבצים בכרטיס ה-SD.

- כדי לתקן שגיאות: אם בכרטיס ה-SD שלך יש שגיאות או שהוא אינו פועל כהלכה, עיצוב יכול לעתים קרובות לתקן את הבעיות האלה.

הערה: פריט תפריט זה זמין רק אם הוכנס כרטיס SD.

תאריך, שעה ואיזור זמן

- תפריט זה מאפשר הפעלה וביטול תאריך ושעה אוטומטיים, שינוי תבנית זמן ושינוי איזור זמן.
- כדי להפעיל תאריך ושעה אוטומטיים, יש לבחור בתפריט "תאריך ושעה". כאשר פעיל, ניתן לקבוע אותם באופן אוטומטי מהרשת. כרטיס הסיים חייב להיות בשימוש בטלפון.
- לקביעת התאריך והשעה באופן ידני, יש לכבות תחילה את התאריך והשעה האוטומטיים.

שפה

תפריט השפה מאפשר לשנות את שפת ברירת המחדל של טלפון.

עדכון מערכת

פריט תפריט עדכון מערכת מאפשר עדכון תוכנת הטלפון. העדכונים מביאים תכונות חדשות, משפרים את התכונות הנוכחיות ומתקנים באגים. עדכון חדש מוכרז באמצעות התראה. כדי לבדוק עדכונים באופן ידני, בחרו בפריט התפריט בדוק אם יש עדכונים. אם קיים עדכון, בחרו הורד עדכון ולאחר מכן התקן עדכון. כדי להתקין עדכון, יש צורך בחיבור לאינטרנט. הודעה חשובה:

- תהליך העדכון אורך מספר דקות. תקבלו מידע על התקדמות העדכון. במהלך העדכון, הטלפון מדבר בקול רבועי.
- אל תכבו את הטלפון שלכם או תבצעו פעולות אחרות עם הטלפון שלכם במהלך תהליך העדכון. פעולה זו עלולה לגרום לנזק לתוכנת הטלפון, כך שיהיה צורך לשלוח את הטלפון לתיקון.

האפשרות האחרונה היא הצג היסטוריית שינויים. סעיף זה מכיל מידע על גירסאות תוכנה ושינויים.

אודות הטלפון

בתפריט "אודות הטלפון" ניתן למצא מידע טכני אודות הטלפון, כמו למשל גרסת התוכנה וגודל אחסון פנימי. כמו-כן, מאפשר גישה לתפריט השירות, בו יש אפשרות גיבוי ואיפוס להגדרות יצרן.

גרסאות תוכנה

מידע על גרסת המערכת, גרסת ה-ROM או GIT מאוחסן כאן.

פרטי הרשת

מידע על SIM, כתובת IP של WiFi או כתובת MAC Bluetooth מאוחסן כאן.

תפריט שירות

בתפריט השירות קיימת תכונה המפשטת מספר פעולות שירות. עבור תפריט זה, על הטלפון לאתחל את עצמו מחדש במצב ייחודי, מחוץ למערכת ההפעלה הרגילה. תפריט השירות אינו חלק ממערכת ה-BlindShell, וקבלת שיחות ופעולות סטנדרטיות אחרות אינן זמינות. ליציאה מתפריט זה, יש לבחור ב"Restart phone" מתוך התפריט.

נתוני גיבוי

פונקציית נתוני הגיבוי תיצור קובץ המכיל נתוני משתמש פנימיים. פונקציית הגיבוי אינה שומרת נתונים המאוחסנים בכרטיס זיכרון SD אם קיים.

- כדי לגבות נתונים, הכניסו כרטיס זיכרון SD או כונן הבזק מסוג USB C לטלפון. אם שניהם קיימים, קובץ הגיבוי יישמר בכרטיס הזיכרון SD.
- בחרו בפריט התפריט Backup data.
- בחרו סוג גיבוי, האפשרויות הבאות זמינות: גיבוי מלא ישמור את העדפות המשתמשים של יישומים והגדרות הטלפון, כולל מדיה המאוחסנת באחסון הפנימי של הטלפון. גיבוי מלא ללא מדיה עושה את אותו הדבר למעט מדיה המאוחסנת באחסון הפנימי של הטלפון.
- קובץ הגיבוי ייוצר עם חותמת הזמן והסיומת "backup".

שחזור נתונים

הפונקציה שחזור נתונים מאפשרת שחזור נתוני משתמש מקובץ גיבוי שנוצר בעבר באמצעות פונקציית נתוני גיבוי. יש לאחסן את קובץ הגיבוי בכרטיס זיכרון SD או בכונן הבזק מסוג USB C שהוכנס לטלפון. הודעה חשובה: הנתונים שלך יוחלפו על ידי פעולת שחזור הנתונים.

איפוס להגדרות יצרן

בעת פעולת איפוס להגדרות יצרן, כל נתוני המשתמש יימחקו ומכשיר הטלפון יחזור להגדרות המקוריות שלו.

גיבוי נתוני טלפון ואפליקציות

תכונת הגיבוי מאפשרת ליצור ולשחזר גיבויים של נתוני אפליקציות. גיבויים נשמרים בכרטיס SD, משם ניתן לשחזר אותם מאוחר יותר. ניתן גם להעביר אותם דרך כרטיס ה-SD לטלפון אחר של BlindShell Classic 3 לצורך שחזור.

יצירת גיבויים

- אם תכונת הגיבוי מופעלת, גיבויים נוצרים אוטומטית ברקע בערך פעם ביום.
- כדי ליצור גיבוי באופן ידני:
- אשר את פריט התפריט "גיבוי ידני".
- כדי לגבות את כל היישומים, בחר "גיבוי הכל".
- כדי לגבות יישום ספציפי, בחר בפריט התפריט "בחר יישום".

גיבוי רשימת חבילות

- כדי להציג או לנהל חבילות גיבוי, אשר את פריט התפריט "רשימת חבילות גיבוי".
- לאחר בחירת חבילת גיבוי ב"רשימת חבילות גיבוי", ניתן ל:
- הצגת גיבויים בודדים בחבילה על ידי אישור פריט התפריט "תוכן".
- שיחזור כל הגיבויים בחבילה על ידי אישור פריט התפריט "שחזור".
- הצגת מבנה האחסון וגדלי הגיבויים בחבילה על ידי בחירה בפריט התפריט "שימוש באחסון".

שחזור גיבויים

- כדי לשחזר גיבוי של יישום:
- בחר בפריט התפריט "תוכן".
- בחר את החבילה הרצויה.
- אשר את החבילה ובחר בפריט בתפריט "שחזור גיבוי".
- כדי למחוק גיבוי של אפליקציה:

- בחר בפריט בתפריט "תוכן".
- בחר את החבילה הרצויה.
- אשר את החבילה ובחר בפריט בתפריט "מחק גיבוי".

העברת נתונים

העברת נתונים היא פעולה חד פעמית שנועדה להעביר נתוני משתמש מ-BlindShell Classic 2 ל-BlindShell Classic 3 חדש. היא כרוכה ביצירת גיבויים ב-BlindShell Classic 2, העברתם יחד עם רשימה של יישומים מותקנים ושחזור הנתונים ב-BlindShell Classic 3. הנתונים מועברים באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi Direct.

בתחילת העברה, תוכלו לבחור אם להעביר את התוכן של תיקיות המדיה באחסון הפנימי של הטלפון (למשל, מוזיקה, סרטים, מסמכים, פודקאסטים). ניתן להעביר נתוני מדיה גם בנפרד (למשל, באמצעות מחשב דרך MTP או מנהל הקבצים כדי להעביר קבצים לכרטיס SD). הוספת נתוני מדיה בחבילת ההעברה מגדילה משמעותית את גודלה, דורשת יותר מקום פנוי בשני המכשירים ומאריכה את זמן ההעברה.

מידע חשוב

- BlindShell Classic 3 חייב להיות מחובר לאינטרנט כדי לבצע העברה מוצלחת. BlindShell Classic 2 אינו דורש חיבור לאינטרנט.
- שני המכשירים חייבים להיות נטענים ל-25% לפחות או מחוברים למטען כדי להתחיל את העברת הנתונים.
- שחזור גיבויי יישומים מ-BlindShell Classic 2 יחליף את כל הנתונים הקיימים עבור יישומים אלה ב-BlindShell Classic 3.
- נדרש מקום פנוי ליצירת חבילת ההעברה. אם הוכנס כרטיס SD, הוא ישמש למטרה זו.
- אם יש לך אפליקציות רבות עם כמויות גדולות של נתונים או כוללות מדיית אחסון פנימית, התהליך עשוי להימשך זמן רב יותר. במקרים קיצוניים, תהליך ההגירה יכול להימשך עד שעה.
- רק נתוני יישומים קטנים מ-150 MB יועברו.
- העברת נתונים משתמשת בטכנולוגיית Wi-Fi Direct בפס 5 GHz. מהירות ההעברה עשויה להשתנות בהתאם להפרעות ה-Wi-Fi המקומיות ולתנאי הסביבה.
- יישומי צד שלישי (למעט אפליקציות פופולריות) לא יותקנו אוטומטית ב-BlindShell Classic 3. עם זאת, אם אפליקציה של צד שלישי תומכת בפונקציונליות גיבוי, הנתונים שלה יכללו בחבילת ההעברה. ניתן לשחזר גיבויים אלה באופן ידני לאחר התקנה מחדש של האפליקציה ב-BlindShell Classic 3.

ביצוע העברת נתונים

1. הנח את הטלפונים BlindShell Classic 2 ו- BlindShell Classic 3 זה ליד זה.
2. על BlindShell Classic 3:
 - חבר את הטלפון לאינטרנט (באמצעות Wi-Fi או כרטיס SIM עם נתונים ניידים). מומלץ חיבור Wi-Fi או תוכנית נתונים ניידים ללא הגבלה, מכיוון שהורדת אפליקציות עשויה לחרוג ממגבלות תוכנית הנתונים.
 - הפעל את "העבר נתונים מ-BlindShell Classic 2" בתפריט "הגדרות" ואשר את כוונתך להמשיך.
3. על BlindShell Classic 2:
 - חייג * # 3 2 1 # מהמסך הראשי ואשר את האפשרות "העבר נתונים ל-BlindShell Classic 3".
 - אשר את כוונתך להמשיך.
4. עקוב אחר יצירת חבילת ההגירה ב-BlindShell Classic 2. התקדמות עבור יישומים בודדים תוצג.
5. התקנים יתחברו אוטומטית והעברת הנתונים תתחיל.
6. צפה בהעברת חבילת ההגירה מה-BlindShell Classic 2 ל-BlindShell Classic 3.
7. לאחר השלמת ההעברה, יתגנן צליל הצלחה ב-BlindShell Classic 2.
8. על BlindShell Classic 3:
 - עקוב אחר חילוץ חבילת ההגירה לאחסון הטלפון.
 - שים לב להורדה והתקנה של יישומים.
 - מעקב אחר שחזור נתוני האפליקציה.
9. לאחר השלמת ההעברה, BlindShell Classic 3 יופעל מחדש ויהיה מוכן לשימוש.

7.4 עזרה למשתמש

- פריט התפריט עזרה מכיל מסמך זה בנוי בסעיפים.
- Open BlindShell Manual - מדריך שלם ניתן למצוא כאן. לאחר לחיצה על לחצן האישור, יוצגו אפשרויות כגון תוכן וחיפוש.
 - עיון במדריכי אפליקציה - מדריכים לאפליקציה מסוימת ניתן למצוא כאן.
 - חיפוש גלובלי - חפש באופן גלובלי בכל המדריכים לפי מילות מפתח.

8.4 כיבוי הטלפון

בחירה באפשרות זו ובאישור שאחריה תגרום לכיבוי הטלפון.

9.4 הודעות שלא נענו ומידע על מצב הטלפון

כדי להציג מידע סטטוס על הטלפון, לחצו לחיצה קצרה על לחצן הפעולה השמאלי. פעולה זו זמינה בכל עת בזמן השימוש בטלפון. הרשימה מכילה את המידע הבא:

- הודעות - בחר רשימת הודעות שלא נענו.
- שעה ותאריך נוכחיים - בחר כדי לפתוח את אפליקציית לוח השנה.
- מצב WiFi - בחר כדי לפתוח את הגדרות ה-WiFi.
- מצב Bluetooth - בחר לפתיחת הגדרות Bluetooth.
- מצב רשת - בחר כדי להפעיל/לכבות נתונים ניידים.
- מצב סוללה.

10.4 תפריט מהיר

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעולה השמאלי כדי להציג תפריט מהיר שבו תוכלו לגשת בקלות להגדרות ופונקציות שונות. כאשר זה אפשרי, אפשרות העתקת טקסט זמינה.

11.4 יישומים מועדפים

לגישה מהירה ליישומים המועדפים, יש ללחוץ על כפתור הפעולה הממוקם בדופן הימני של הטלפון. תיפתח רשימה של יישומים מותאמת אישית שכבר נוספו למועדפים. להוספת יישום נוסף למועדפים, יש לבחור בתפריט "הוספת יישום מועדף". בהגדרות הטלפון ניתן לעשות שינויים נוספים, כגון סידור מחדש של רשימת המועדפים.

5 מפרט טכני

1.5 קישוריות

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE: (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71
- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM radio receiver
- NFC

2.5 חומרה

- מידות: 2X 54.6X 16.7.135 מ"מ
- משקל: 100 גרם (טלפון), 49 גרם (סוללה)
- תצוגה: 83.2 אינץ' (480 x 640)
- זיכרון (RAM): 3 GB
- אחסון פנימי: 32 GB (נגישות למשתמש 22 GB)
- אחסון חיצוני: כרטיס זיכרון מיקרו SD עד 128 GB (FAT32)
- מצלמה: MP 13
- כרטיס SIM: כפול מיקרו-SIM
- סוללה: 3000 mAh
- רמקול: 5.1 W
- מיקרופון: מיקרופון כפול, הפחתת רעש
- שקע שמע סטריאו 5.3
- USB Type-C
- כפתורים: SOS, עוצמת הקול, כפתור פעולה צדדית
- נורית חיווי
- פנס LED למצלמה
- פנס LED

3.5 חיישנים

- מגנומטר
- ברומטר
- מד מהירות
- גירוסקופ
- חיישן קירבה
- חיישן אור

4.5 תעודות

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 שימוש קבוע ומידע בטיחותי

1.6 שימוש קבוע ומידע בטיחותי

שימוש אישי

- אין לפרק את הטלפון. האחריות תבוטל במקרה זה. חלקי המכשיר היחידים הניתנים לפירוק הם הכיסוי האחורי והסוללה. ניתן לגשת לבית הסוללה ללא צורך בכלי עזר.
- יש להשתמש בטלפון לשימוש המיועד בלבד ובהתאם להוראות במדריך למשתמש. היצרן אינו אחראי לכל נזק שייגרם לטלפון או לסביבה כתוצאה משימוש שגוי.
- אין להשתמש בטלפון פגום. יש לבדוק את תקינות הטלפון לפני כל שימוש כדי למנוע פגיעה או נזק נוסף. יש ליצור קשר עם המשווק לקבלת פרטים בקשר לתיקונים הניתנים במסגרת אחריות המוצר.
- יש לכבות את הטלפון כאשר השימוש בו אסור או כאשר הוא עלול לגרום להפרעות או סכנה. נא להישמע להנחיות באזורים מוגבלים.
- היצרן אינו אחראי לפעילות התקינה של הטלפון במידה ונעשה שימוש באביזרים לא מקוריים. יש ליצור קשר עם המשווק לקבלת הנחיות לגבי אביזרים שאינם מקוריים לפני השימוש בהם.
- כדי למנוע נזקי שמיעה אפשריים, מומלץ לא להקשיב בעוצמות גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. הרמקול והאוזניים של הטלפון רועשים מאוד. יש לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בעוצמה הגבוהה ביותר, במיוחד כאשר הטלפון קרוב לאוזניך.
- יש לוודא שניתן לשמוע קולות ורעשים סביבתיים בעת נסיעה עם אוזניות, למניעת מצבים העלולים לסכן אותך בעת עומסי תנועה.
- מכשיר הטלפון אינו עמיד במים או אבק, לכן חשוב לשמור אותו יבש ולהניחו במקום שלא יבוא במגע עם נוזלים.
- אין להשתמש בטלפון בסביבה מאובקת, אפופת עשן, לחה או בקרבת שדות מגנטיים. לכלוך או לחות עלולים לחדור לטלפון ולהזיק לתפעולו.
- יש להרחיק את הטלפון ממקורות חום ומאור שמש ישיר. אין להשאיר את הטלפון בתוך רכב או במקומות בהם הטמפרטורה עלולה לעבור 45 מעלות צלזיוס.

- אין להשתמש בטלפון בזמן נהיגה, רכיבה על אופניים או על כל כלי תחבורה אחר. יש לציית תמיד לחוקים המקומיים הנוגעים לשימוש במכשירים ניידים.
- אין להניח את הטלפון או כל אחד מהאביזרים שלו בתוך מיקרוגל.
- אין להניח את הטלפון ליד כרטיסי אשראי או התקני אחסון אחרים הנושאים מידע על פסים מגנטיים. הרמקול של הטלפון מכיל מגנט העלול למחוק מידע הנמצא על מדיית אחסון מגנטית.

סוללה וטעינה

- לביצועים מיטביים, יש לנסות לשמור את הסוללה בטמפרטורה מומלצת בין 5 מעלות צלזיוס ל-30 מעלות צלזיוס. חשיפות קצרות לטמפרטורות חמות או קרות לא יפגעו בסוללה, אך חשיפה לטמפרטורות קיצוניות לתקופות ממושכות תקטין את הקיבולת ואת אורך החיים של הסוללה.
- יש לכבות את הטלפון ולהסיר את הסוללה כאשר הטלפון אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים. כדי להאריך את חיי הסוללה ולשמור על קיבולת מירבית, מומלץ לאחסן את הטלפון כאשר הסוללה מוטענת לפחות 60%.
- אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לפגוע בסוללה בכל דרך אחרת. יש לזכור שהחלק המסוכן ביותר בטלפון היא הסוללה. למרות שהסבירות נמוכה, אך אפשרית, הסוללה עלולה להתלקח ולעלות באש אם תינזק.
- אין לתקן או לשנות את הסוללה, דבר העלול להוביל לנזק שיכול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אין להשתמש בסוללה, במטען או בכבל טעינה פגומים. הסוללה או המטען עלולים להתקלח ולעלות באש או לגרום להתחשמלות.
- יש להשתמש אך ורק בסוללה המקורית להטענה והפעלה של הטלפון. הסוללה תוכננה במיוחד עבור הטלפון הזה וכל סוללה אחרת עלולה להזיק לטלפון בשל תכונות והתאמות שונות.
- לכל הסוללות יש אורך חיים מוגבל ותהיה ירידה בקיבולת לאחר כמה מאות מחזורי טעינה.
- המטען מיועד לשימוש תוך-מבני בלבד.
- בעת ניתוק המטען משקע חשמל, יש למשוך במטען ולא בכבל המחובר אליו.
- אין לגעת במטען בידיים רטובות.

מיחזור

תמיד יש להשליך מוצרים אלקטרוניים משומשים, סוללות וחומרי אריזה לנקודות איסוף ייעודיות. אין להשליכם כפסולת עירונית מבלי למיין אותם. לשאלות כיצד להשליך את הטלפון, האריזה והאביזרים שלו, יש ליצור קשר עם המשווק.

ילדים ובעלי חיים

יש להרחיק את הטלפון והאביזרים מילדים קטנים ומבעלי חיים. הטלפון מכיל, או מגיע עם, חלקים קטנים, רכיבי פלסטיק וחלקים בעלי קצוות חדים שעלולים לגרום לפציעה או לסכנת חנק.

שיבושים בתפקוד מכשירים רפואיים

- תפעול של ציוד שידורי רדיו, כולל טלפונים אלחוטיים, עלול לשבש את תפקודם של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים בהתאם. מומלץ להתייעץ עם רופא או עם יצרן המכשיר הרפואי על מנת לקבוע האם רמת המיגון נגד אנרגיית רדיו חיצונית אכן מספקת.
- יצרני אביזרים רפואיים מושתלים ממליצים על הפרדה של לפחות 3.15 סנטימטרים בין מכשיר אלחוטי לבין האביזר הרפואי, זאת למניעת הפרעות אפשריות. להלן המלצות לאנשים שבגופם אביזרים מושתלים:
- אין לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- יש להצמיד את המכשיר האלחוטי לאוזן הנגדית לאביזר הרפואי.
- יש לכבות את המכשיר האלחוטי אם יש חשד להפרעות.
- יש לפעול לפי הוראות היצרן של האביזר הרפואי המושתל.
- לשאלות בנוגע לשימוש במכשיר האלחוטי ביחד עם אביזר רפואי מושתל, יש לפנות לספק שירותי הבריאות.

דירוג רמת הקרינה (SAR)

- הטלפון מסווג לשימוש בסביבה ביתית טיפוסית.
- The highest Specific Absorption Rate (SAR) value reported for the phone according to CE standard when tested at the head is 0,623 W/kg (10g), and

when properly worn on the body is 1,474 W/kg (10g). The minimum distance
for body-worn operation is 5mm

The highest Specific Absorption Rate (SAR) value reported for the phone
according to FCC/ISED standard when tested at the head is 0,988 W/kg (1g),
and when properly worn on the body is 1,286 W/kg (1g). The minimum
distance for body-worn operation is 10mm

תוכנה וזמינות יישומים ושירותים

בתוכנה הקיימת על הטלפון עלולים להיות פגמים. היצרן אינו מבטיח, ערב או טוען לגבי רמת
הדיוק, השלמות או התאמת התוכן שבטלפון. היצרן מתנער מפורשות מאחריות לשגיאות
והשמטות המוצגות בטלפון.

- יישומים מסויימים דורשים חיבור לאינטרנט על מנת לפעול כהלכה.
- לפעמים חלק מהשירותים עשויים להיות לא זמינים עקב השבתה של השרת או בגלל חוסר
זמינות של שירותי צד שלישי.
- ייתכן שהמידע המסופק על ידי הטלפון לא תמיד מדויק, למשל מיקום, תוצאות זיהוי צבעים,
מזג האוויר, ועוד.
- היצרן אינו אחראי בשום אופן לתכנים המוצגים ביישומי הטלפון של צדדים שלישיים.
- התוכנה מתעדכנת באופן שוטף. היצרן שומר לעצמו את הזכות להתאים את התוכנה או
את התוכן של המדריך למשתמש, ללא הודעה מוקדמת.

לבירורים ומידע נוסף צרו קשר עם המשווק

אם יש לך שאלות, חששות, או נתקלת במצב שמצריך סיוע, יש ליצור קשר עם המשווק ממנו
רכשת את הטלפון. ניתן גם לפנות ישירות ליצרן הטלפון באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת
info@blindshell.com

7 מידע רגולטורי

1.7 מידע משפטי

מידע רגולטורי -- האיחוד האירופי

תקן CE -- תו סימון ותקינה אירופי

Matapo a.s. מצהירה שהטלפון הנייד מקטגוריית ציוד רדיו עומד בכל דרישות התקן של האיחוד האירופי EU/53/2014.

כל האמור בתו סימון ותקינה אירופי -- תקן CE, אפשר למצא בכתובת www.blindshell.com/conformity

מידע על פינוי מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני (WEEE)

הסמל שעל המוצר ו/או הניירת המשתייכת למוצר פירושם שאין לערבב פסולת של מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני עם פסולת ביתית. לטיפול ומיחזור באופן המתאים, יש לפנות פסולת מסוג זה לנקודות איסוף ייעודיות ללא עלות. לחילופין, במדינות מסויימות, ניתן להחזיר את המוצרים לספק המקומי בתמורה לרכישת מוצר חדש שווה ערך. פינוי על פי התקן יסייע במניעת השפעות שליליות אפשריות על הבריאות והסביבה. יש ליצור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע נוסף על נקודות איסוף ייעודיות בקרבתך. פינוי פסולת בניגוד לתקן, עלול להביא להטלת קנס, בהתאם לחוקי אותה מדינה.

מגבלות תדר 5GHz

המכשיר מוגבל לשימוש תוך-מבני בתדרים 15GHz.5 עד 35GHz.5 במדינות הבאות:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK
אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קפריסין, צ'כוסלובקיה, גרמניה, דנמרק, אסטוניה, יוון, ספרד, פינלנד, צרפת, קרואטיה, הונגריה, אירלנד, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, סלובניה, שוודיה, בריטניה.

טווחי תדרים והספק

להלן הספק היציאה המירבי, בהתאם לדרישות עבור ציוד רדיו [Radio Equipment Directive] 2014/53/EU (RED):

GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm -

WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm -

LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: -
23,42dBm; B28: 23,7dBm

;LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm -

Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm -

4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm -

5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm -

NFC: 0,000000261mW -

8 מידע משפטי

1.8 מידע משפטי

אחריות מוגבלת

האחריות למכשיר הטלפון שלך הינה מוגבלת. להלן תקופות האחריות במדינות הבאות:

- ארצות הברית וקנדה: שניים-עשר (12) חודשים;
- האיחוד האירופי, דרום אפריקה, הממלכה המאוחדת (בריטניה), אוסטרליה וניו זילנד: עשרים וארבעה חודשים (24).

יש לבדוק עם משווק הטלפון מהי תקופת האחריות עבור מדינות ו/או איזורים שאינם מוזכרים ברשימה.

חיי הסוללה הינם לפחות 12 חודשים. במשך תקופה זו, יש לצפות לירידה מזערית בלבד בקיבולת הסוללה. לאחר תקופה זו, כל ירידה בקיבולת או בתפקוד הסוללה, תיחשב כבלאי. תקופת האחריות המוגבלת מתחילה מיום רכישת הטלפון על-ידי לקוח הקצה הראשון ומכסה פגמים בחומר ממנו עשוי הטלפון והנובעים מתהליך הייצור. כל אחריות אחרת אינה חלה בשום אופן.

המקרים הבאים אינם מכוסים תחת אחריות כלשהי:

- בלאי במכשיר הטלפון וירידה ברמת הטעינה של הסוללה.
- נזק שנגרם כתוצאה משימוש שאינו תואם למוצר, חשיפה ללחות או מקורות חום ומגע עם נוזלים.
- נזק שנגרם כתוצאה משימוש באביזרים ומחברים שאינם תואמים למכשיר הטלפון ולא סופקו עמו.
- סדקים או שברים של חלקים במכשיר שנגרמו כתוצאה מהפלתו או מהפעלת לחץ מוגזם עליו.
- אי כיבוד המידע הבטיחותי, הרגולטורי והמשפטי במסמך המצורף לערכת המוצר.
- נזק שנגרם כתוצאה משימוש בסוללה שאינה מקורית, או שימוש בסוללת ה-BlindShell Classic 2 במכשיר טלפון אחר.
- נזק שנגרם כתוצאה מנסיון לתקן את הטלפון על-ידי אדם שאינו מוסמך לכך.

האחריות המוגבלת אינה מכסה אף אחת מן התקלות ברשת, כגון הפסקה בפעילות הסלולרית או ב-WIFI.

התוכנה המותקנת במכשיר הטלפון אינה ניתנת לשינויים, על כל פגמיה האפשריים. ההמלצה היא לגבות מדי חודש את המידע בטלפון, על מנת למנוע איבוד נתונים. היצרן אינו אחראי על איבוד נתונים הנגרם כתוצאה מתקלה, תיקון או החלפה של המכשיר.

מגבלות אחריות היצרן

כלל האחריות של Matapo מוצג בפרטי האחריות שלהלן. בשום מקרה, Matapo לא תהיה אחראית עבור נזקים עקב עלות המכשיר וכן, וללא הגבלה, עבור הנזקים הבאים בגינם לא יינתן פיצוי משמעותי או פיצויי נזיקין: נזקים מסחריים מכל סוג שהוא; נזקים בגין אי יכולת להשתמש במכשיר, בשעון ובנתונים. נזקי מוניטין, הזדמנויות ורצון טוב, נזקי רווח או חיסכון; מקריות וייחודיות.

המשווקים המורשים של Matapo אינם אחראיים בכל הקשור לשימוש במכשיר או אי שימוש התואם למכשיר.